



AETERDERM®

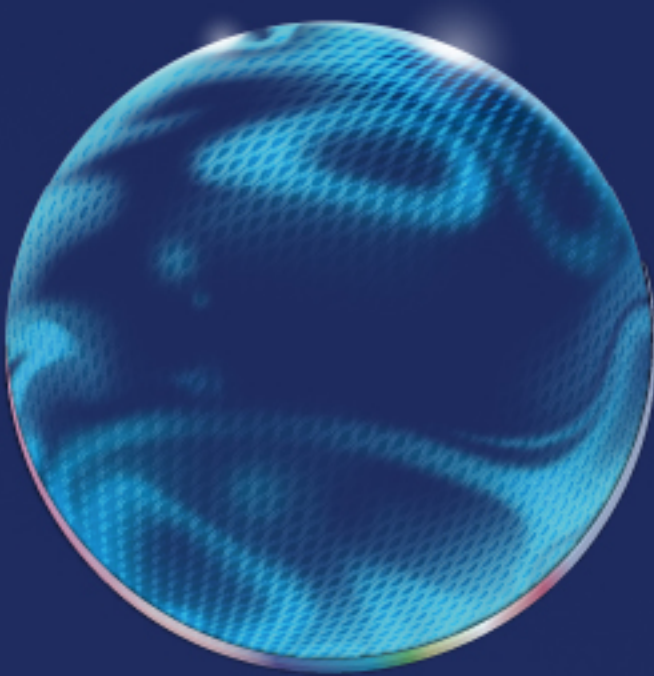


AETERDERM®
PURI EYES
—
AETERDERM® PURI EYES PDRN PATCH

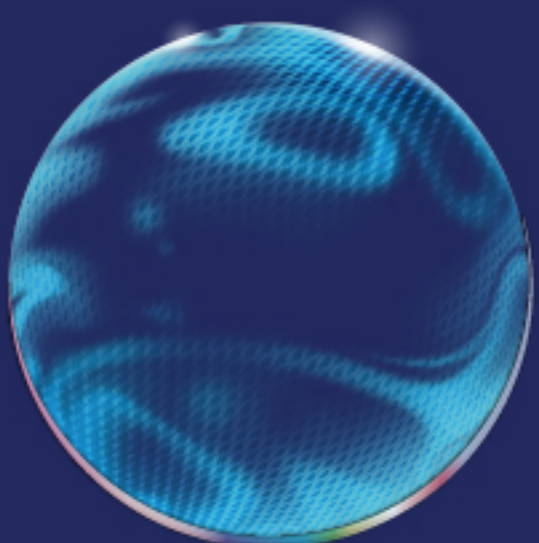



AETERDERM®

PURRIEYES
PDRN
PATCH

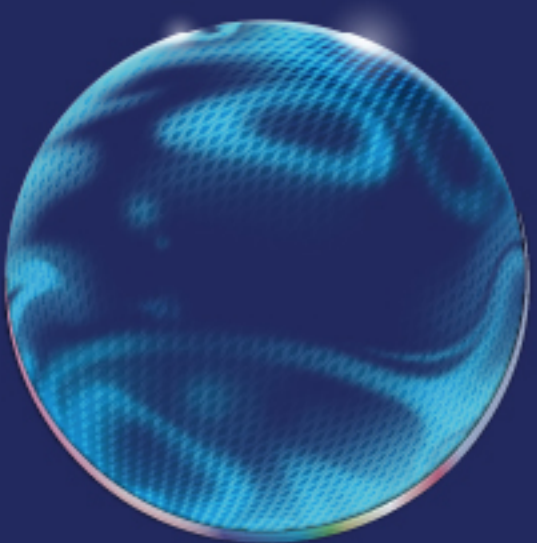

AETERDERM®

PURRIEYES


A close-up, artistic photograph of a woman's face, focusing on her eyes and nose. Her eyes are a striking green color, and her skin is fair. Water droplets are scattered across her face, particularly on her nose and cheek, creating a fresh and hydrated look. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a misty or watery environment. The overall mood is serene and refreshing.

**Độ đàn hồi
làm đẹp mắt**




AETERDERM®
PURI EYES
Polynucleotide **2mg**

- Ít đau, thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu
- Điều trị nhẹ nhàng và êm ái

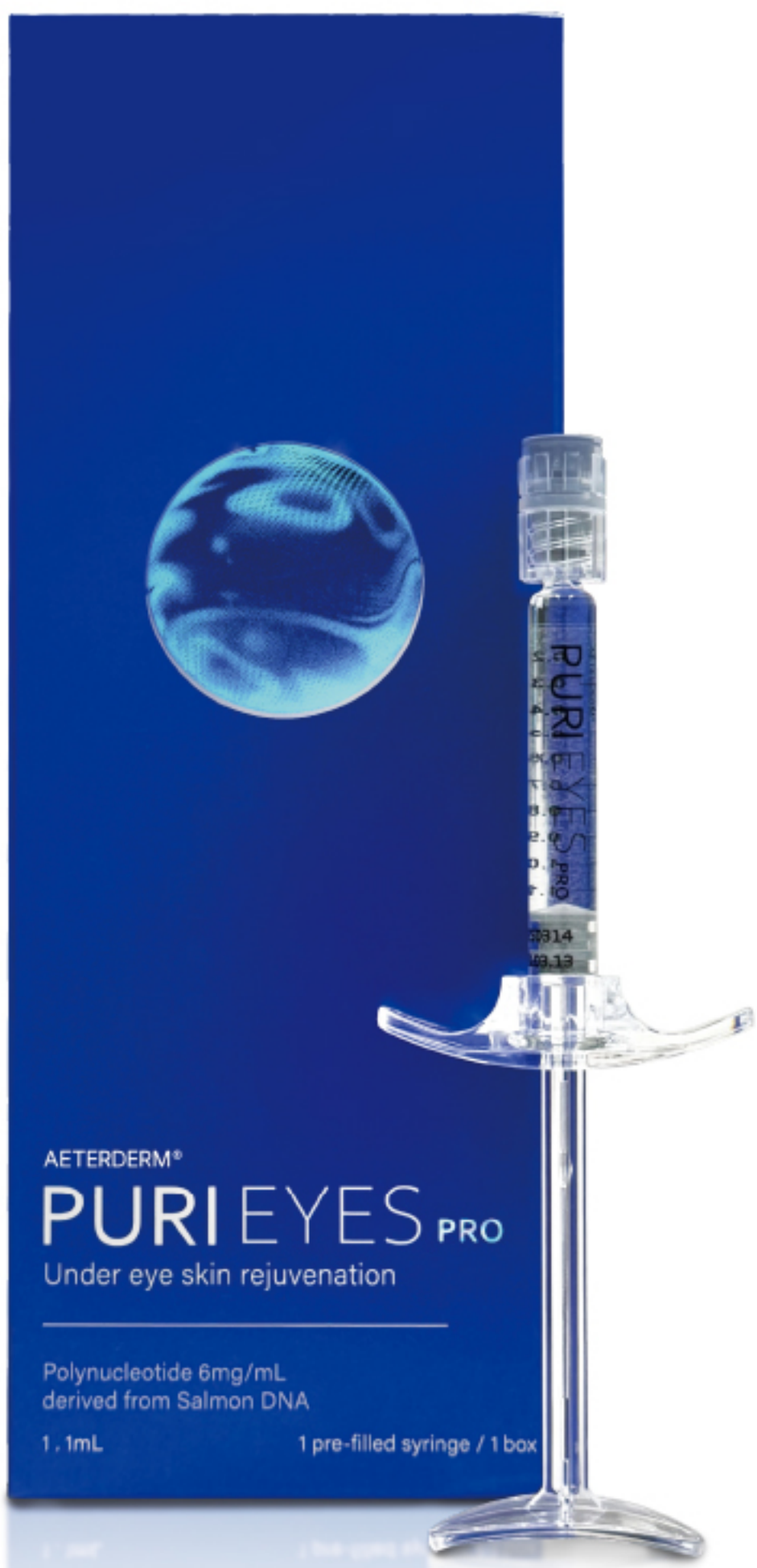

AETERDERM®
PURI EYES PRO
Polynucleotide **6mg**

- Trẻ hóa chuyên sâu với độ cứng được tăng cường
- Cải thiện rõ rệt hơn

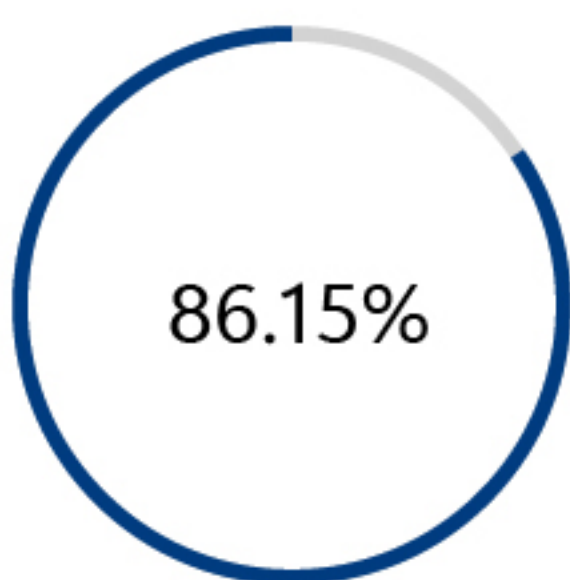


RECOVERY

Vết thương tế bào da đã khép lại hơn 86%

Giảm nhăn

Trẻ hóa da

Tông màu da và mật độ

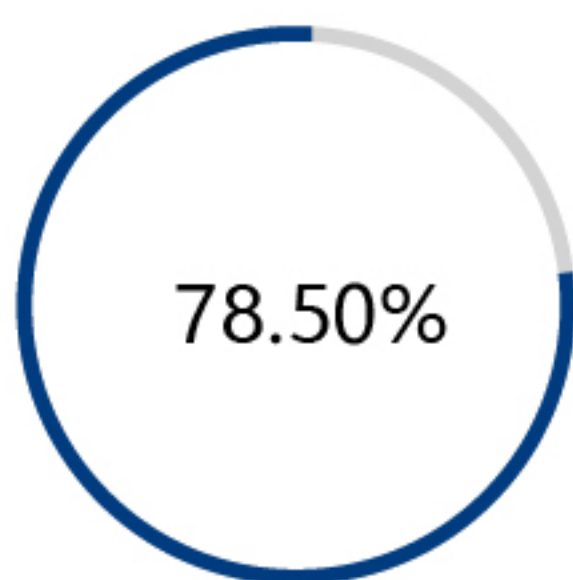

LIFTING

Hiệu ứng nâng cơ bằng cách cải thiện mật độ bằng cách tăng sinh tế bào da

Dưỡng ẩm cho da

Làm se khít lỗ chân lông

Cải thiện độ đàn hồi của da

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

for use with AETERDERM®PURI EYES



Đôi mắt của bạn thể hiện bạn nhiều nhất

Nhưng đôi mắt có làn da mỏng nhất trên khuôn mặt của bạn

Vì thế đôi mắt là nơi đầu tiên hình thành nếp nhăn

Tiếp thêm sức mạnh cho làn da dưới mắt của bạn


Hãy chăm sóc vùng da dưới mắt của bạn

PURI EYES PDRN PATCH


Hiệu ứng
Làm dịu làn da bị kích ứng
Sau khi trị liệu bằng PURI EYES



Phân tử thực vật tự nhiên

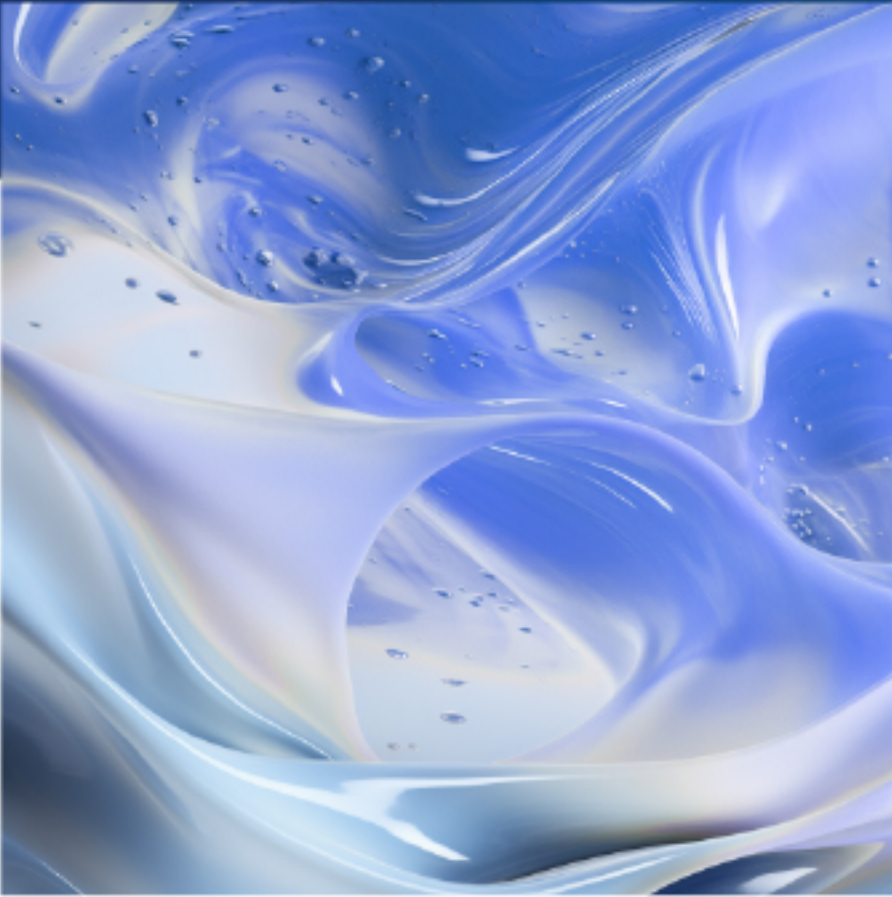

Giấy chứng nhận nhân bản của bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm

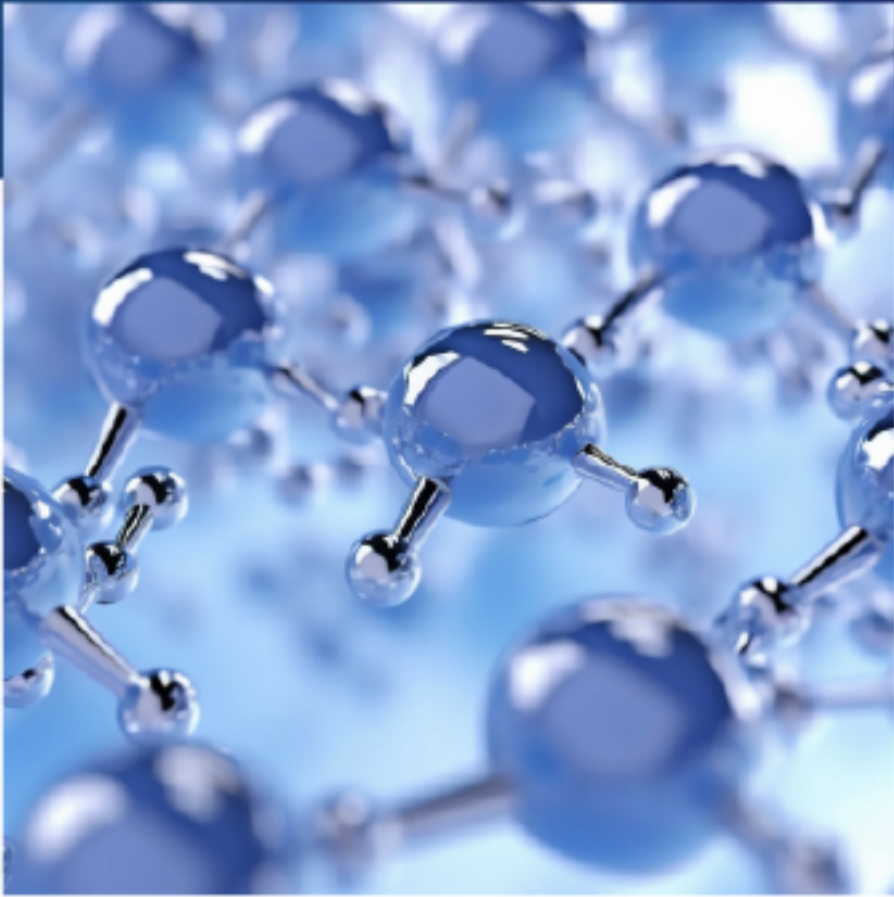

Các hạt gel phản ứng với nhiệt độ

Thành phần theo toa chuyên dùng để chăm sóc sau điều trị PURI EYES



PDRN
Thành phần tái tạo mô có đặc tính vật lý tương tự PURI EYES PN



HA
Cấp ẩm cho da



Cung cấp collagen
Cải thiện độ đàn hồi



Cân bằng và cấp ẩm cho da
Moisturizing & Soothing



San hô thủy phân
Cân bằng dầu và nước, dưỡng ẩm cho da



Niacinamide
Làm trắng da



Adenosine
Cải thiện nếp nhăn



Tocopheryl-Acetate
Chất chống oxy hóa

Tái cấu trúc tế bào,mô da


Tác dụng dưỡng ẩm và làm dịu da

Tác dụng cải thiện nếp nhăn và chống oxy hóa


Trước & Sau

Kiểm tra các tổn thương và di chuyển tế bào

AETERDERM®PURI EYES

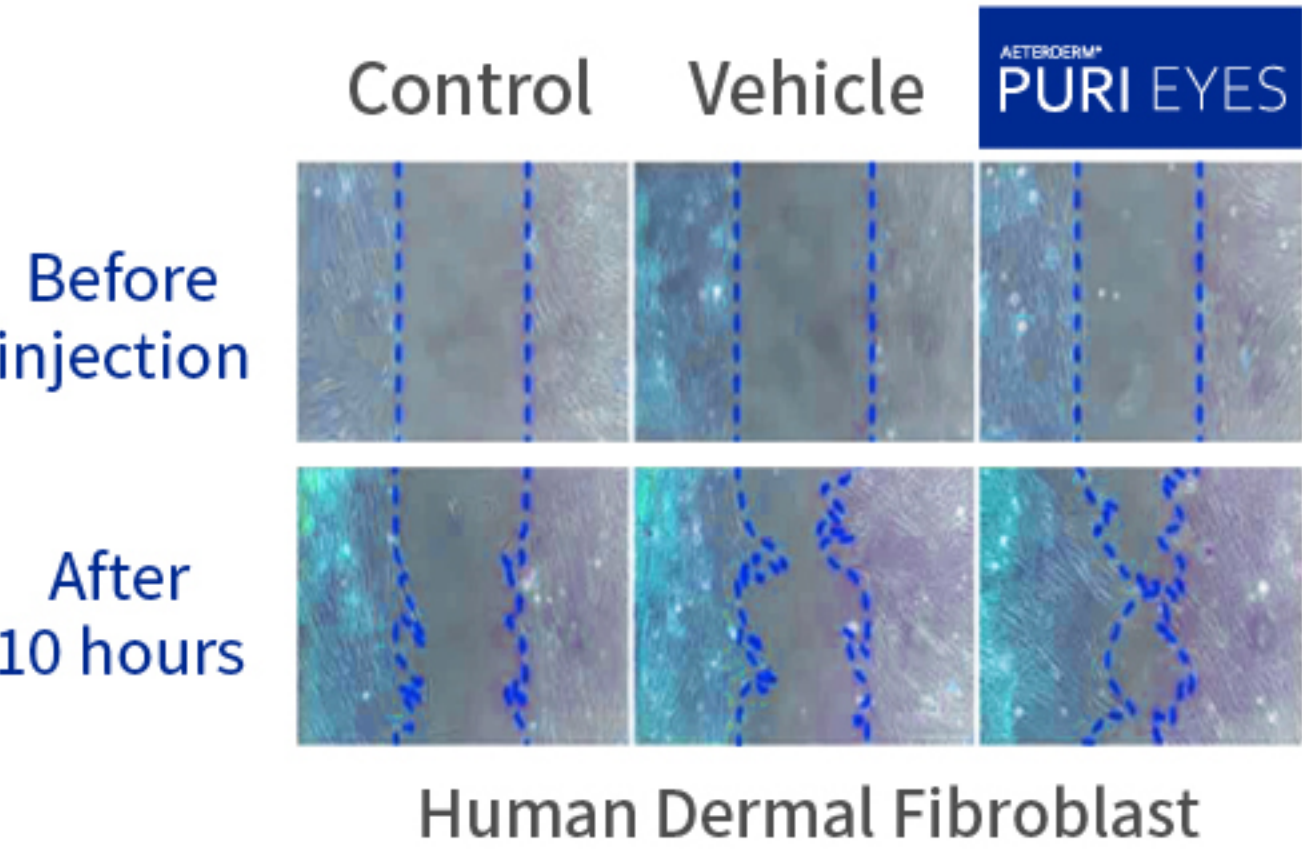


Sci Rep 2020;(10)

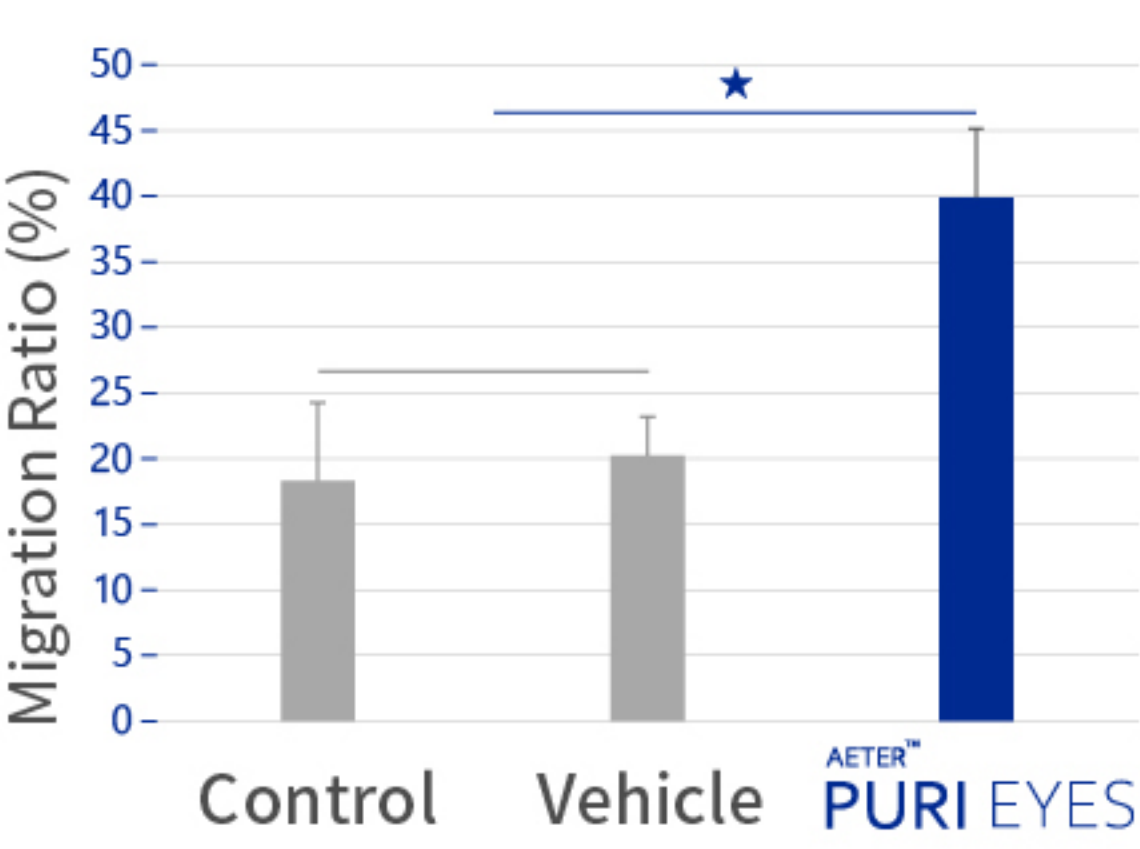


References) Sci Rep 2020;(10)

Cải Thiện Tế Bào Chết & Độ Ẩm

Cải thiện tế bào chết cho da (% , mean)

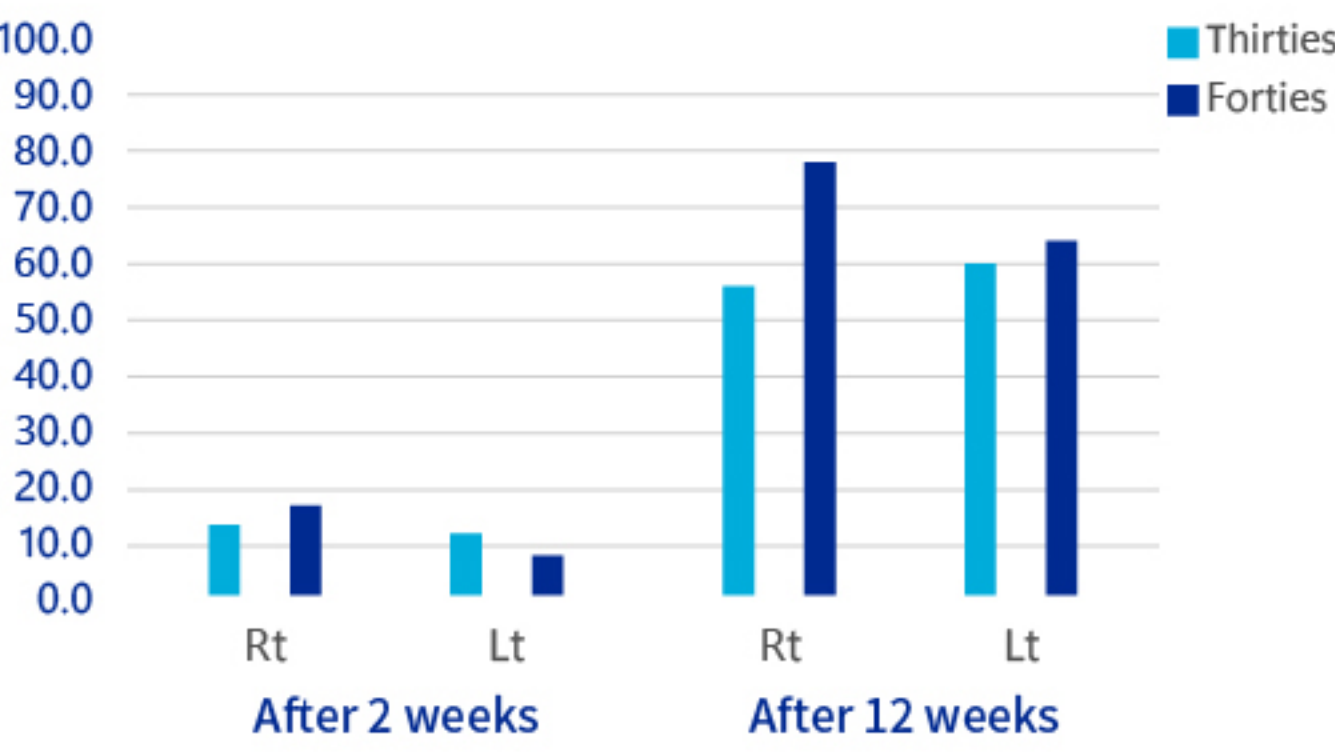

Cải thiện độ ẩm cho da (% , mean)

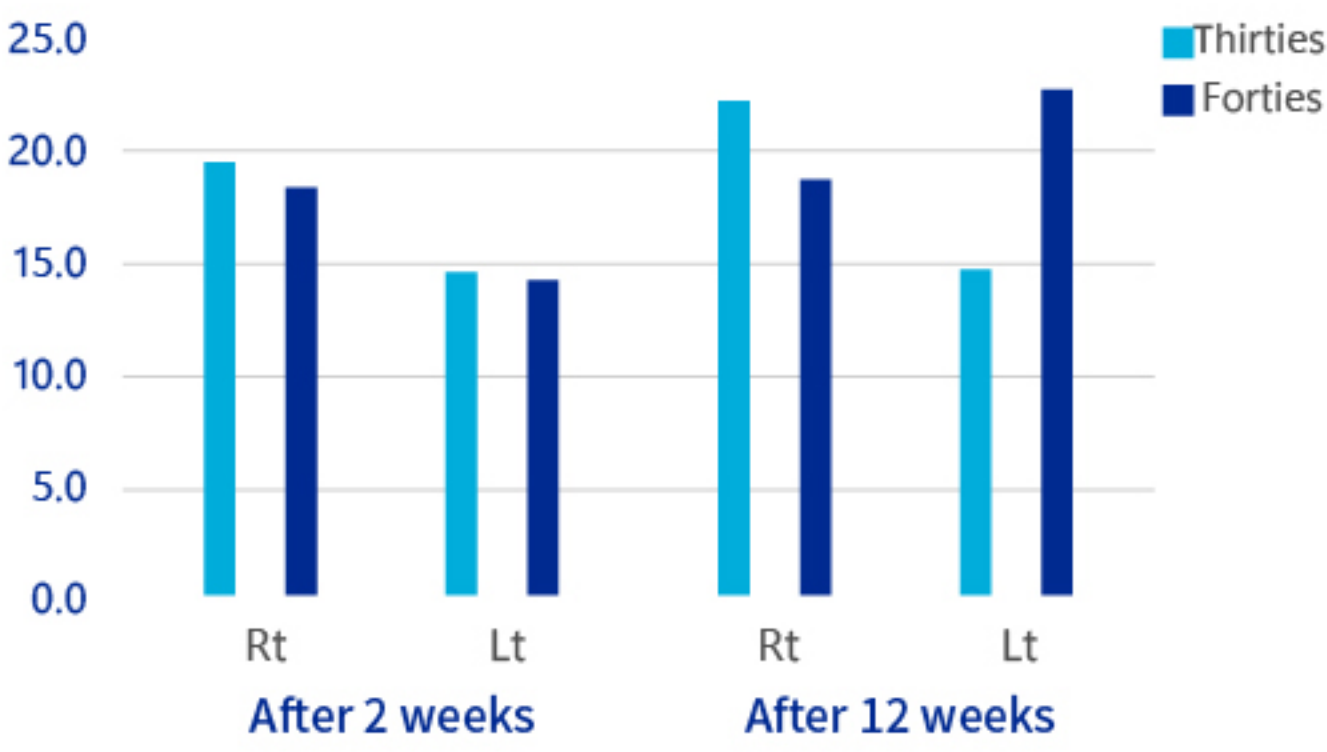

References) Dermatol Ther 2016;29:37-40

Làm sáng & cải thiện kết cấu

trước khi điều trị


12 tuần sau điều trị




References) Improvement of skin tone 12 weeks after injection photographed by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2016;29:37-40

Đốm Nâu Tàn nhang và Nám& Thể Tích Lỗ Chân Lông

Roughness

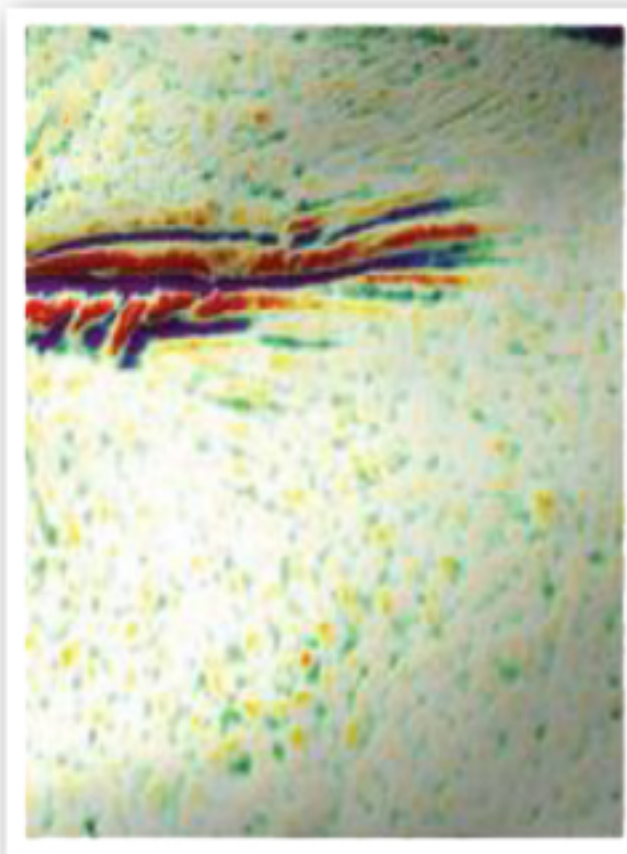

đường cơ sở

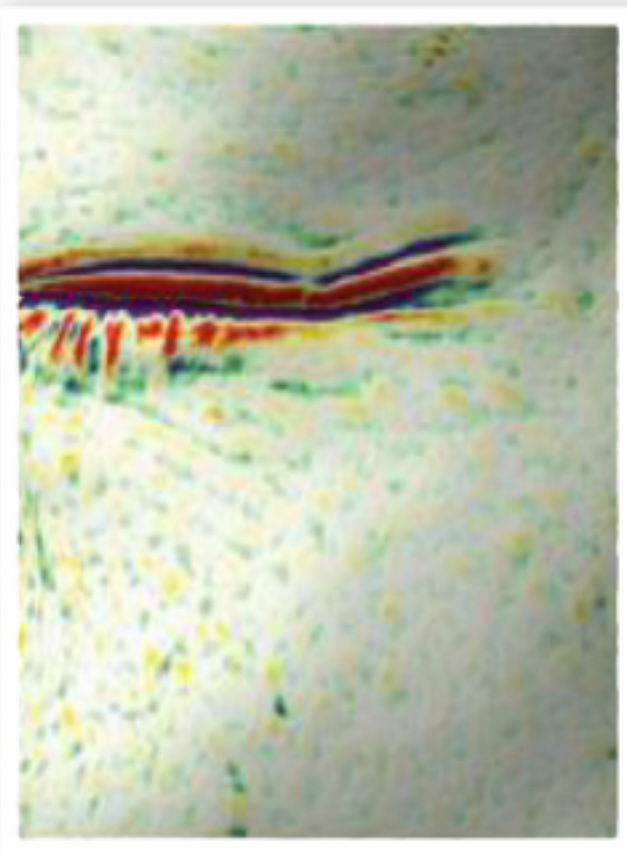


16 tuần sau

Pore Volume



đường cơ sở


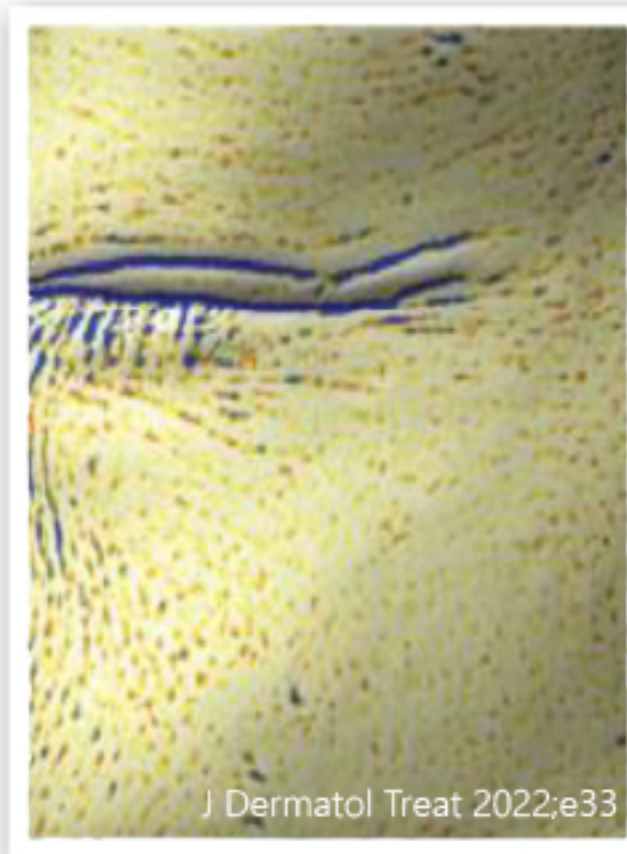


16 tuần sau

References) J Dermatol Treat 2022;e33

Tái Tạo Mô Tế Bào

Trước khi trị liệu

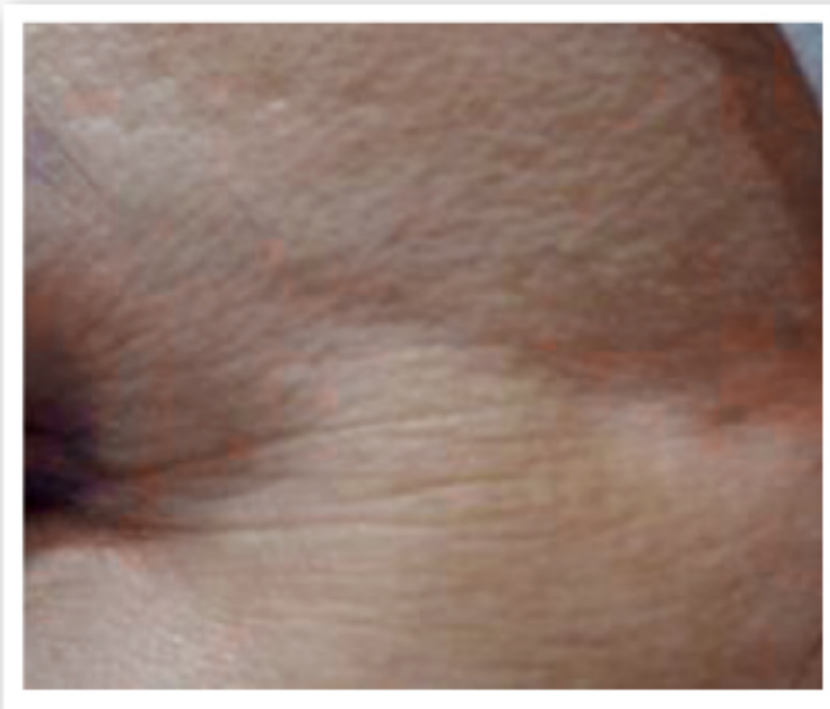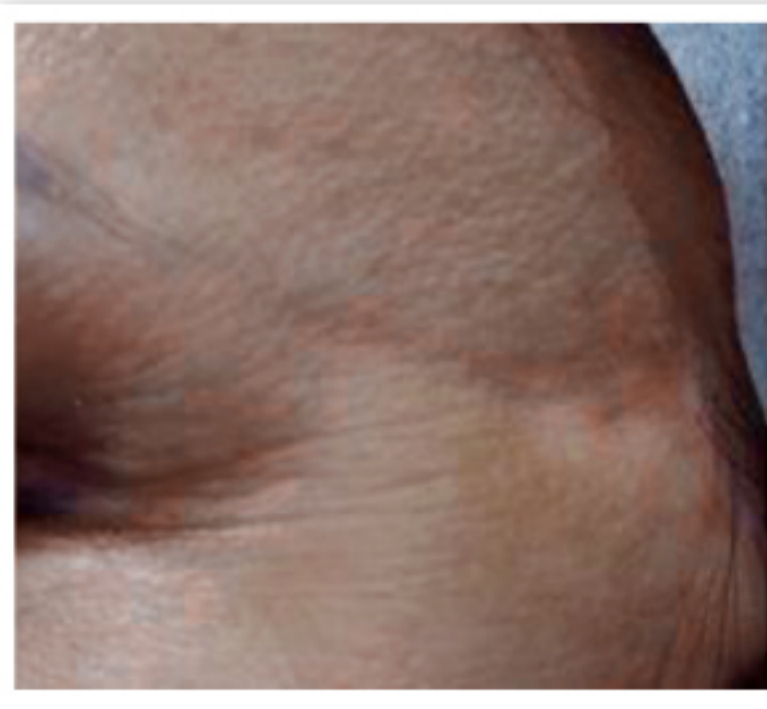


2 tháng sau lần điều trị lần thứ 6




2023:29(8): e13439.

Tái tạo sẹo rỗ

Trước khi điều trị

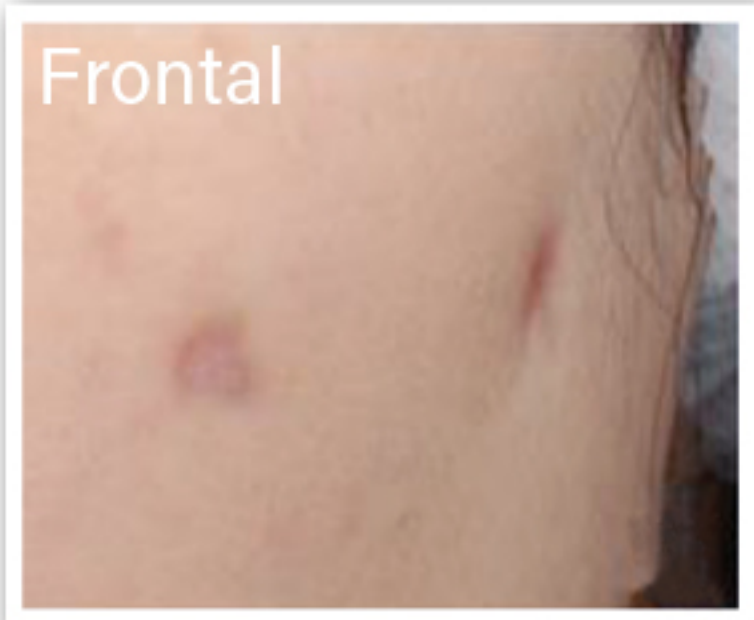

Sau 4 lần điều trị và quan sát trong 2 tháng sau đó

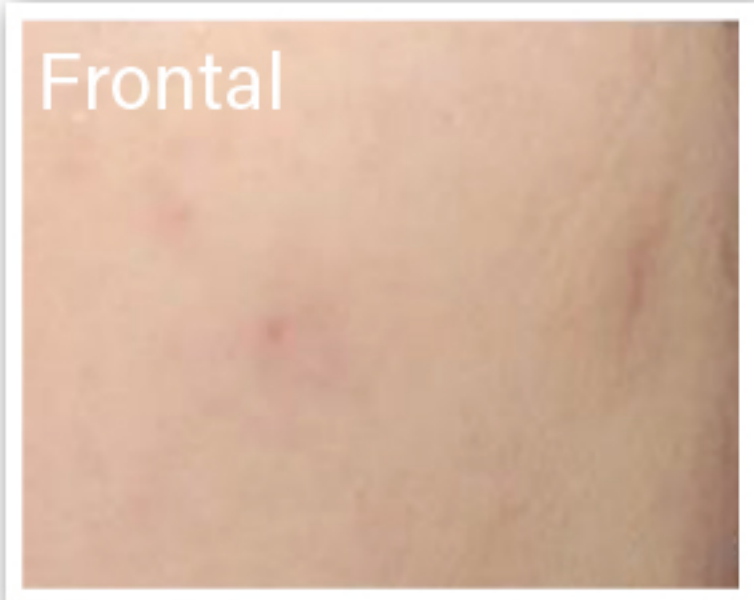

References) Skin Res Technol 2023:29(8): e13439.

AETERDERM®

PURI EYES



Hướng dẫn sử dụng

STEP 1. AETERDERM®PURI EYES

Quy trình xử lý



Kim khuyến khích

Kim Meso 32G ~34G

Góc chèn kim

∠10°~15° trong da

Injection Detai

0,02 ~ 0,035cc mỗi một
điểm tạo ra khoảng cách
dập nổi nhỏ khoảng 6 ~ 8 mm
15 ~ 30 điểm cho một vùng mắt

1. Rửa mặt thật kỹ cho bệnh nhân.
2. Trước tiên hãy thoa kem tê lên vùng điều trị.
3. Khử trùng vùng điều trị bằng gạc tẩm cồn.
4. Để bệnh nhân mở mắt, thư giãn và cố gắng không nheo mắt.
5. Đặt vật liệu xung quanh vùng điều trị một cách tinh tế và nhẹ nhàng có thể để giảm nguy cơ bầm tím và sưng tấy.
6. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp vùng điều trị và yêu cầu bệnh nhân xoa bóp nhẹ nhàng vùng.
7. Bạn có thể sử dụng tất cả các kỹ thuật tiêm thẩm mỹ ở lớp dưới da nông.



AETERDERM®
PURI EYES PRO
AETERDERM®
PURI EYES PDRN PATCH

Các lựa chọn điều trị kết hợp

I Kỹ thuật thủ công ————— Dành cho kỹ thuật tiêm nâng cao

PURI EYES giúp đưa chính xác các hoạt chất vào vùng điều trị nhằm hỗ trợ cải thiện làn da tức thì với thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu.

- Kỹ thuật vi điểm (Nappage)

I Đưa hoạt chất bằng thiết bị hỗ trợ ————— Đảm bảo độ sâu chính xác và thể tích đồng đều

Khả năng tác động chính xác vào vùng điều trị giúp đảm bảo tính nhất quán của quy trình và mang lại kết quả có thể tái lập.

- Meso Gun / Injector Gun
- MTS (Microneedling)

I Chăm sóc và hỗ trợ sau điều trị ————— Các phương pháp kết hợp dành cho PURI EYES

Khi kết hợp với PURI EYES, các phương pháp này hỗ trợ tái tạo collagen và phục hồi sau điều trị, giúp nâng cao hiệu quả tổng thể.

- RF Needling & Laser Fractional (Secret RF, Potenza, CO₂ , v.v.)
- Thiết bị phục hồi không xâm lấn (Cryocell, LDM, LED, v.v.)

Chăm sóc sau điều trị

STEP 2. AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH

Hỗ trợ phục hồi



1. Sát khuẩn vùng điều trị bằng cách lau nhẹ bằng gạc tẩm cồn.
2. Nhẹ nhàng đắp miếng patch đã được làm lạnh lên vùng điều trị.
3. Sau 20 phút, tháo patch và vỗ nhẹ để tinh chất còn lại được hấp thụ hoàn toàn.
4. Khuyến nghị sử dụng **AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH** 2–3 ngày sau điều trị.

AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH phản ứng với nhiệt độ da để hỗ trợ đưa hoạt chất thẩm thấu sâu hơn và tăng cường hiệu quả phục hồi sau điều trị.



Kết quả sau điều trị

PURI EYES

Kết cấu da mịn màng hơn
Làn da sáng hơn
Cân bằng dầu tốt hơn

Tăng độ đàn hồi cho da
Cải thiện nếp nhăn
Thu nhỏ lỗ chân lông

Cải thiện tình trạng da tổng thể
Da trông khỏe mạnh hơn rõ rệt
Da trông sáng hơn và săn chắc hơn

Buổi đầu tiên
Thường kéo dài 4 tuần

Buổi thứ hai
sau 2-4 tuần
Thường kéo dài 3 tháng

Buổi thứ ba
Sau 1 tháng
Thường kéo dài 6 tháng

PURI EYES PATCH

Thành phần PDRN nhanh chóng
làm lành vết thương và bổ sung
HA, Collagen cho da giúp làm
dịu nóng da.

Giảm tình trạng khô da
trong ngày điều trị

Củng cố hàng rào bảo vệ da bị
tổn thương và làm dịu làn
da nóng rát dai dẳng

PDRN nhanh chóng phục hồi mô da


Ngăn ngừa sự đổi màu
melanin ở da non, làm trắng và
dưỡng ẩm cho da



AETERDERM®



Tác dụng phụ của việc tiêm

Các thủ thuật tiêm trực tiếp các thành phần hiệu quả vào da gây ra nhiều kích ứng da và tác dụng phụ.

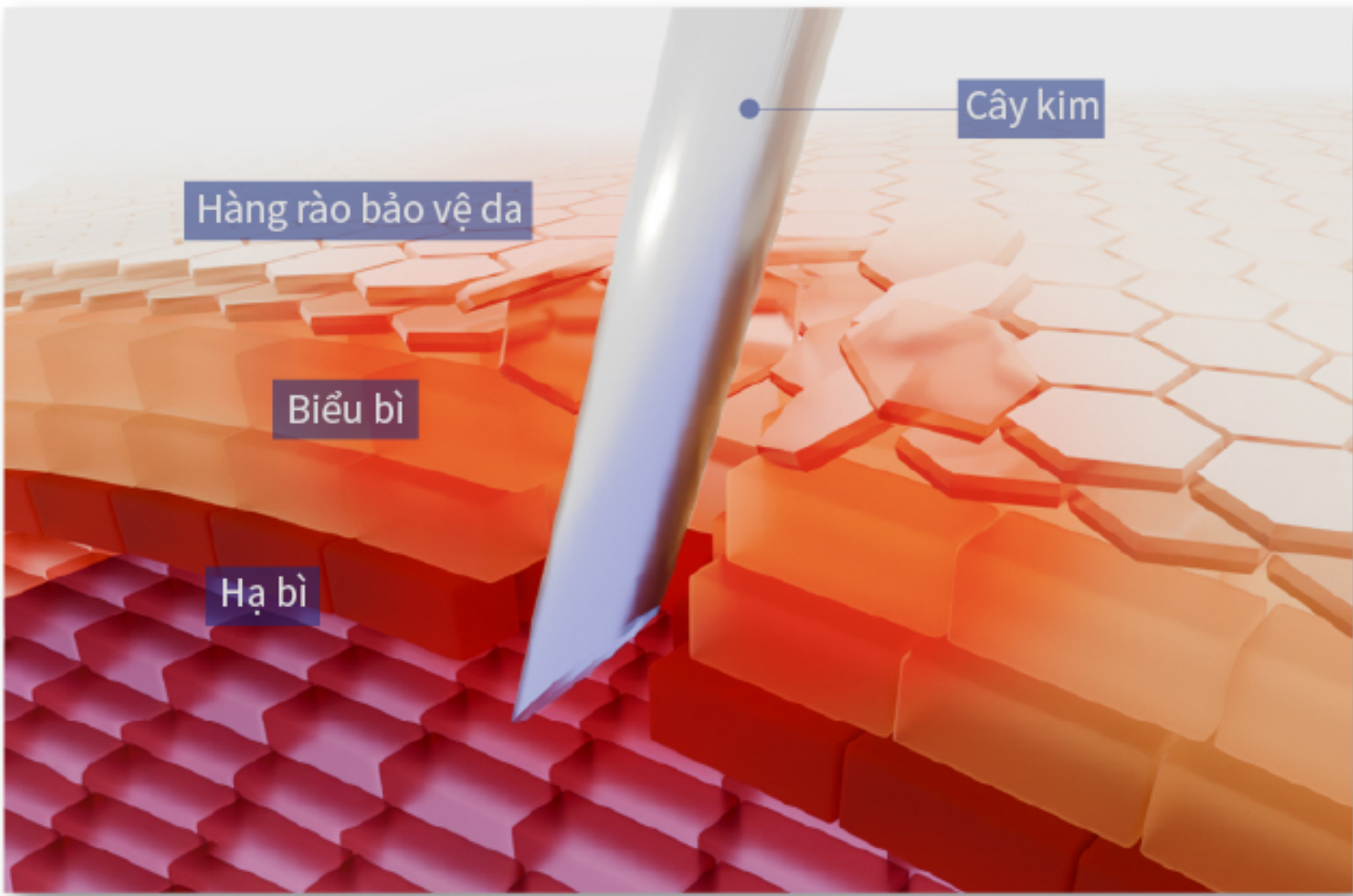

Kích ứng mạnh ở lớp biểu bì và hạ bì khi kim đâm vào da

Nóng lên do kích ứng
Sự bốc hơi ẩm và khô da do cảm giác nóng
Hàng rào da bị phá vỡ

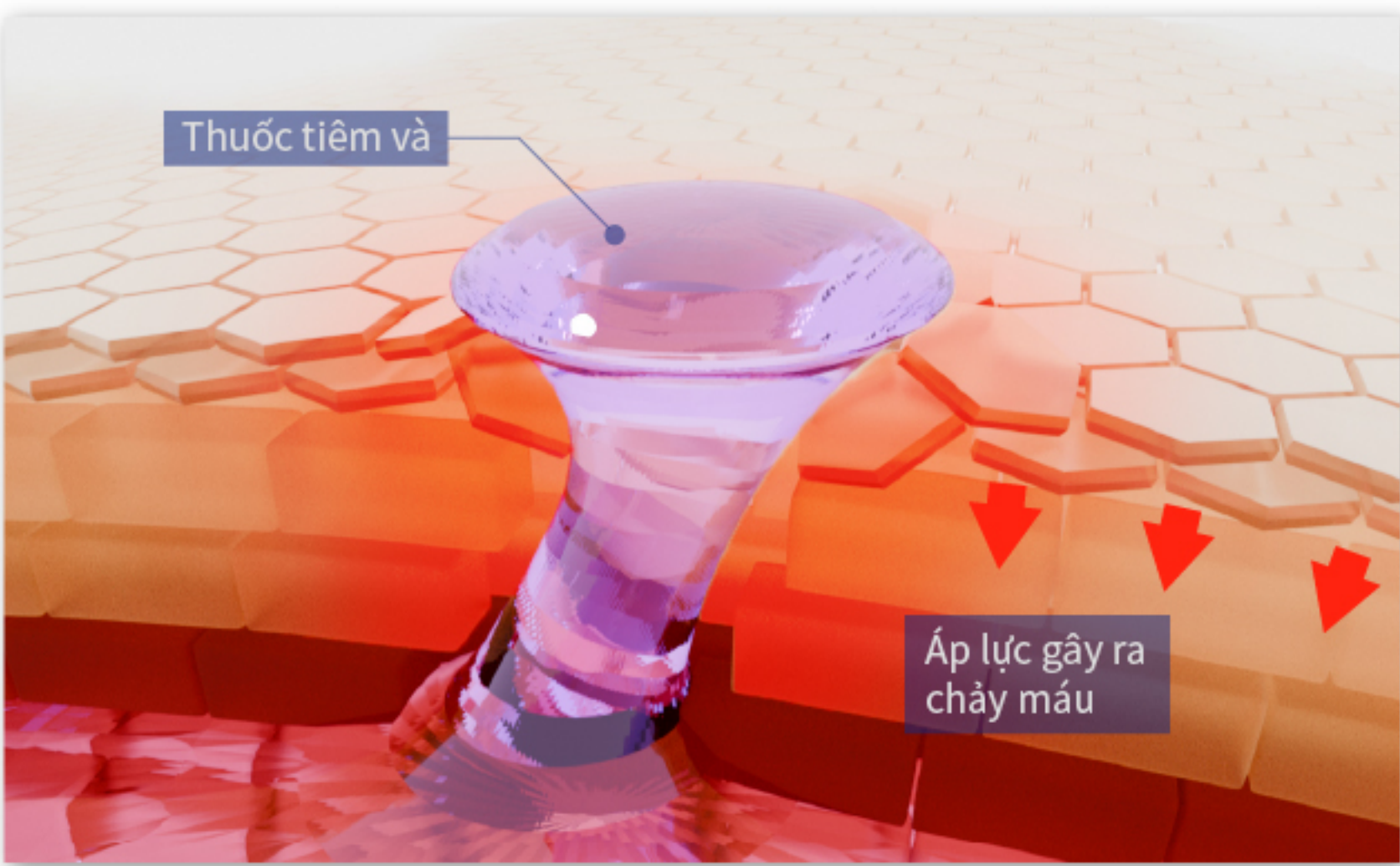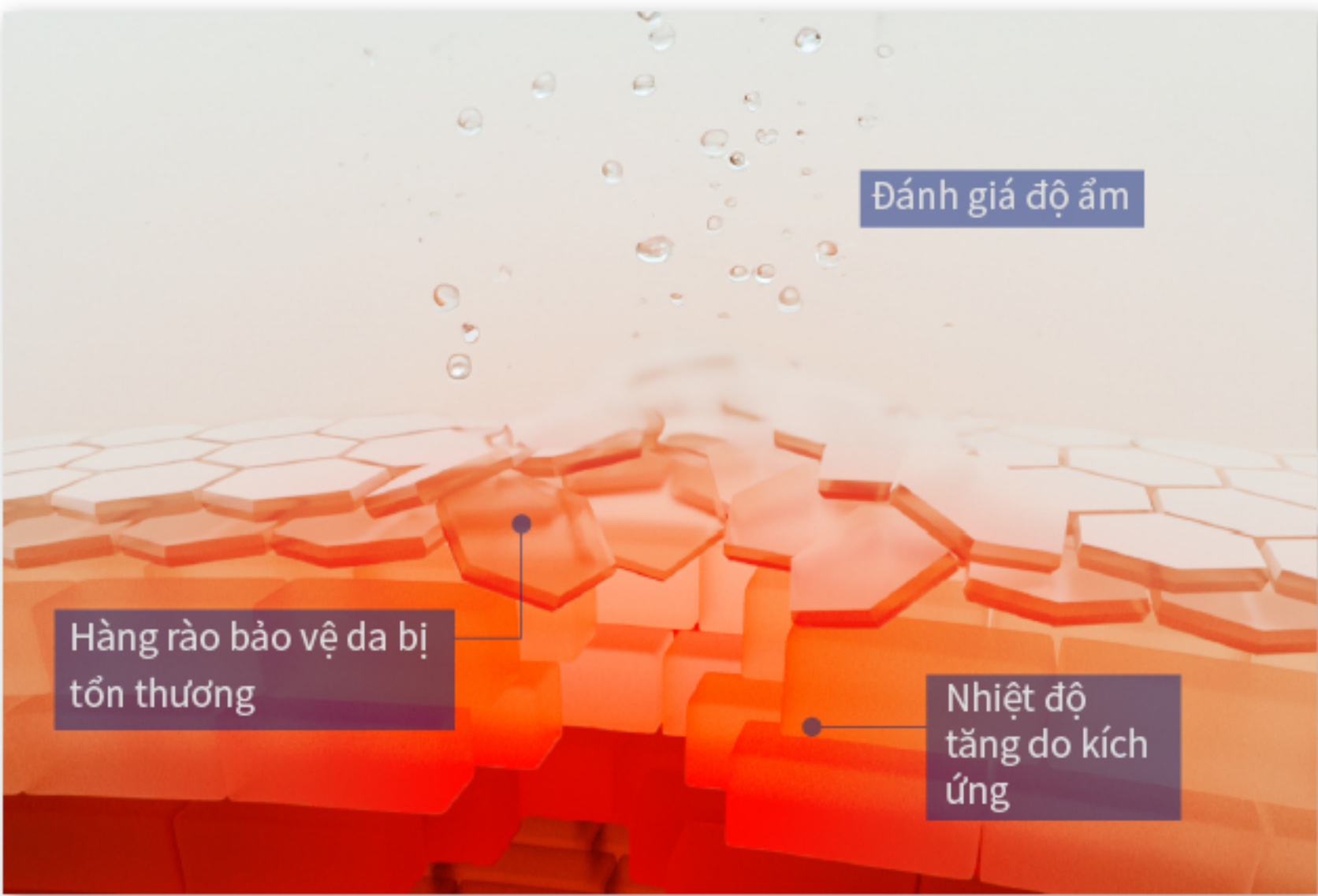


Rò rỉ thuốc cùng với máu do áp lực trong khi tiêm và lỗ tiêm hở

AETER PURI EYES PDRN PATCH


sản phẩm mặt nạ chăm sóc vùng da mỏng mắt sau điều trị được thiết kế để cải thiện các vấn đề mãn tính của bệnh rosacea ở da và nhanh chóng làm dịu làn da bị kích ứng.

Tác dụng của mặt nạ mắt


of PURI EYES & PURI EYES PDRN PATCH

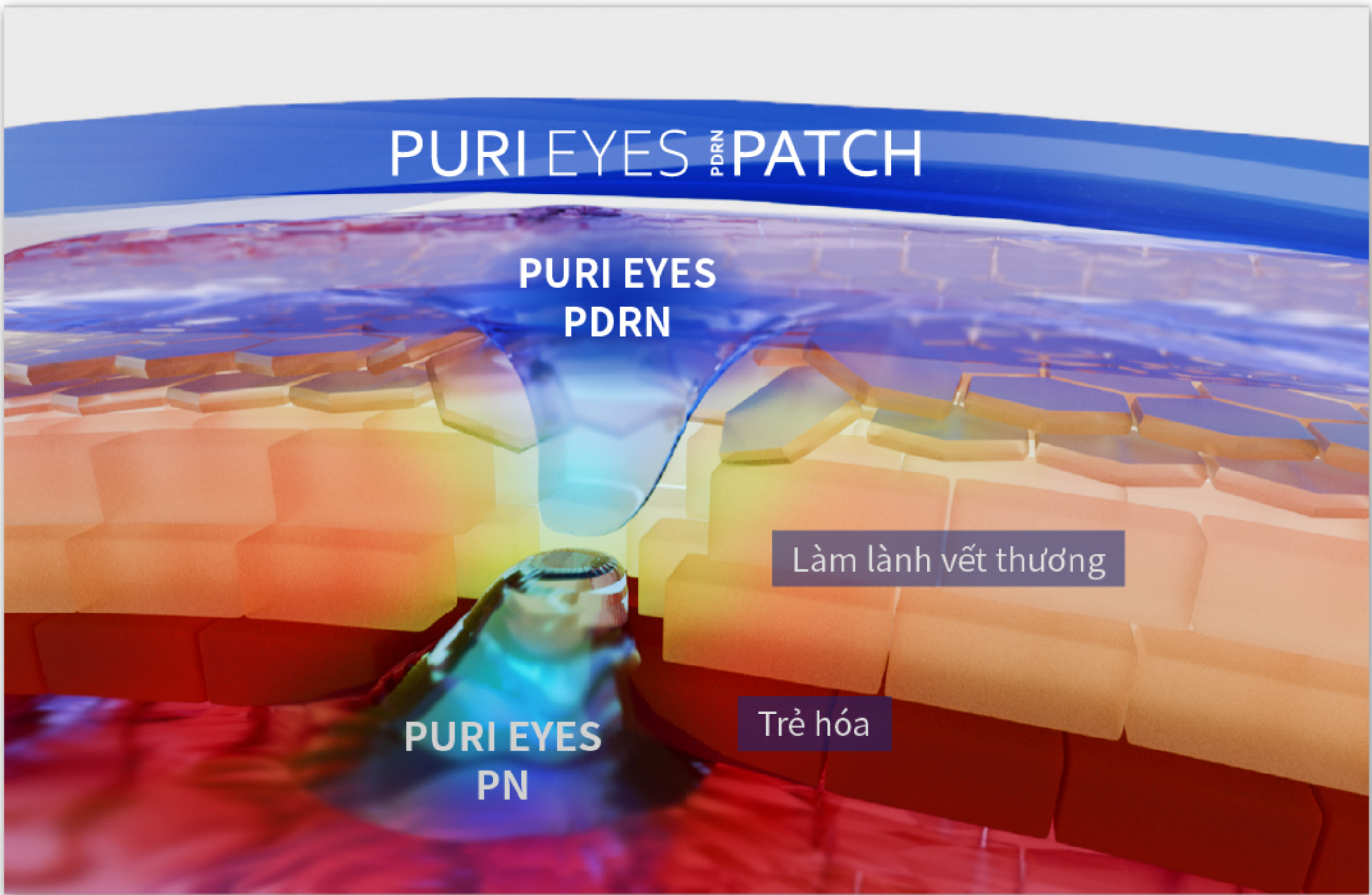


- Bằng cách áp dụng PDRN nồng độ cao, có đặc tính vật lý tương tự như PURI EYES PN, lên da, nó ngăn chặn sự chảy ra ngoài của thuốc trong da do thẩm thấu.
- PDRN và PN hoạt động trên cả lớp biểu bì và lớp hạ bì để sửa chữa vết thương và tái tạo mô bên trong và bên ngoài.

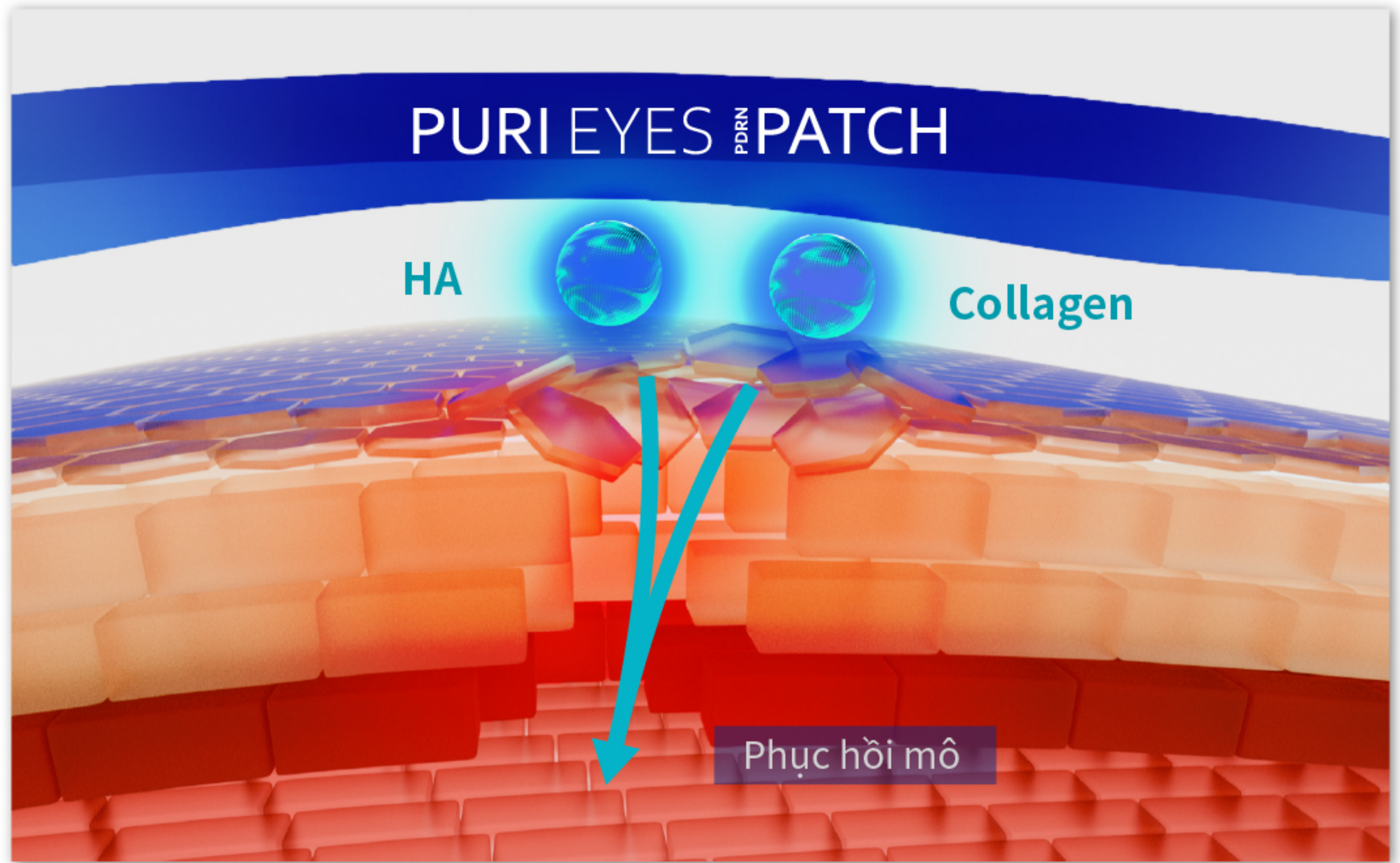


- HA và Collagen thủy phân, vật liệu sinh học để sửa chữa mô, có thể xâm nhập vào lớp hạ bì thông qua lỗ kim tiêm được tạo ra trong quá trình thực hiện.

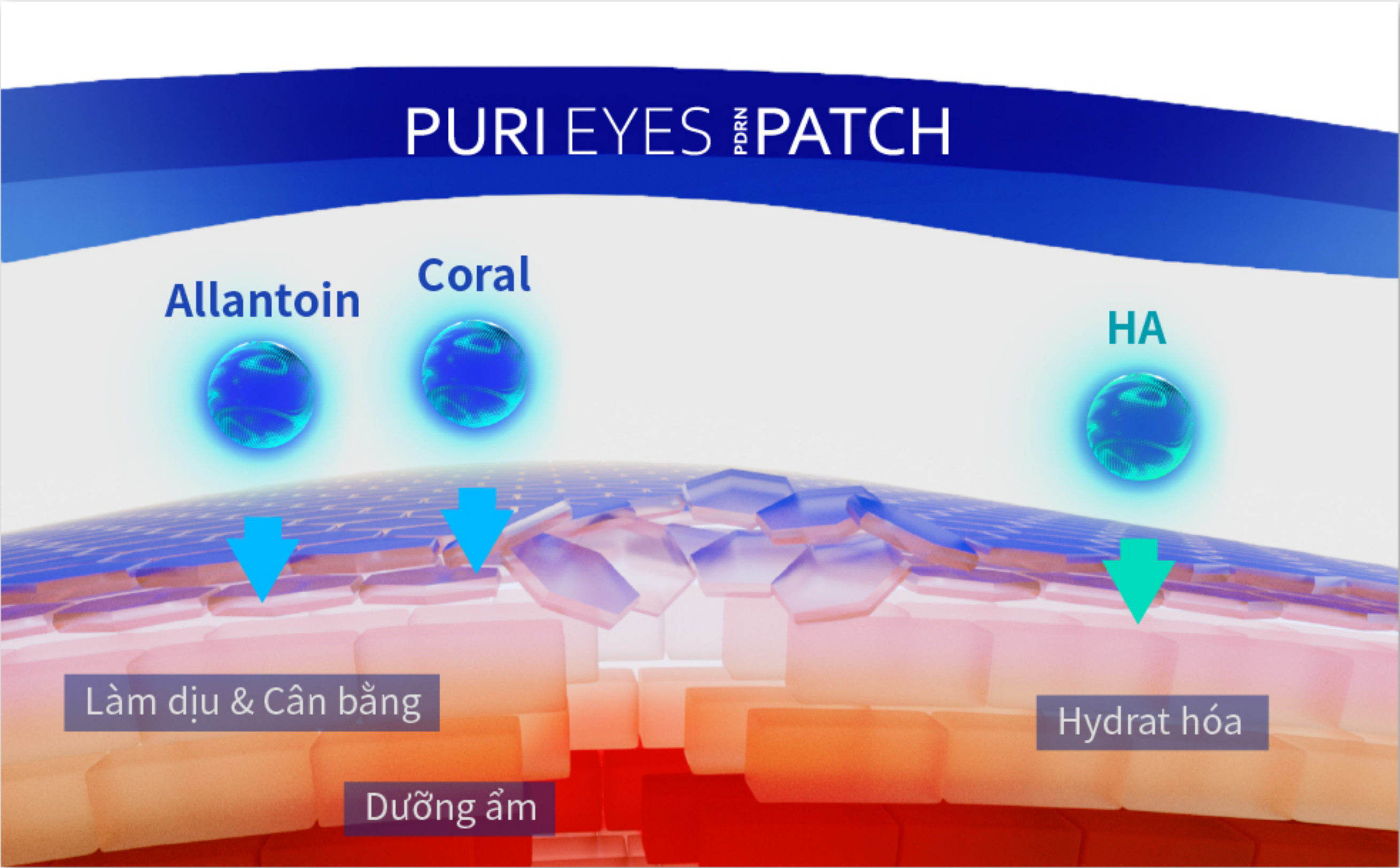

- Allantoin làm dịu da bị kích ứng, đồng thời thành phần san hô thủy phân và HA cung cấp đủ độ ẩm cho da khô do nhiệt.
- Để tối đa hóa hiệu quả làm dịu da, hãy chuẩn bị và bôi PURI EYES PDRN PATCH khi trời lạnh.

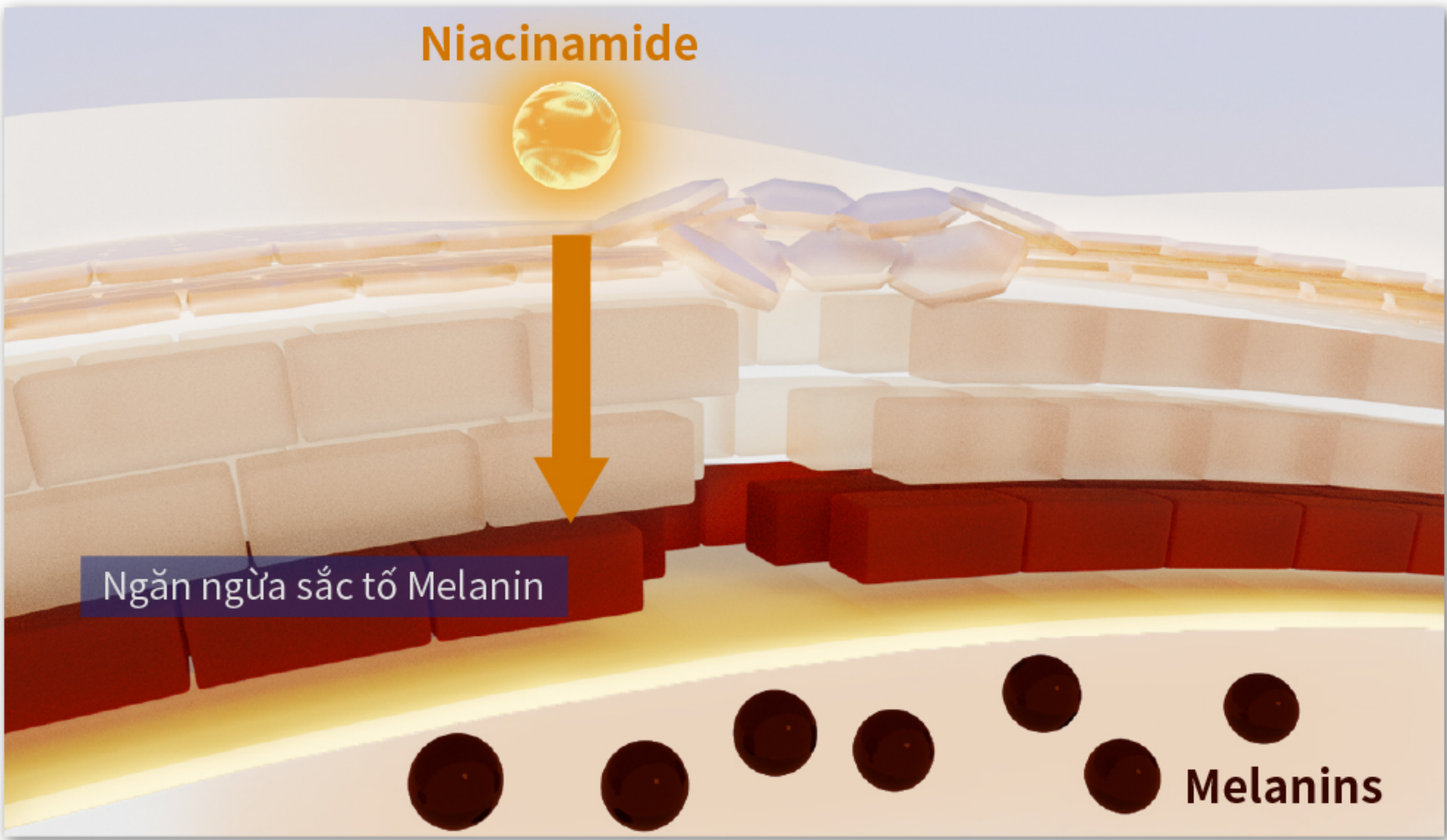

- Khi làn da bị kích ứng và suy yếu nhận được sự kích thích quá mức từ tia cực tím, nó sẽ sản sinh ra quá nhiều sắc tố melanin. Niacinamide ngăn chặn sắc tố melanin lắng đọng trong da, ngăn ngừa sẹo sắc tố.

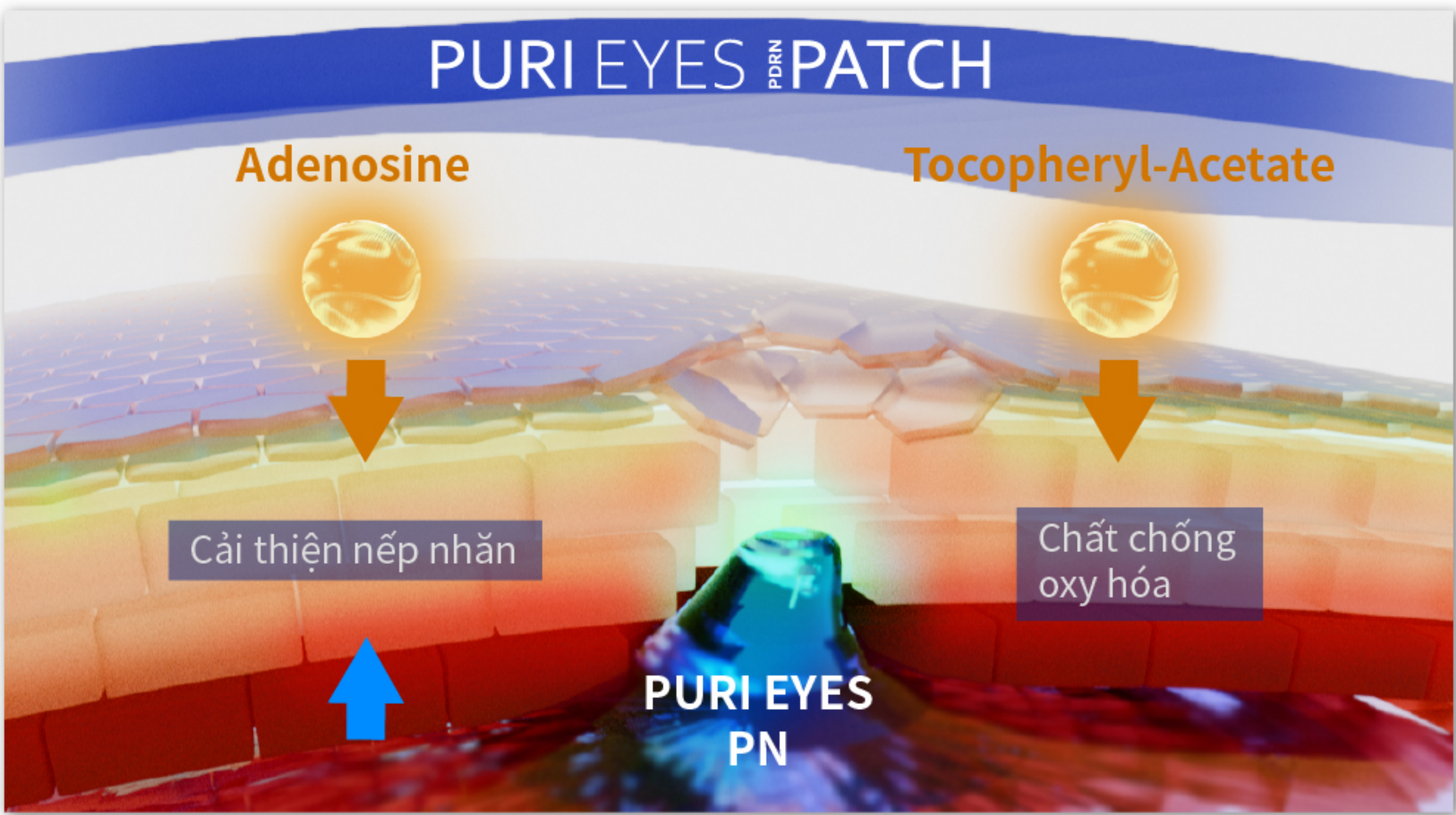

- Adenosine có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện nếp nhăn, và cùng với PURI EYES, nó cải thiện hiệu quả điều trị bằng cách cải thiện nếp nhăn trên da cả bên trong lẫn bên ngoài.
- Tocopheryl acetate là chất chống oxy hóa chuyên dụng, ngăn ngừa quá trình oxy hóa và lão hóa da tăng tốc do nhiệt.

Thắt chặt và tái cấu trúc da
Tăng cường tái sinh



CƠ CHẾ

Tác dụng dược lý kép của Polynucleotide

Sự Tiếp nhận thực thể A2A


AETERDERM®PURI EYES Polynucleotide của nó liên kết có chọn lọc với thực thể A2A Và gây ra sự chuyển tiếp kháng bazơ.



Nó cũng kích hoạt 3 yếu tố tăng trưởng để tái tạo mô bị tổn thương.




Nó gây ra sự hình thành mạch thông qua sự bài tiết yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) và cải thiện các mao mạch ở da giảm theo tuổi tác. Tăng mao mạch da có thể ngăn ngừa lão hóa và cải thiện sức khỏe của da bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết một cách trơn tru.

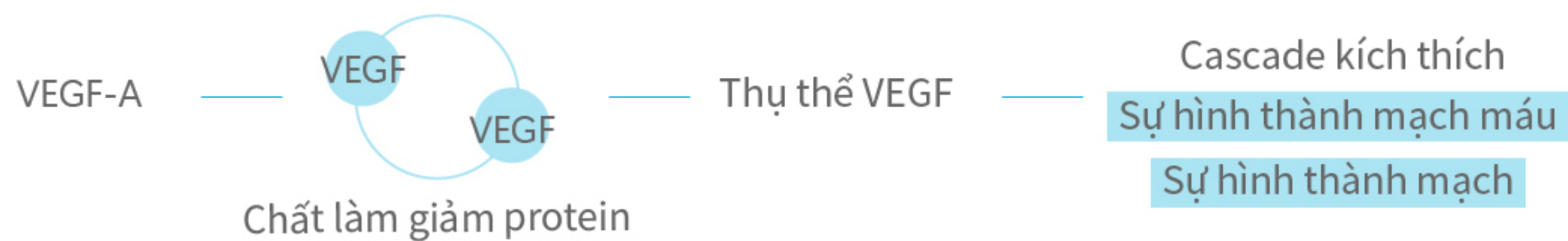


Tạo Ra Con Đường

Tạo con đường tổng hợp axit nucleic nhanh chóng với ít năng lượng hơn , tạo ra sự tái tạo tế bào.

Con đường De novo không có PN

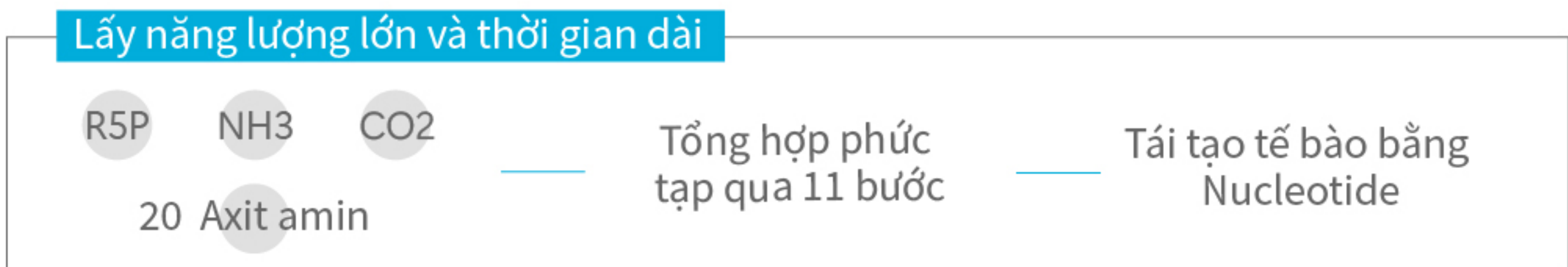

Con đường cứu nguy cùng PN

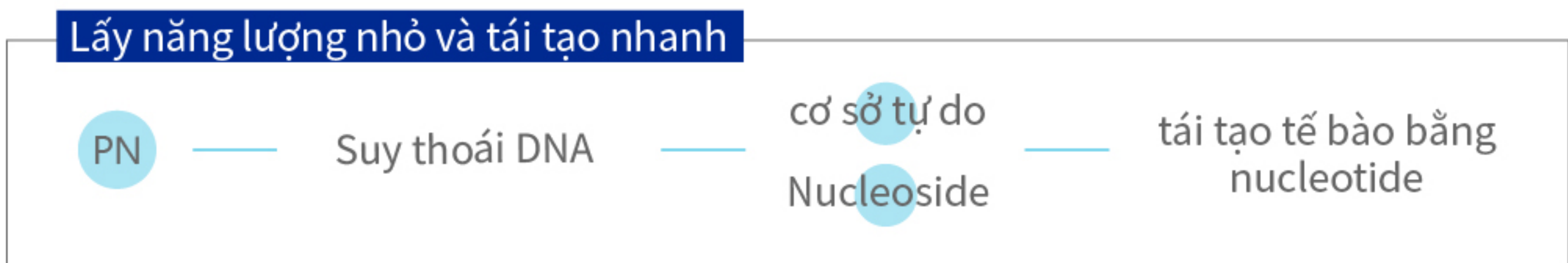

AETERDERM®

PURI EYES

Under eye skin rejuvenation

THÀNH PHẦN

Sodium Polynucleotide _____ 2mg/mL
Phosphate buffered saline _____ q . s

ĐÓNG GÓI

1.1 mL X 1 Syringe / Box

AETERDERM®

PURI EYES PRO

Under eye skin rejuvenation

THÀNH PHẦN

Sodium Polynucleotide _____ 6mg/mL
Phosphate buffered saline _____ q . s

ĐÓNG GÓI

1.1 mL X 1 Syringe / Box

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

Giảm lão hóa da

Miếng dán mắt cải thiện nếp nhăn dưới mắt

THÀNH PHẦN

Water(Aqua), Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Chondrus Crispus Powder, Benzyl Glycol, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum,PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Dipotassium glycyrrhizate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Adenosine, Raspberry Ketone, Ultramarines(CI 77007), Disodium EDTA, Synthetic Fluorphlogopite, Butylene Glycol, Calcium Lactate, 1,2-Hexanediol, Fragrance(Parfum), Titanium Dioxide(CI 77891),Hydrolyzed Collagen, Sodium Hyaluronate, Sodium DNA, Hydrolyzed Coral

ĐÓNG GÓI

90 g / 3.17 oz (60ea)