

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM





جمال

جمال فاخر بامتلاء مثالي


الميزات

لزوجة أقل مع مرونة أعلى!

يمكن سحب المنتج بسهولة من القارورة، حتى دون خلطه بالمحلول الملحي.



من دون فقدان للحجم أو تشوّه تشوّه بسبب المحلول الملحي، مع مرونة استثنائية.

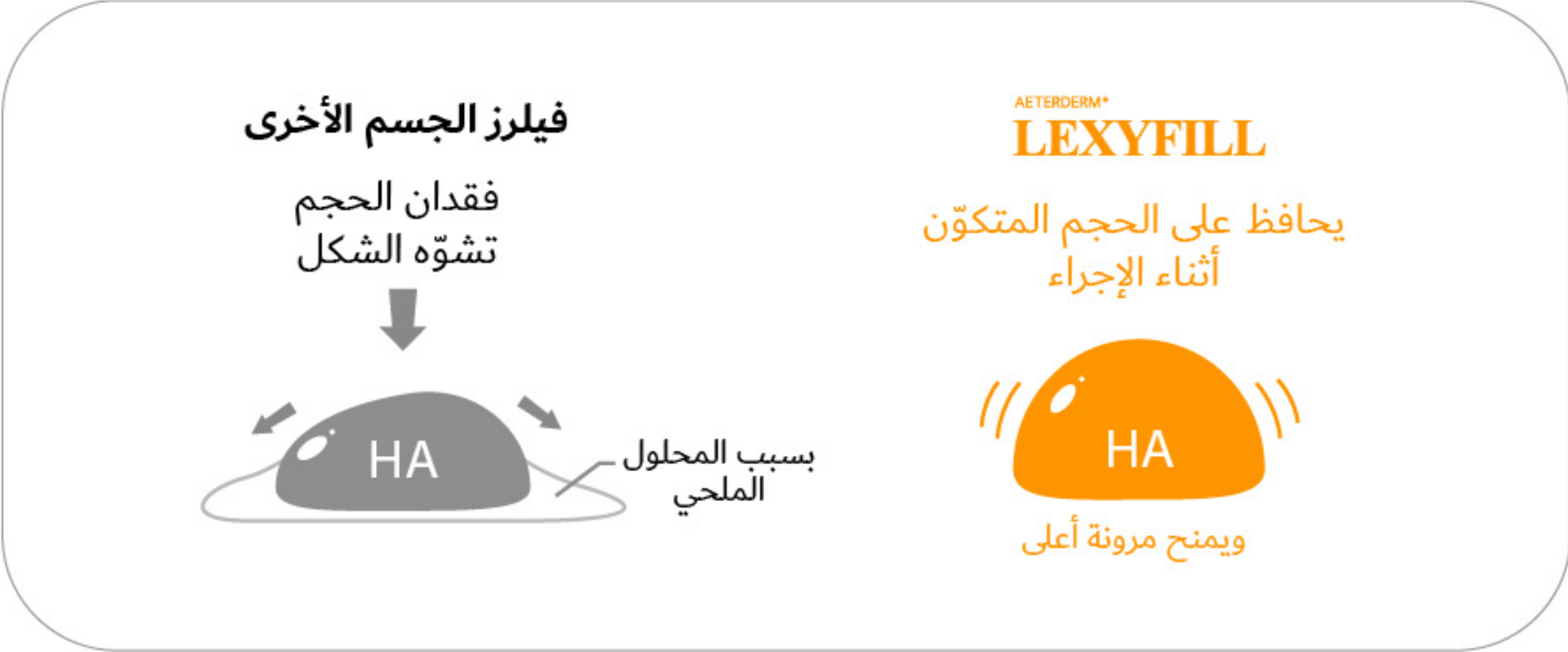

ونتيجةً لذلك، يمكن إجراء علاجات أكثر دقة وتقدّمًا. 📌


قمنا بتطوير فيلر للجسم بهذه المزايا
المميّزة من خلال عملية تشابك طويلة
عند درجة حرارة منخفضة،

مما يتيح نحت الجسم
بدقة عالية.



لماذا يُعد LEXYFILL الأكثر أمانًا؟ لماذا يتميز LEXYFILL بمرونة عالية؟

فيلرز الجسم الأخرى

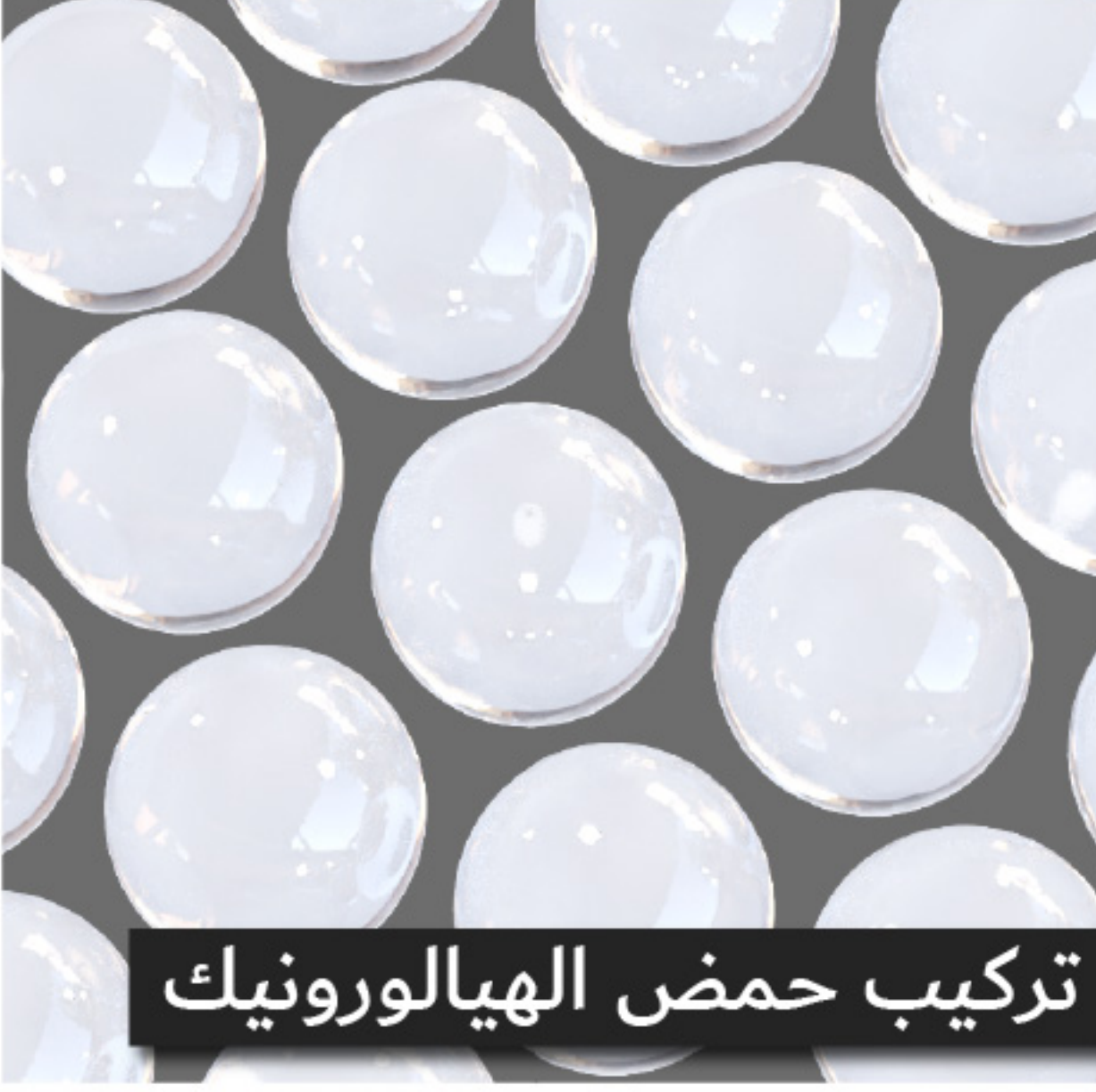

تركيب حمض الهيالورونيك


يُستخدم فقط جزيئات كبيرة من حمض الهيالورونيك



الربط باستخدام BDDE

تم استخدام كمية كبيرة من **BDDE**، ما قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة للفيلر.

كما أن هذه الفيلرز تكون شديدة الصلابة ويصعب سحبها من القارورة، لذلك يجب خلطها بالمحلول الملحي ورّجّها جيدًا لتجانسها.

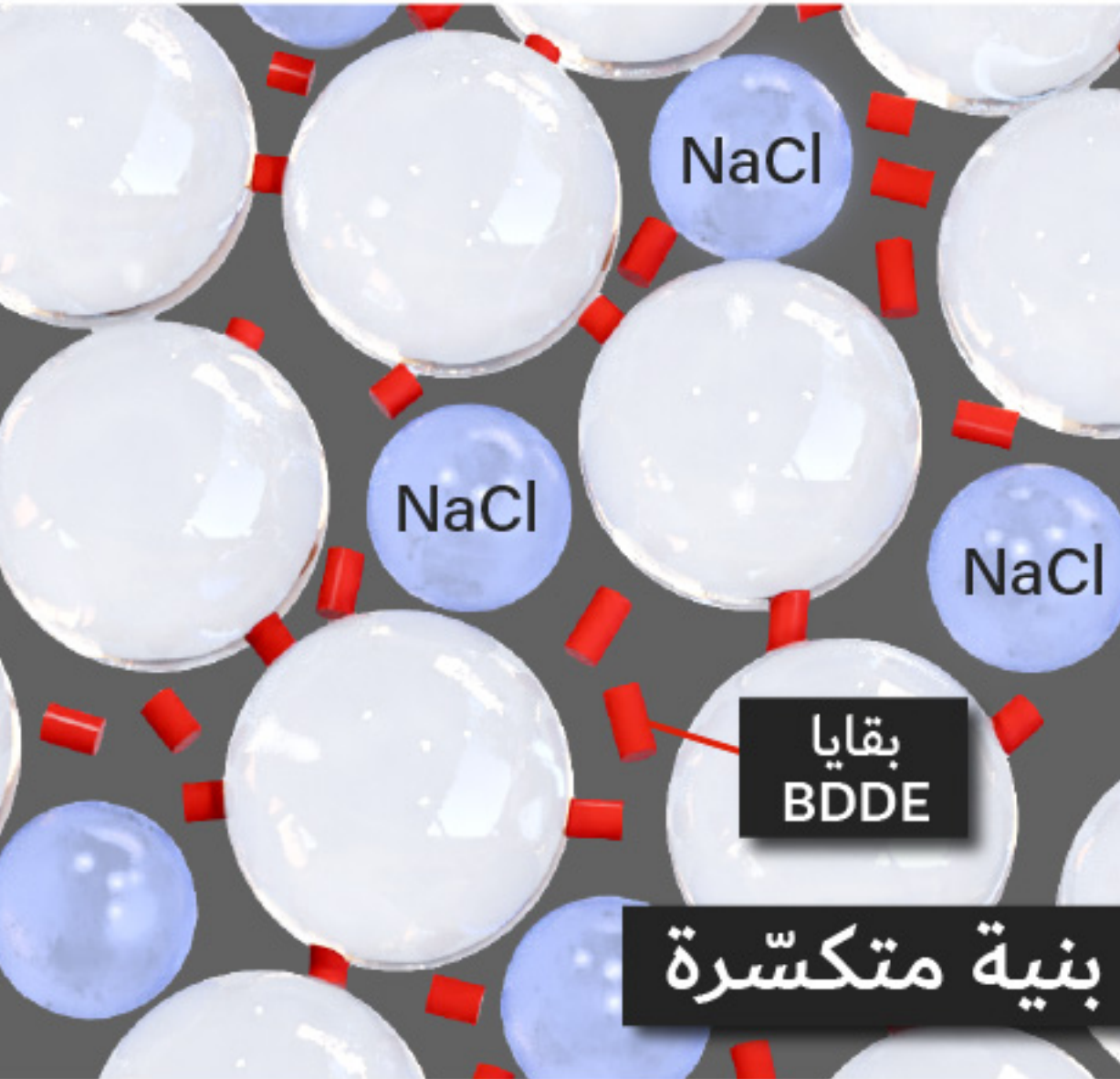

بنية متكسّرة


عند إضافة المحلول الملحي ورّجّه للخلط، فإن بنية الربط المتشابك لحمض الهيالورونيك ستتکسر بالكامل، مما يؤدي إلى زيادة بقايا BDDE وحدوث آثار جانبية خطيرة، وقد يسبب صدمة.

AETERDERM® LEXYFILL فيلر الجسم



تركيب حمض الهيالورونيك


تم وضع جزيئات صغيرة من حمض الهيالورونيك بين الجزيئات الكبيرة، لذلك يتمتع بمستوى أعلى من الترطيب والمرونة.

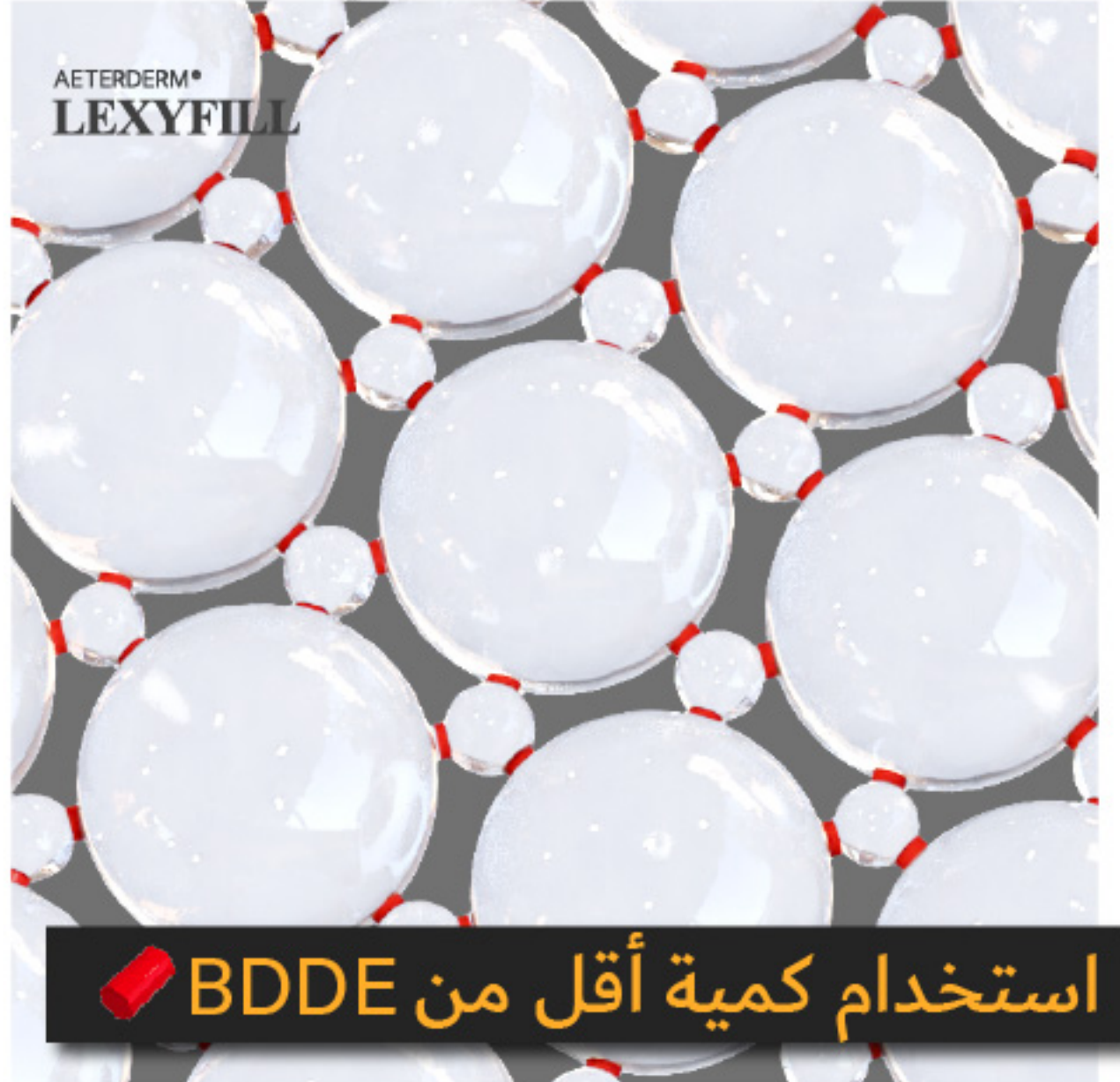

استخدام كمية أقل من BDDE

وبسبب هذه البنية لحمض الهيالورونيك، يمكن إجراء الربط المتشابك باستخدام كميات صغيرة جدًا من **BDDE**.

وبالتالي تنخفض احتمالية حدوث الآثار الجانبية بشكل ملحوظ.

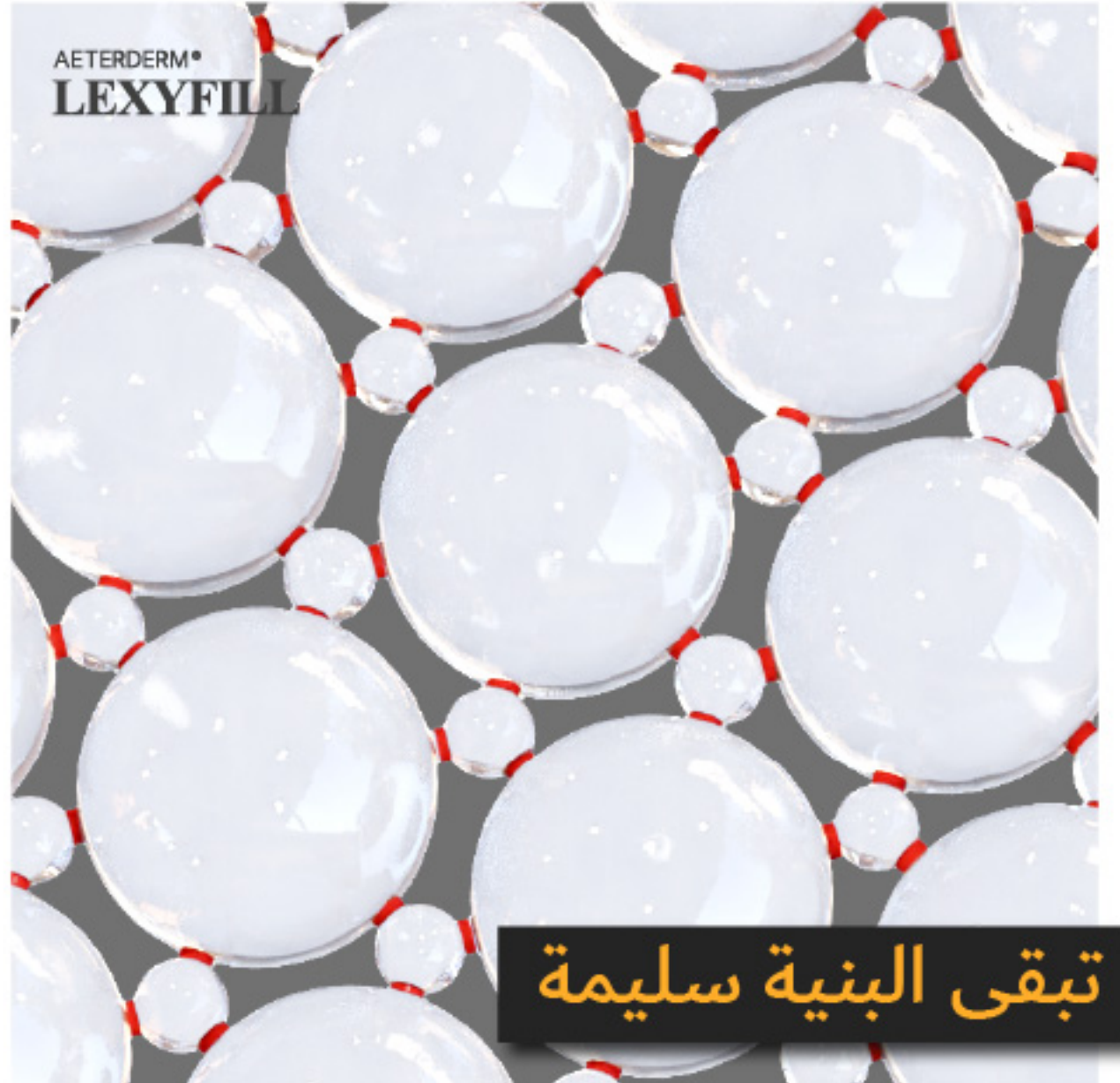

تبقى البنية سليمة

يمكن سحب LEXYFILL بسهولة باستخدام الحقنة دون خلطه بالمحلول الملحي، وبالتالي يمكن حقنه مع الحفاظ على بنية حمض الهيالورونيك سليمة.

المكوّنات الرئيسية

حمض الهيالورونيك

يتم تكرار عملية التنقية 14 مرة لإزالة ثلاثة أنواع من الشوائب، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث الآثار الجانبية.

تعزيز المرونة والثبات من خلال مزج جزيئات حمض الهيالورونيك الكبيرة والصغيرة

حمض هيالورونيك متشابك ثنائي الطور مناسب لإعطاء الحجم للجسم

بقايا BDDE
الذيفانات الداخلية
البروتينات

تركيز حمض الهيالورونيك	24 ملغ/مل
MOD (درجة التعديل، %mol)	3.85%
نوع الجِل	ثنائي الطور
معامل التخزين (G)	100 – 250 باسكال (Pa)
قوة الحقن (N) (30G UTW)	20 نيوتن (N)



الدراسات غير السريرية

اختبار اللزوجة والمرونة



الشكل الأولي بعد ساعة واحدة بعد 6 ساعات بعد 12 ساعة بعد 24 ساعة

(المراجع)
Sci Rep 2024;(5)





AETERDERM®

LEXYFILL



الدراسات السريرية

عملية تكبير الثدي

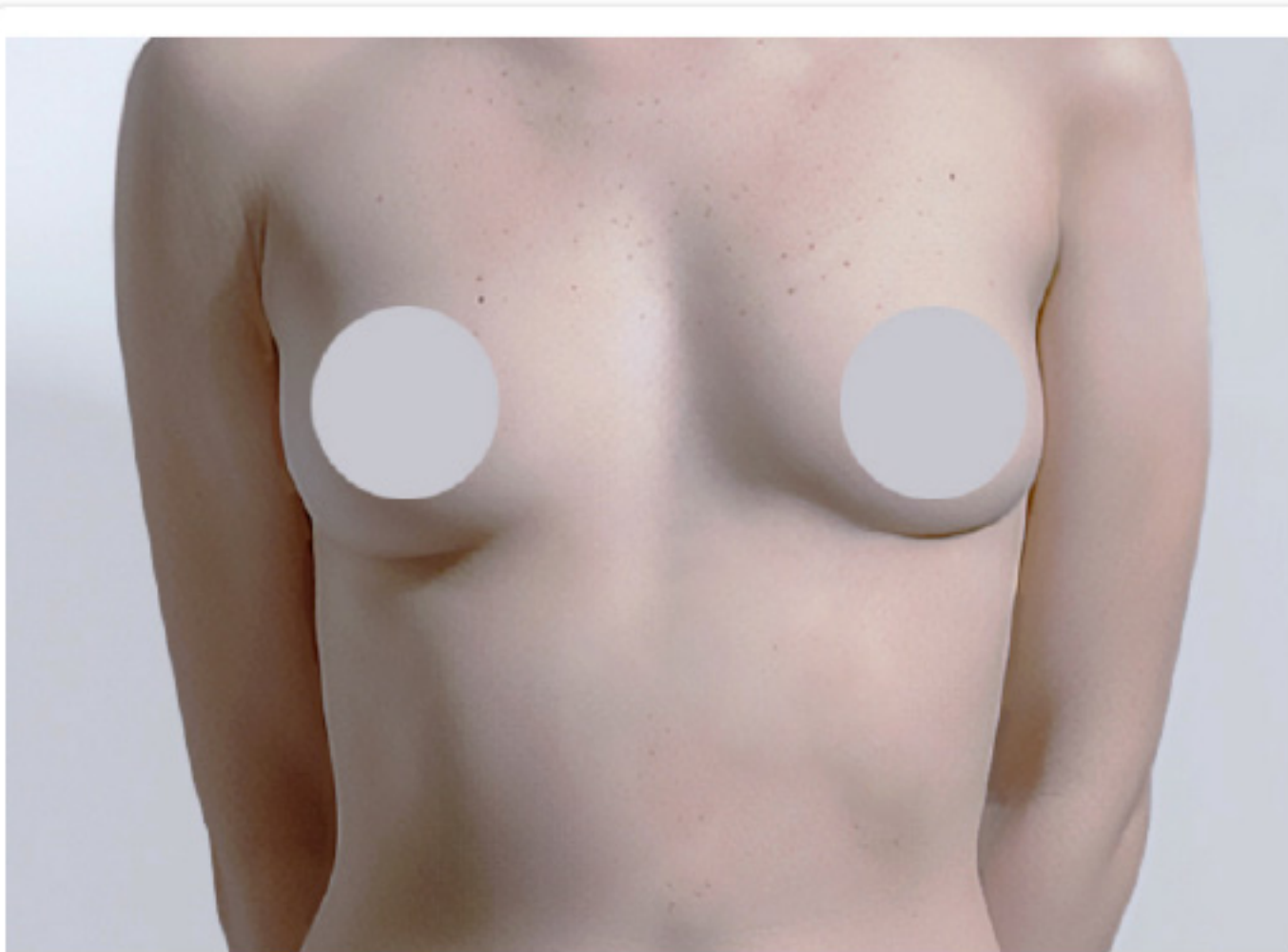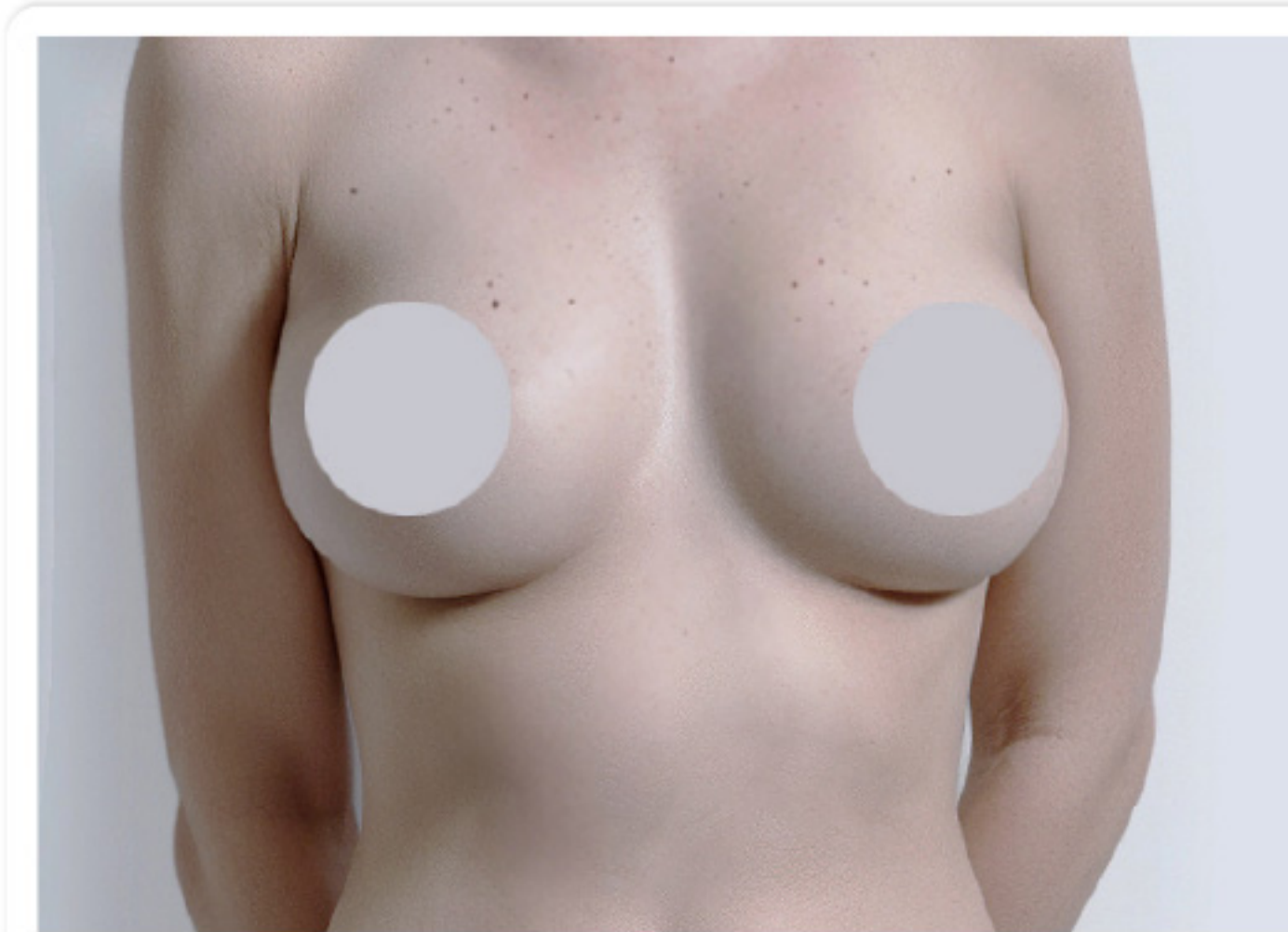

(المراجع)



Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;11:3-13

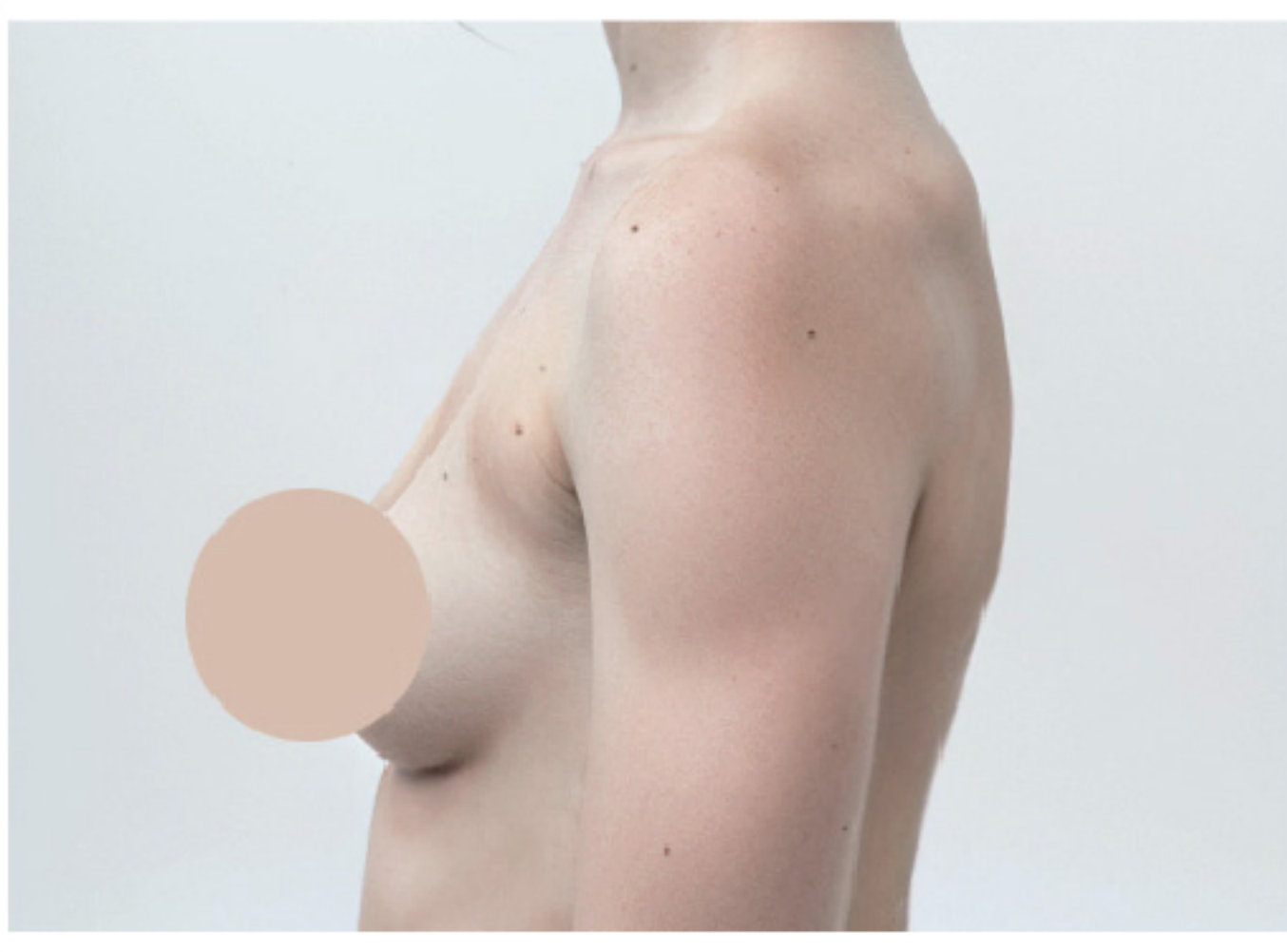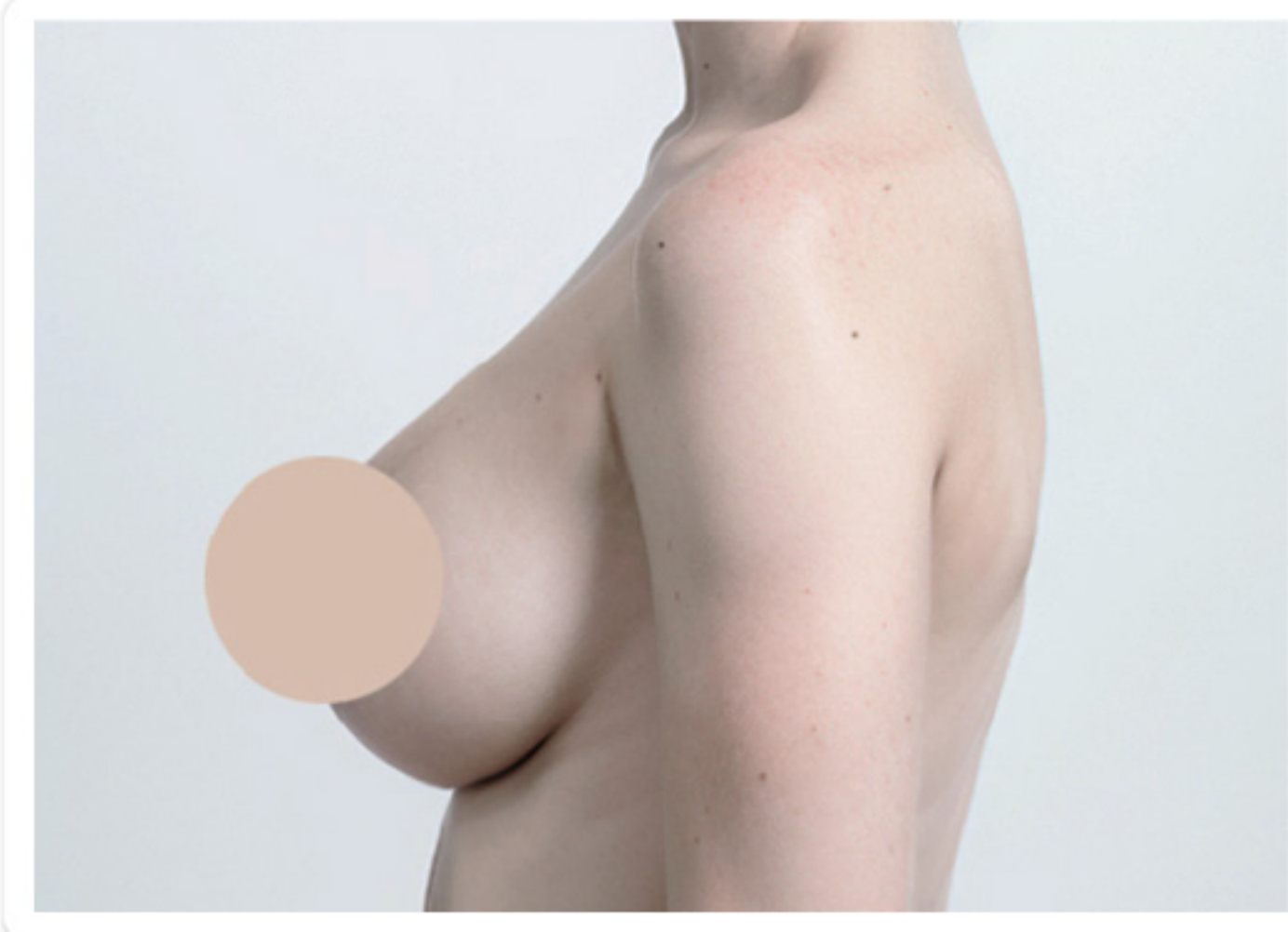

(المراجع)

Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;17:10-15

عملية تكبير الأرداف

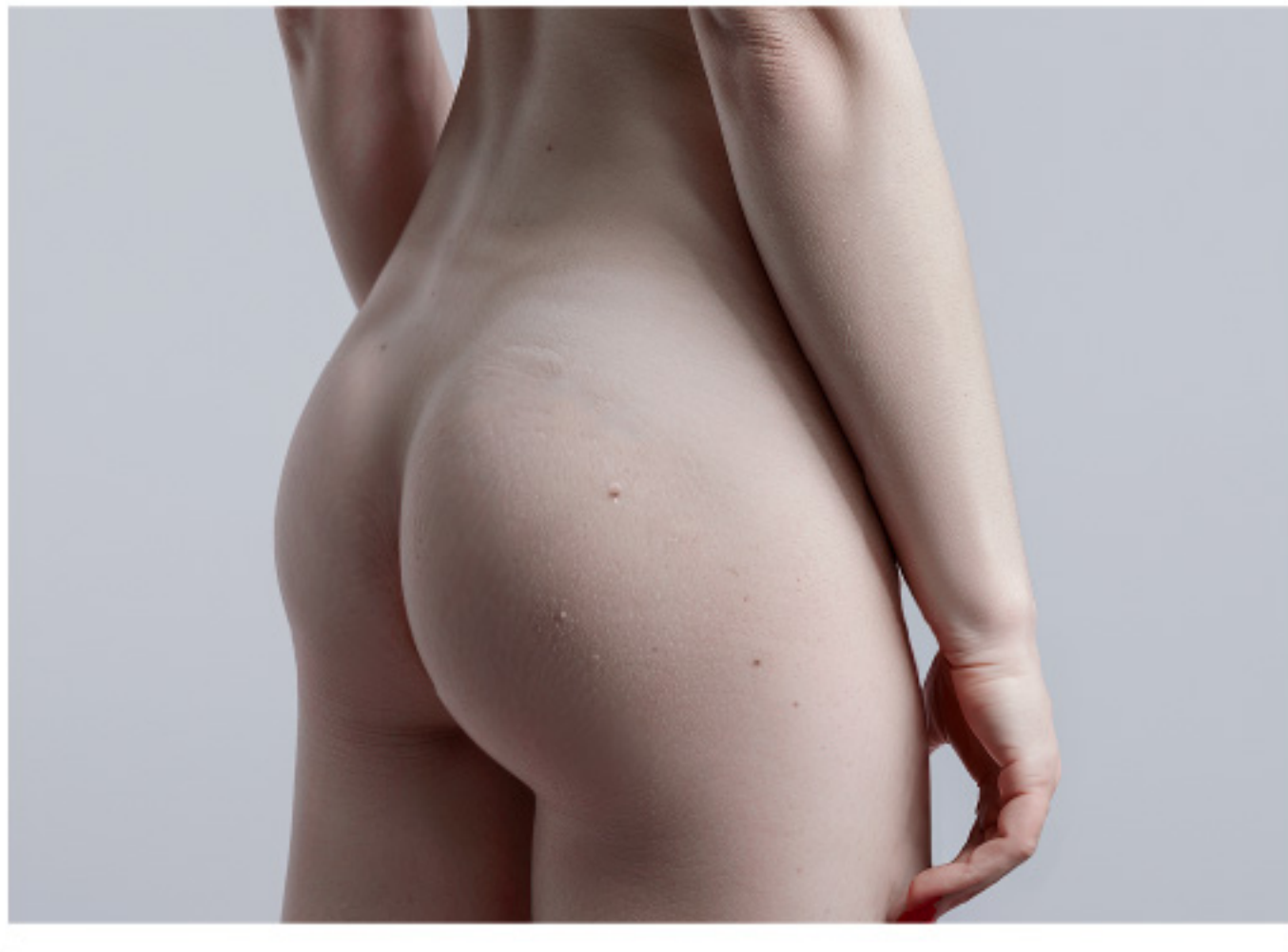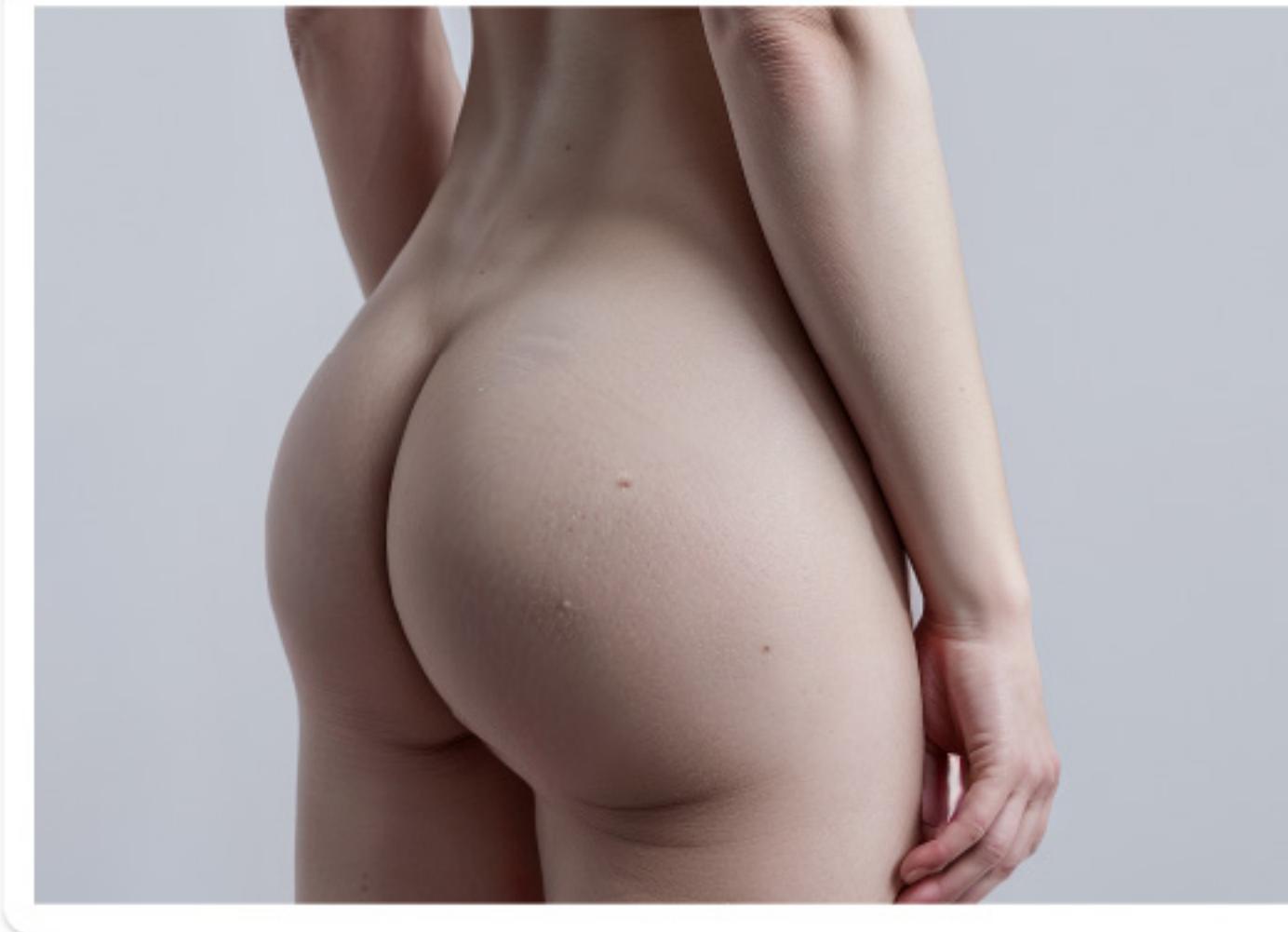


(المراجع)


Augmentation of buttocks by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;21:35-19

منطقة العلاج


الجزء الأمامي من الجسم

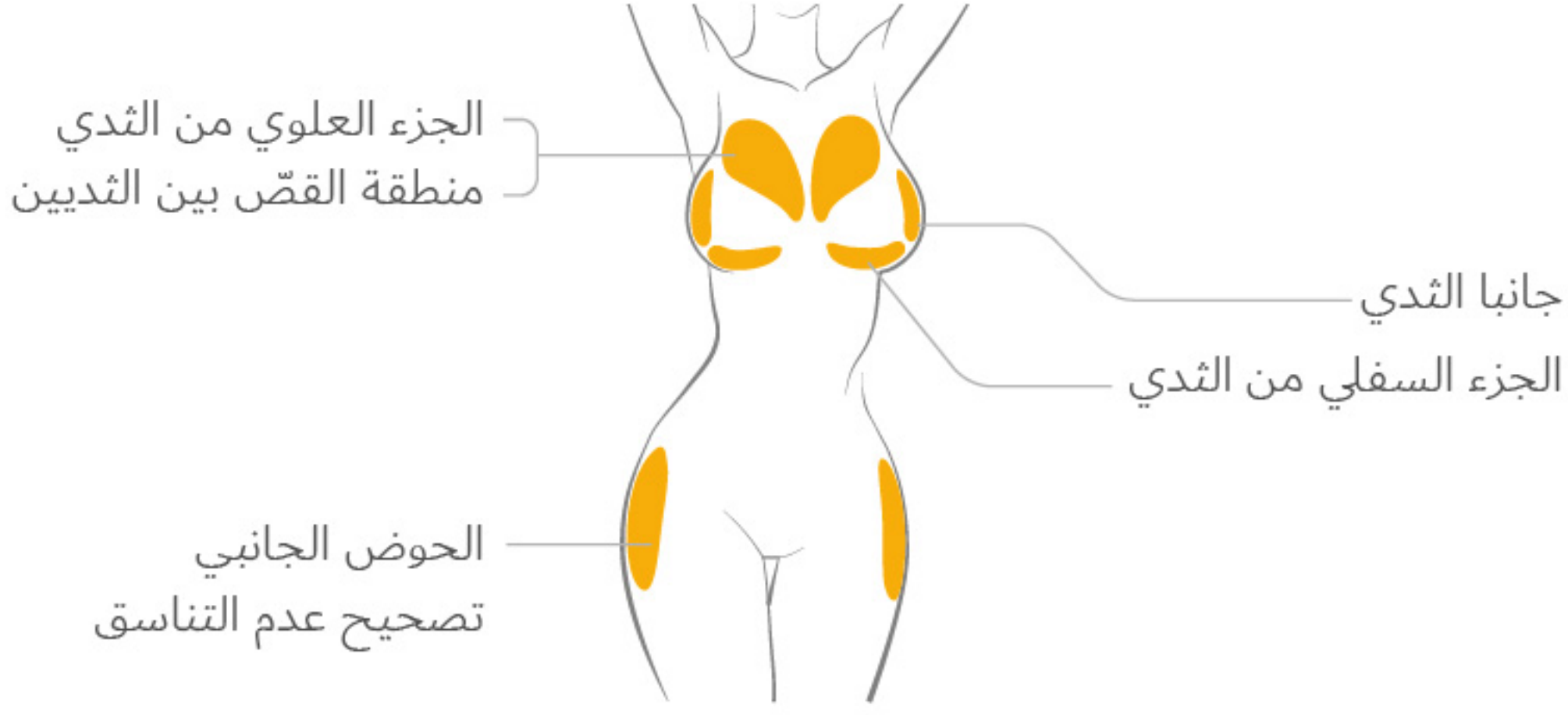

الجهة الجانبية

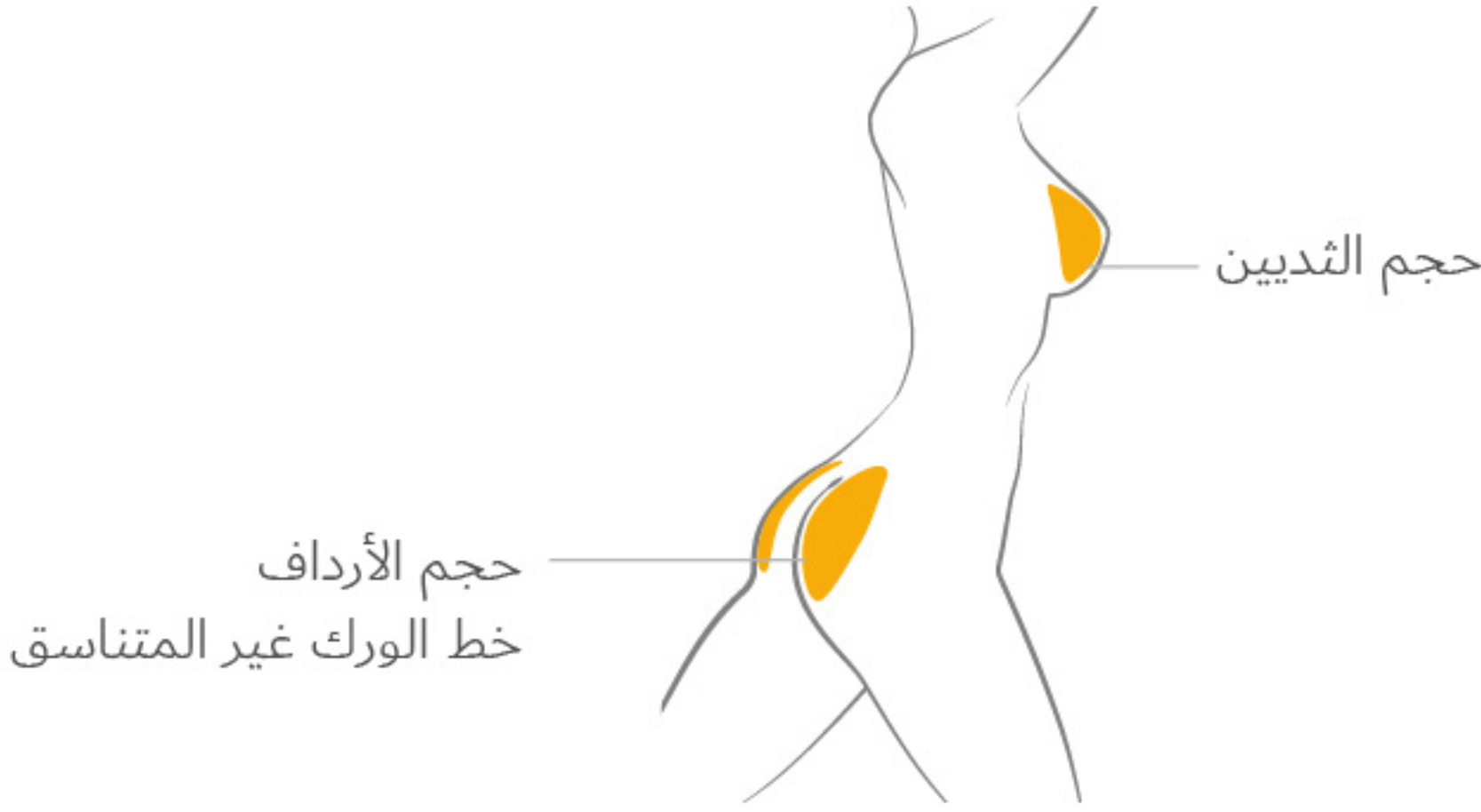


الجهة الخلفية

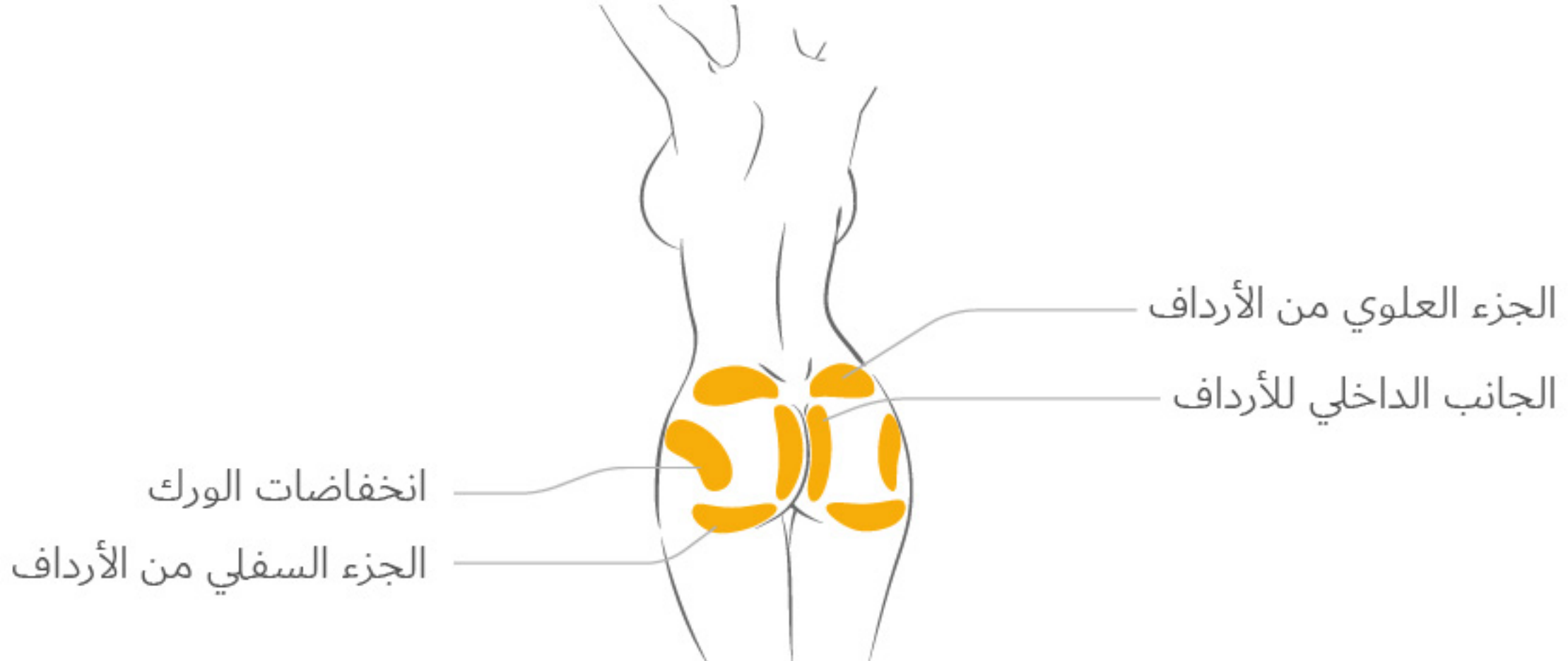

✳ في حال وجود ترهل جلدي شديد أو تدلّ واضح في منطقة الأرداف، يُنصح بشدة بعدم حقن فيلرز حمض الهيالورونيك في الجزء السفلي من الأرداف.

مواقع الحقن النموذجية

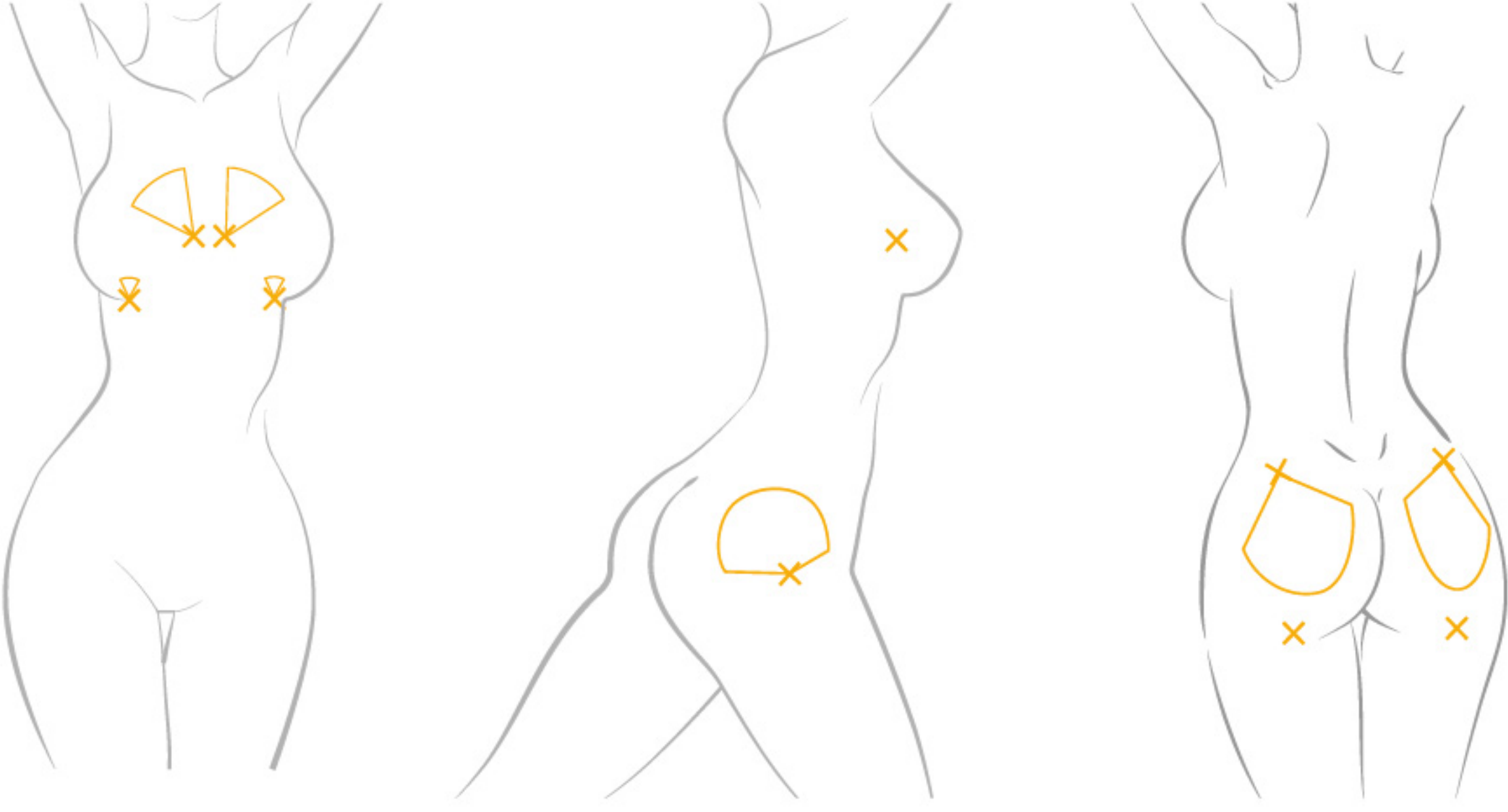

الكانيولا الموصى بها

- تكبير الثديين – يُوصى باستخدام ميكروكانيولا G14 بطول 90 مم
- تكبير الجزء العلوي من الثدي – يُوصى باستخدام ميكروكانيولا G20 بطول 70 مم
- تكبير الأرداف – يُوصى باستخدام ميكروكانيولا G18 بطول 70 مم أو G18 بطول 90 مم

خطوات العلاج

- التحقق من أن حالة المريض مناسبة لإجراء العلاج.
- غسل منطقة العلاج بالماء والصابون.
- تعقيم منطقة العلاج بالكحول أو بمطهر مناسب آخر.
- حقن فلر الجسم LEXYFILL HA في مستوى النسيج تحت الجلدي بمنطقة العلاج باستخدام إبرة رفيعة الجدار أو كانيولا.
- بعد الانتهاء من الحقن، يجب تدليك موضع العلاج بلطف ليتوافق مع محيط الأنسجة المحيطة.

✳ تتوافر تعليمات الاستخدام التفصيلية في الدليل المرفق مع المنتج.

الاحتياطات بعد العلاج

- وضع كمادات باردة على المنطقة المعالجة لمدة 15-20 دقيقة في كل مرة، عدة مرات يوميًا، للمساعدة في تقليل التورم والكدمات.
- تجنب الضغط على المنطقة المعالجة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد الإجراء.
- تجنّب ما يلي لمدة 48 ساعة على الأقل بعد الإجراء:
 - النشاط البدني المجهد أو التمارين الرياضية
 - تناول الكحول والتدخين
 - الحمامات الساخنة، الساونا، وغرف البخار

✳ تتوافر الاحتياطات التفصيلية في الدليل المرفق مع المنتج.

تعزير الحجم بفعالية أعلى

LEXYFILL VOLUME CREAM

AETERDERM®

قمنا بتطوير

AETERDERM®

كمنتج تكاملي فعّال مع

LEXYFILL،

من خلال صياغة مثالية تهدف إلى تعظيم تأثير العلاج والحد من الآثار الجانبية للفيلرز.

الوظيفة 1

تعزير حجم الجسم من خلال تحفيز تكاثر الخلايا الدهنية بواسطة VOLUFILINE

الوظيفة 2

شدّ البشرة وتحسين مرونتها عبر تحفيز الإنتاج الحيوي للكولاجين والإيلاستين

الوظيفة 3

الوقاية من علامات التمدد والمساعدة على علاجها

الوظيفة 4

ترطيب البشرة وتهديتها

يُوضع هذا الكريم بلطف على منطقة العلاج بـ LEXYFILL مرتين يوميًا، لمدة 10–20 دقيقة في كل مرة.

يساعد على تعظيم فعالية علاج فليد الجسم، والحفاظ على الحجم على المدى الطويل، وإضفاء مظهر أكثر طبيعية من خلال التحفيز الطبيعي لتكاثر الخلايا الدهنية.



AETERDERM®


LEXYFILL VOLUME CREAM

Fill Your Luxury Beauty




تحفيز تكاثر الخلايا الدهنية بواسطة VOLUFILINE™

يحتوي على 50,000 جزء في المليون (ppm) من VOLUFILINE، وهو مكوّن خام حاصل على براءة اختراع دولية، وقد خضع لاختبارات سريرية لإثبات فعاليته في تحفيز تكاثر الخلايا الدهنية.

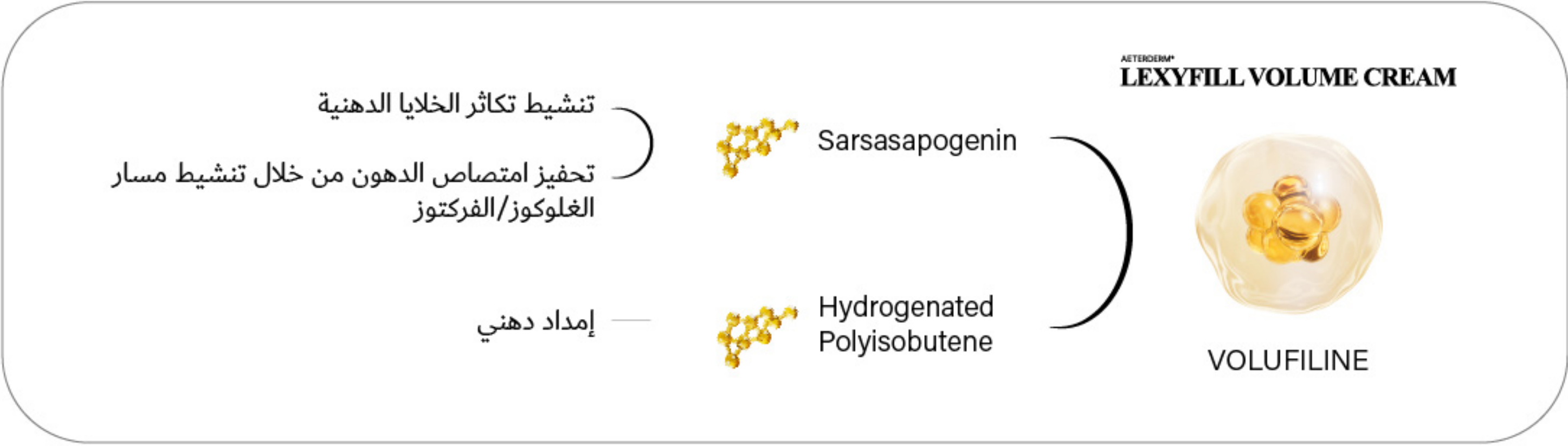


الدراسات السريرية لـ VOLUFILINE™

T1 معدل زيادة الخلايا الدهنية باستخدام VOLUFILINE

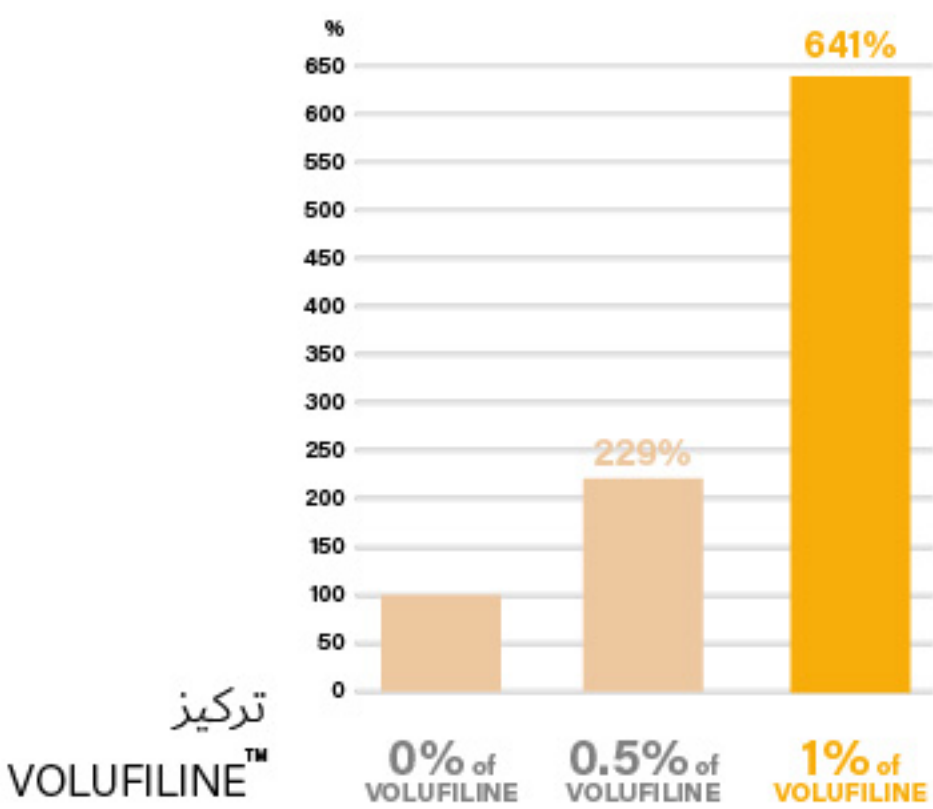


T2 معدل زيادة حجم الخلية باستخدام VOLUFILINE

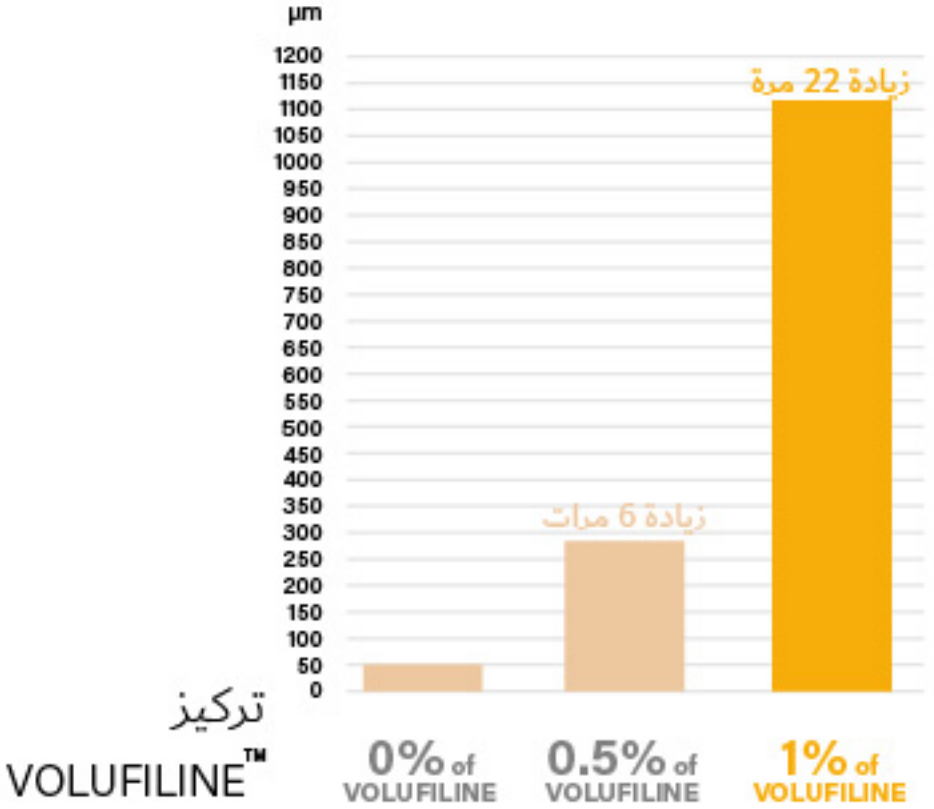

(المراجع
Sci Rep 2024;(22)


T1 صورة مجهرية للخلايا الدهنية مع VOLUFILINE

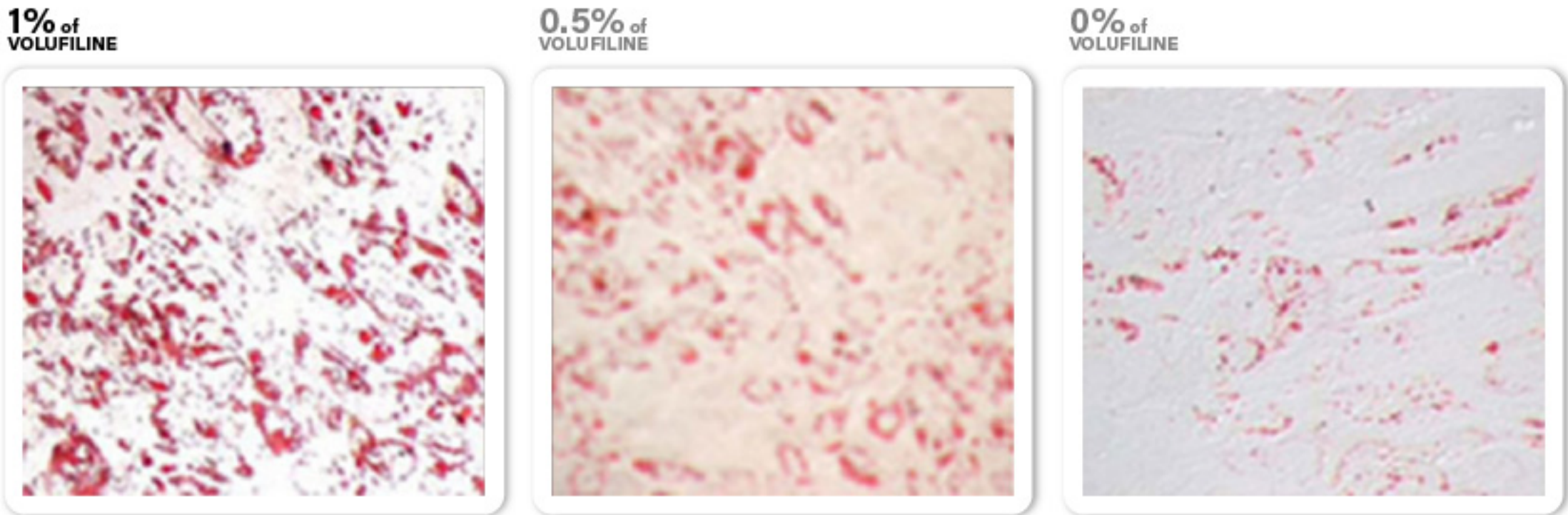

■ خلايا دهنية ملوّنة باللون الأحمر

(المراجع) Sci Rep 2024;(27)

T2 صورة بالرنين المغناطيسي للخلايا الدهنية مع VOLUFILINE

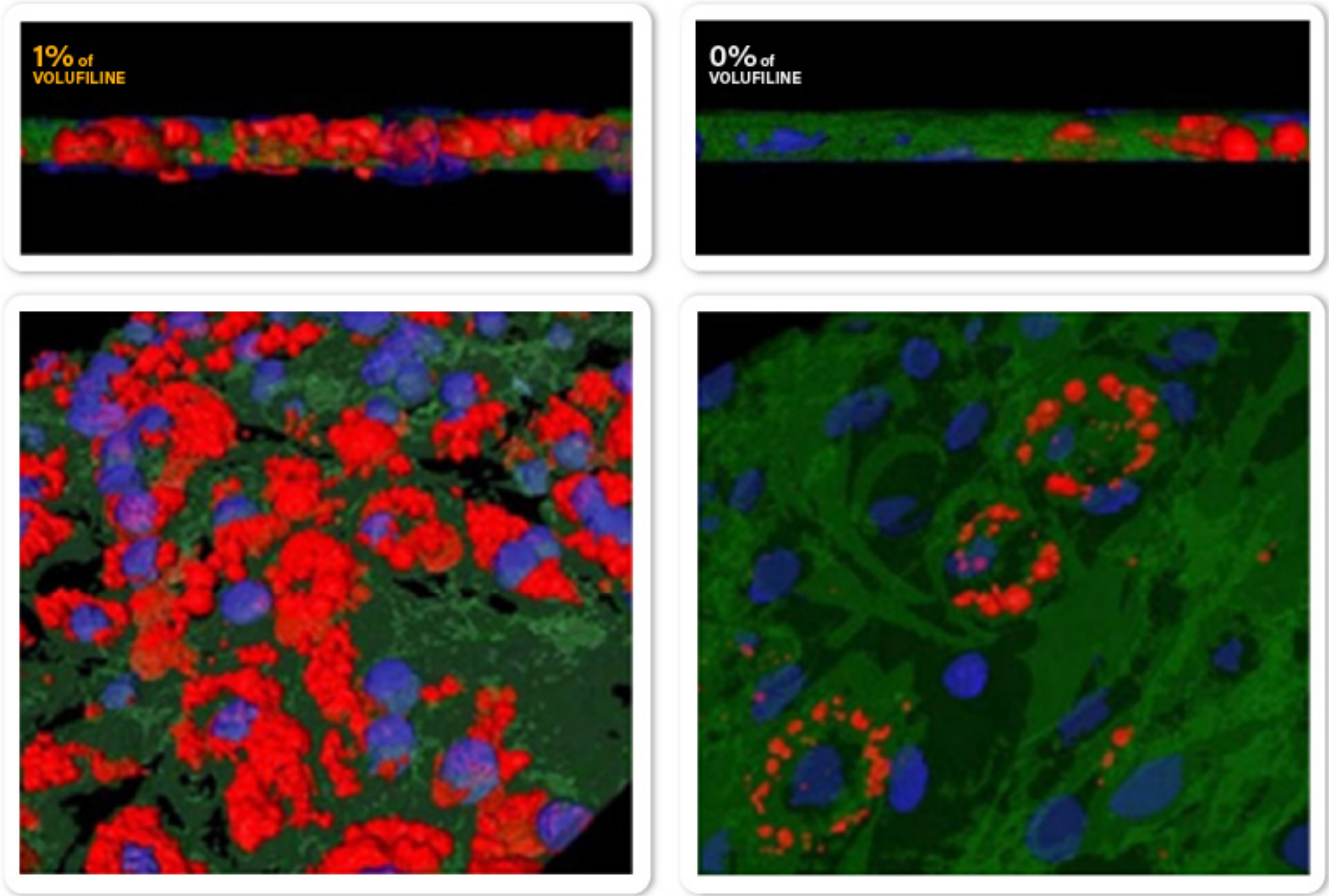


■ خلايا دهنية ملوّنة باللون الأحمر

(المراجع) Sci Rep 2024;(31)


الانتاج الحيوي للكولاجين والإيلاستين

بالمقارنة مع الامتلاء الناتج عن حقن حمض الهيالورونيك بالفيلر، قد لا تتوفر كمية كافية من الكولاجين والإيلاستين لدعمه، مما قد يؤدي إلى ضعف المرونة والثبات. يساعد LEXYFILL VOLUME CREAM على معالجة هذه المشكلة من الجذور من خلال تعزيز مرونة الجلد ودعمه البنيوي.

التركيب البنيوي الطبيعي للجلد
المكوّنات الرئيسية الثلاثة للجلد:
- حمض الهيالورونيك
- الكولاجين
- الإيلاستين

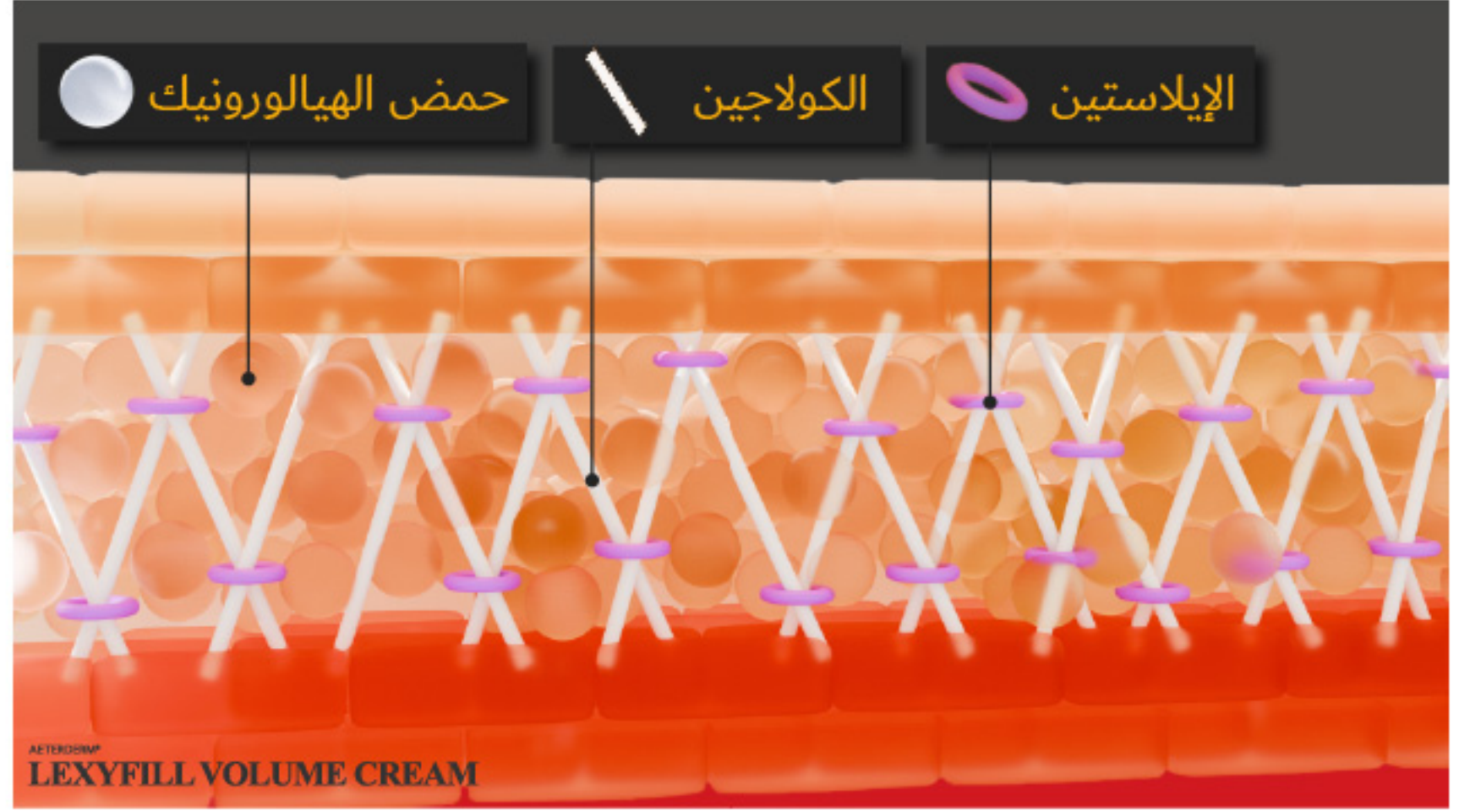

تعويض حمض الهيالورونيك في
الجلد باستخدام الفيلر

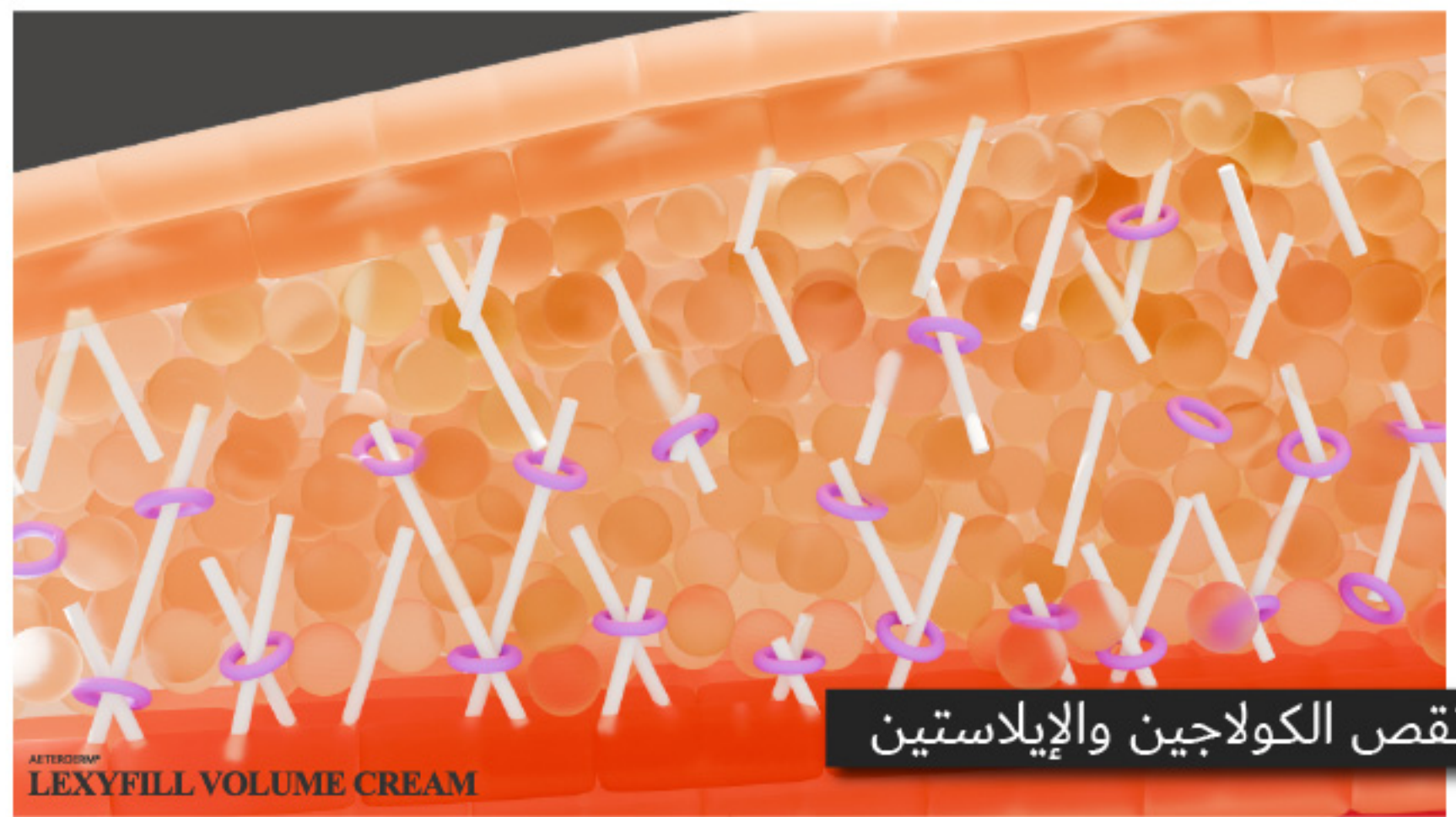

يحفّز إنتاج الكولاجين والإيلاستين عبر
تقنية الليبوسوم

⊙ تركيب الليبوسوم

المكوّن الفعّال

بنية ثنائية الطبقة من
الفوسفوليبيدات قادرة
على العبور بسهولة عبر
الأغشية الحيوية ذاتيًا.



تسمح بنية الليبوسوم للمكوّنات
الفعّالة بالنفاذ إلى أعماق الجلد.




يجعل البشرة أكثر تماسكًا ومرونة.

يعزّز مرونة الجلد وثبات فيلر حمض
الهيالورونيك.



⊙ تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين

⊙ تنشيط عامل نمو البشرة
(EGF – Epidermal Growth Factor)

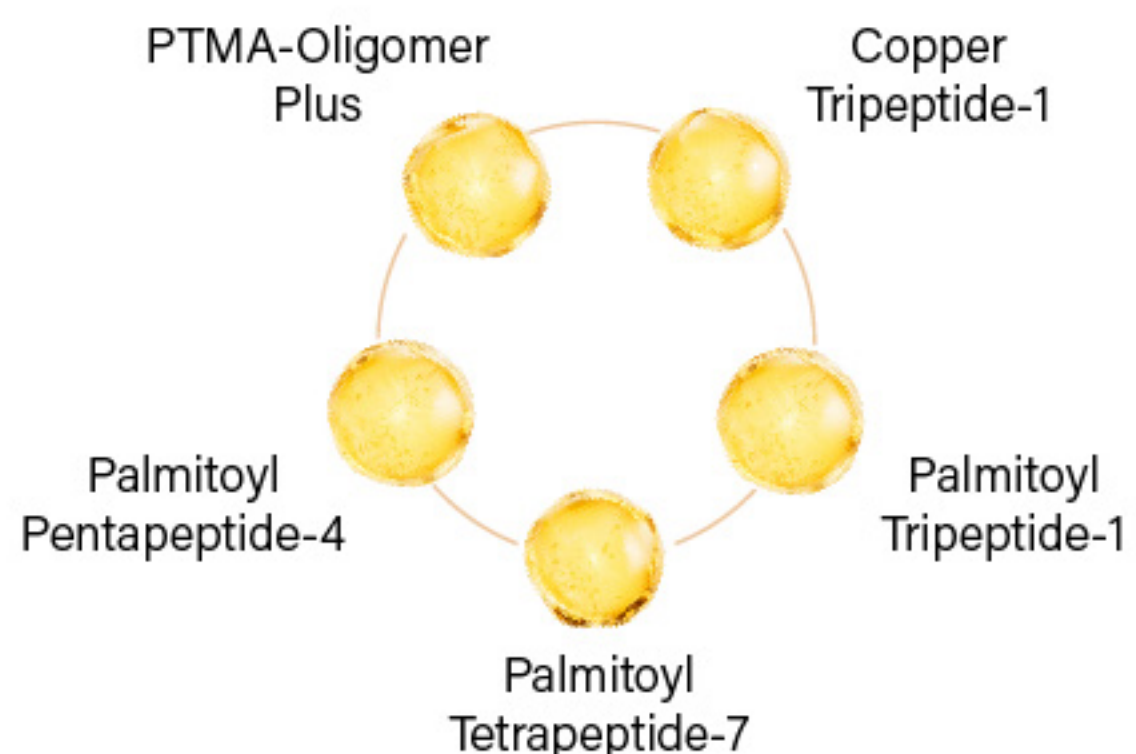


الوقاية من علامات التمدد وتحسين مظهرها

بعد الخضوع لعلاج الفيلر للجسم، قد تظهر علامات التمدد نتيجة الزيادة المفاجئة في الحجم. وقد تم تطوير كريم LEXYFILL VOLUME خصيصًا للمساعدة في معالجة هذه المشكلة.

أثر علامات التمدد




LEXYFILL VOLUME CREAM

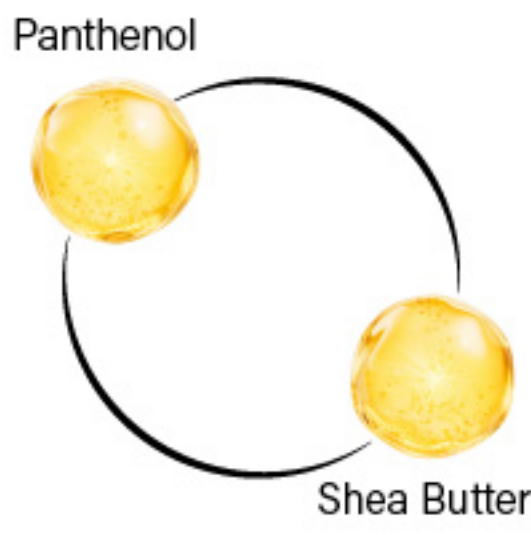

- ⊙ تحفيز تجدد البشرة
- ⊙ تقليل علامات التمدد الحديثة (Striae Rubra) والمساعدة في منع تشكّل الندبات

LEXYFILL VOLUME CREAM

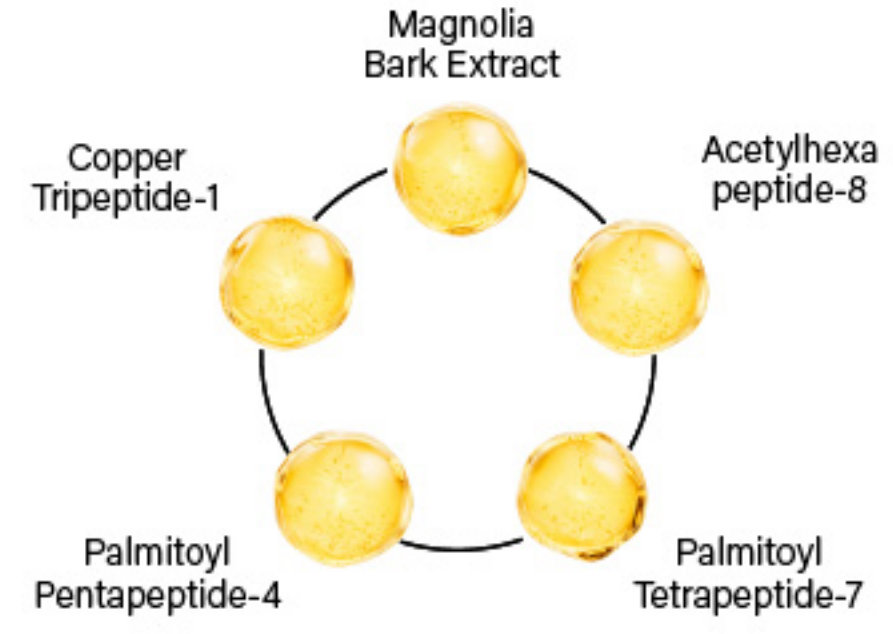

- ⊙ تعزيز حاجز البشرة وزيادة قوة شدّها (زيادة SPT)
- ⊙ إصلاح تلف البشرة ودعم عملية التعافي

ترطيب وتهدئة البشرة


حتى في حال تنفيذ الإجراء باستخدام الكانيولا، فإن تحفيز الطبقة الأدمية قد يؤدي إلى إحساس بالحرارة ويُسبب تبخر رطوبة الجلد، مما يجعل الجلد الجاف يفقد مرونته بسهولة وقد يترك آثار تمدد جلدية (Striae Distensae).

تم تطوير LEXYFILL VOLUME CREAM بتركيبة فعّالة للمساعدة في الوقاية من هذه الآثار الجانبية.

أثر علامات التمدد



LEXYFILL VOLUME CREAM

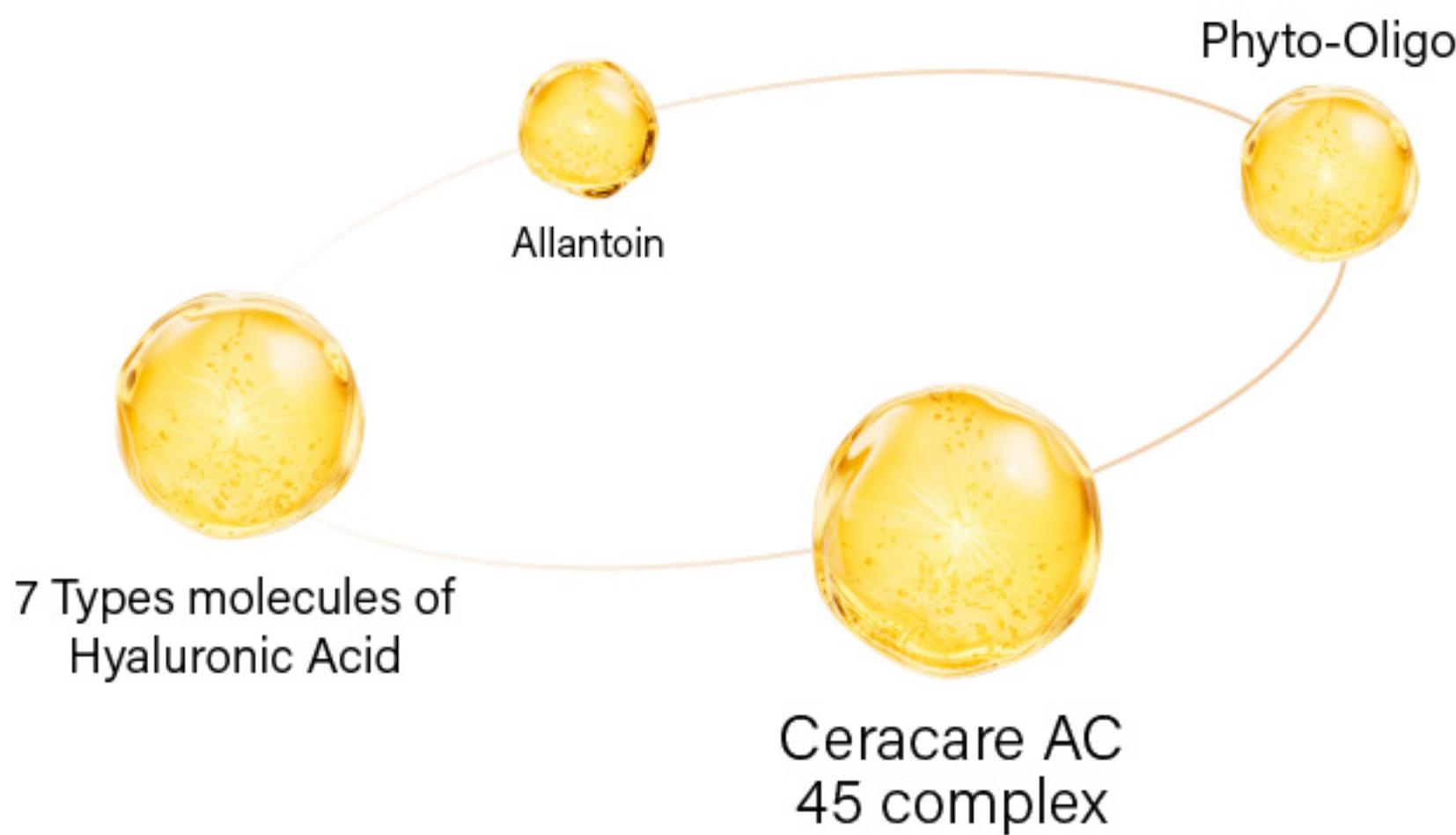

- ⊙ الحدّ من تبخر الرطوبة
- ⊙ ترطيب عميق

Fill Your Luxury Beauty



AETERDERM®

LEXYFILL

[التركيب]

حمض الهيالورونيك ذو روابط متشابكة 24 ملغم/مل
محلول ملحي مُنظَّم بالفوسفات q.s.

[التعبئة]

60 مل × قارورة واحدة / علبة

[التخزين]

يُحفظ في درجة حرارة الغرفة (1–30°م) بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[المكونات]

Water, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vinyl Dimethicone, Panthenol, C14-22 Alcohols, Ceramide NP, C12-20 Alkyl Glucoside, Dipropylene Glycol, Carbomer, Arginine, Xanthan Gum, Glyceryl Polyacrylate, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Hydrogenated Lecithin, Adenosine, Glyceryl Stearate, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Cholesterol, Ceramide NS, Ceramide AS, Ceramide AP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Althaea Rosea Root Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Glucose, Caulerpa Lentillifera Extract, Codium Fragile Extract, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Tocopherol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Potassium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramide EOP

[التعبئة]

150 مل / علبة