

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM






Fill Your Luxury Beauty

FEATURE

Độ lỏng thấp nhưng độ đàn hồi cao !


Ngay cả khi không pha nước muối, bạn vẫn có thể dễ dàng rút nó ra khỏi lọ.

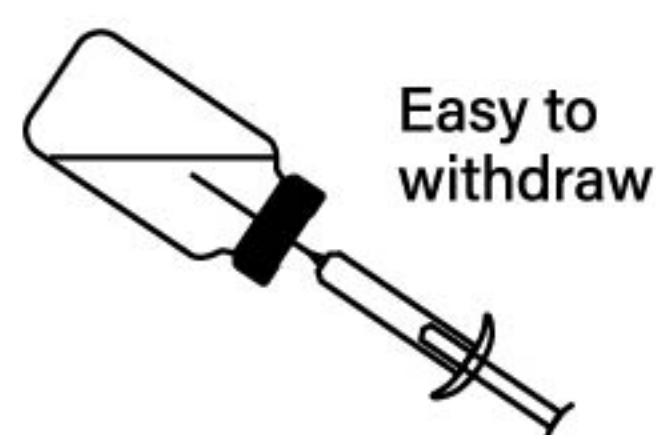

Vì vậy không có hiện tượng mất khối lượng hoặc biến dạng do nước muối gây ra. Và nó sẽ cho bạn thấy độ đàn hồi tuyệt vời.

Body fillers khác

Giảm khối lượng
Sự biến dạng

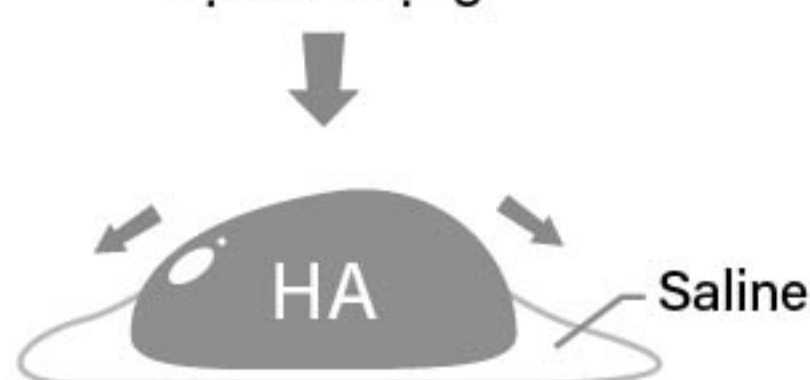

AETERDERM® LEXYFILL

Duy trì khối lượng hình thành trong quá trình



và thậm chí nhiều hơn nữa

Kết quả là, bạn có thể thực hiện kỹ thuật tiêm tinh xảo hơn. ✂

Chúng tôi đã tạo ra chất làm đầy cơ thể với những tính năng tuyệt vời này thông qua thời gian liên kết chéo dài ở nhiệt độ thấp

Để tạo Form body chính xác




Tại sao LEXYFILL là an toàn nhất? Tại sao LEXYFILL có độ đàn hồi cao?

Body Fillers khác




Chỉ sử dụng HA phân tử lớn.

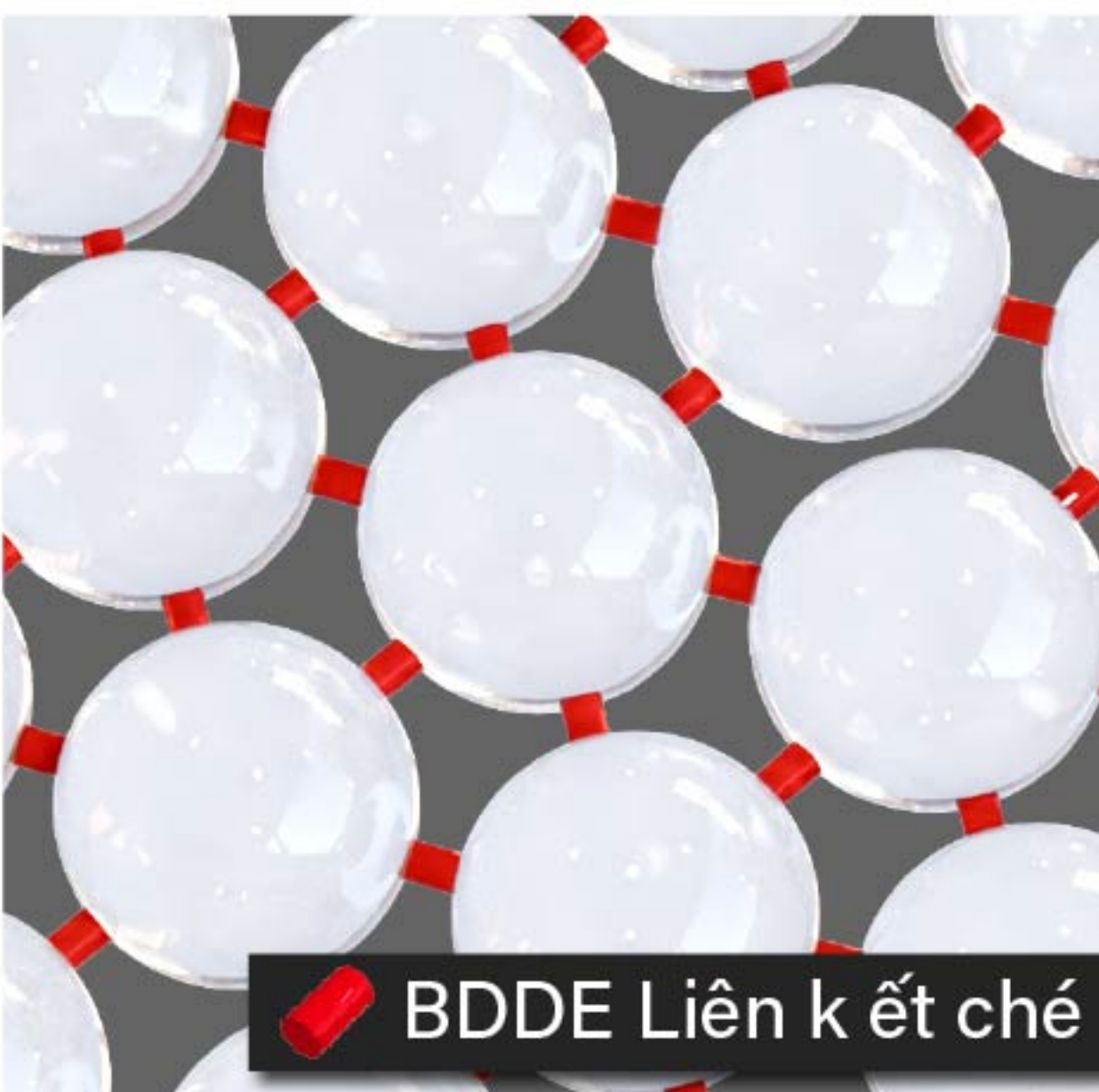

Sử dụng quá nhiều **BDDE** có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Ngoài ra, những chất làm đầy này quá khó để rút ra khỏi lọ. Vì vậy phụ kết hợp với nước muối và lắc đều.

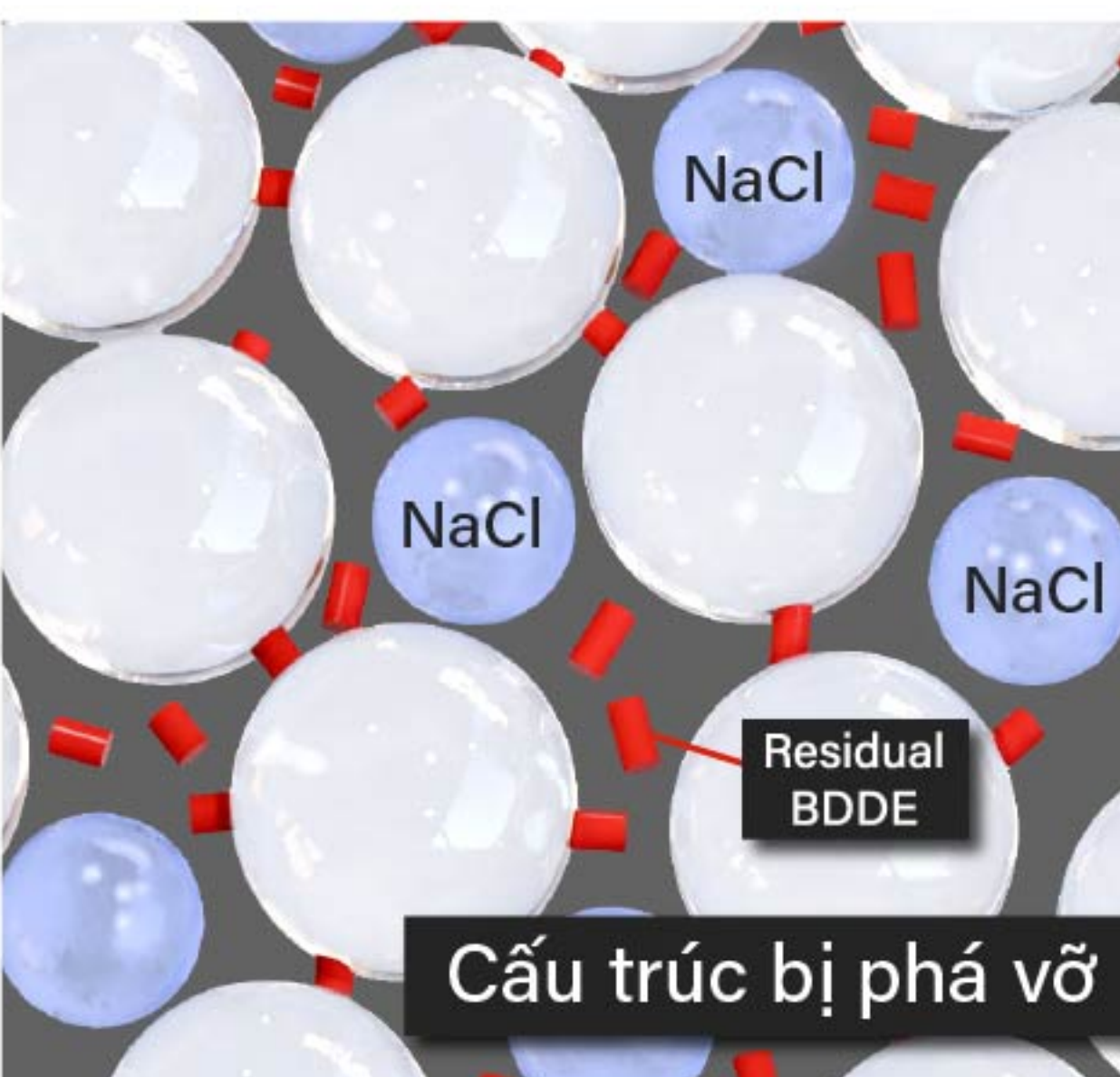


Khi cho nước muối vào và lắc đều, cấu trúc liên kết ngang HA sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nó gây ra sự gia tăng BDDE dư và các tác dụng phụ nghiêm trọng và sốc.


LEXYFILL Body Filler



Các phân tử nhỏ HA được đặt giữa nó. Vì vậy nó có độ ẩm và độ đàn hồi cao hơn.

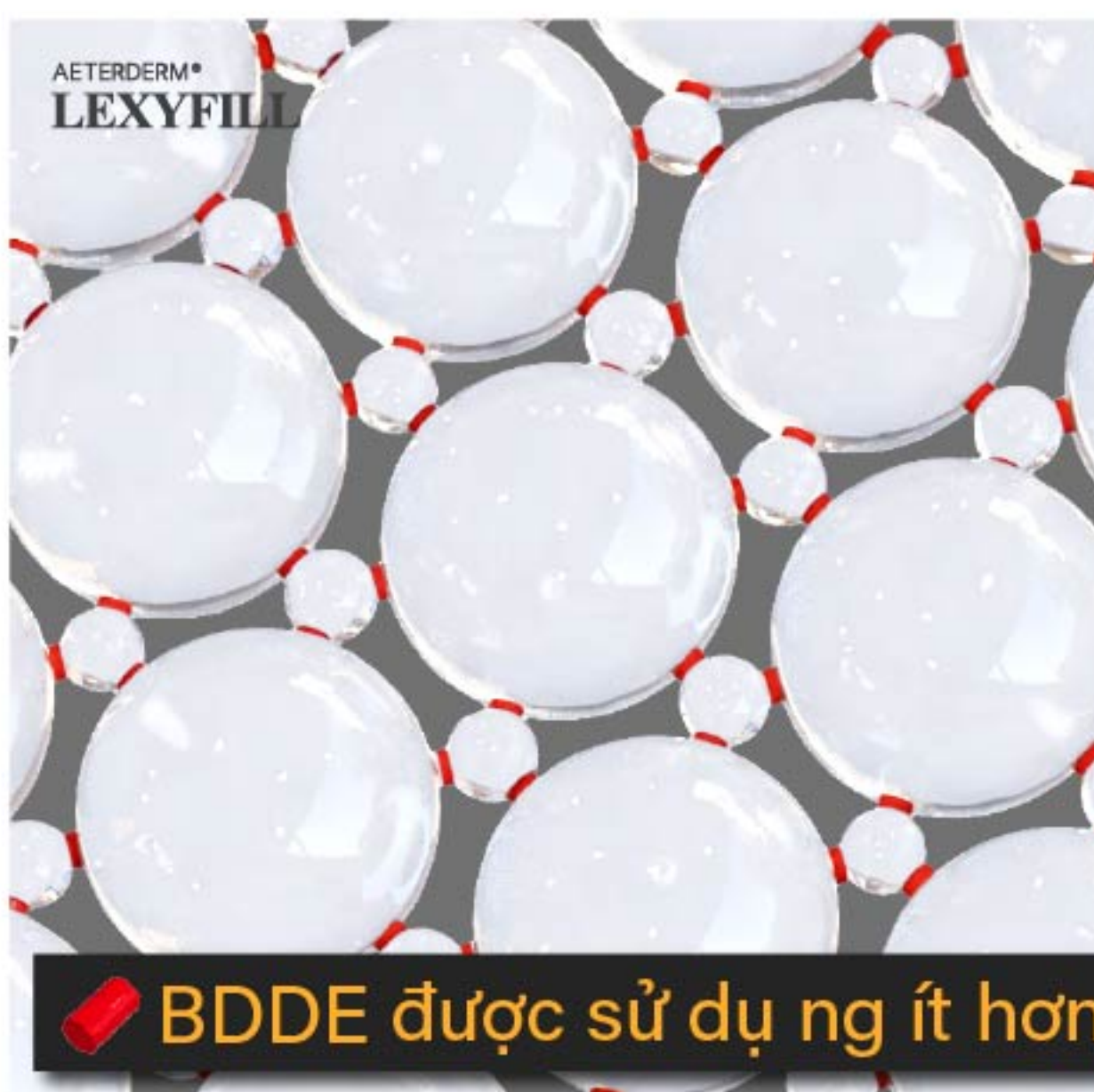

Do cấu trúc HA này có liên kết chéo nên có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một lượng rất nhỏ **BDDE** nên khả năng xảy ra tác dụng phụ sẽ giảm đáng kể.

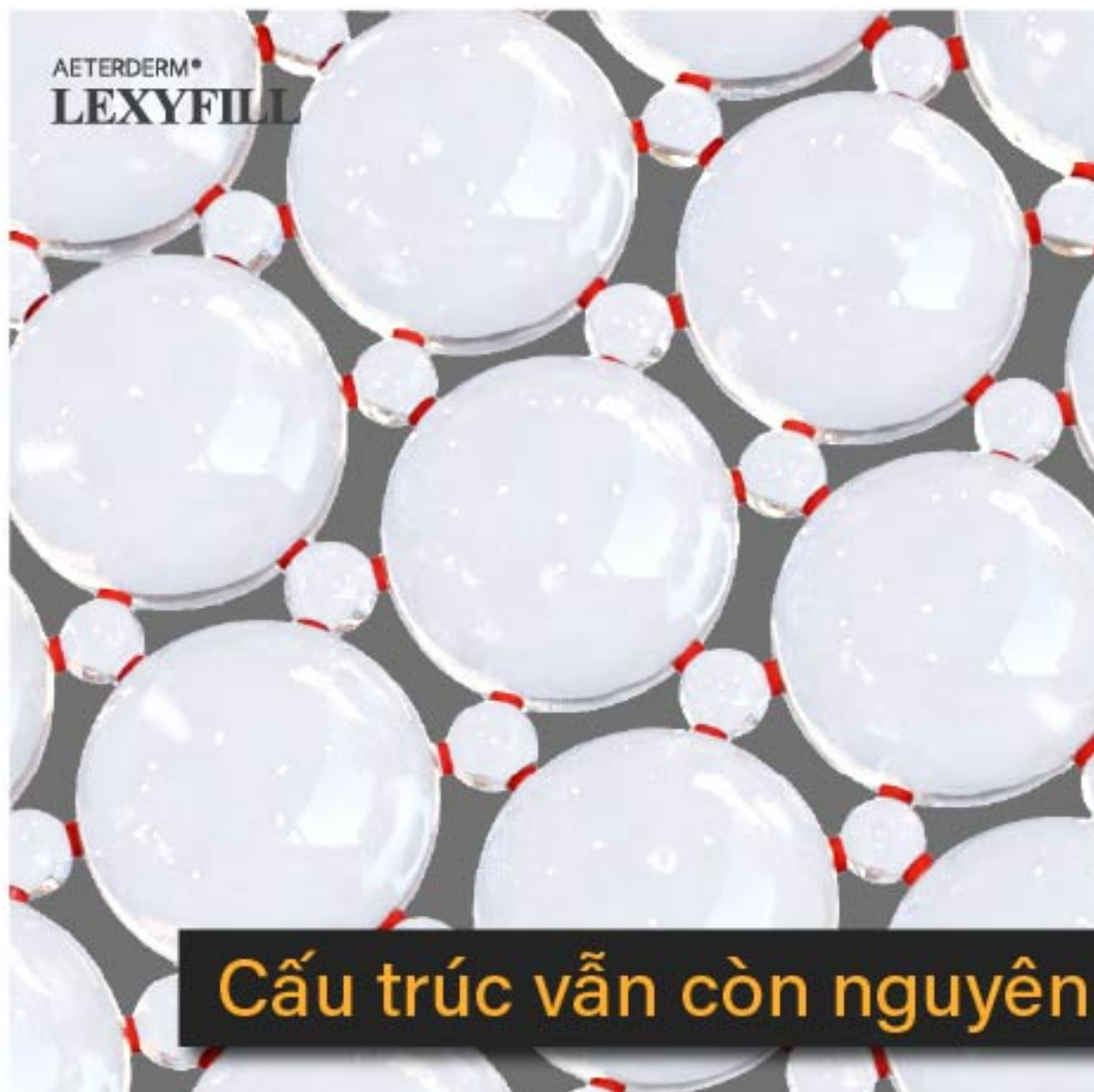

LEXYFILL có thể dễ dàng rút ra bằng ống tiêm mà không cần trộn nước muối, do đó có thể tiêm với cấu trúc HA nguyên vẹn.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Hyaluronic Acid

HA liên kết ngang hai pha
thích hợp cho việc tăng
thể tích cơ thể



Lặp lại 14 lần để loại bỏ 3 loại độc tố.
Ngăn ngừa hoàn toàn các tác dụng phụ.

- ⊙ Tồn đọng cặn dư của BDDE
- ⊙ Nội độc tố
- ⊙ Protein

Tối đa hóa độ đàn hồi và duy trì
bằng cách trộn các phân tử lớn và nhỏ của HA



Nồng độ HA	24 mg / mL
MOD (Mức độ sửa đổi, mol%)	3.85 %
Loại gel	Biphasic
Mô-đun lưu trữ (G')	100 - 250 Pa
Lực ép (N) (30G UTW)	20 N

NGHIÊN CỨU PHI LÂM SÀNG

Kiểm tra độ nhớt và độ đàn hồi



Hình dạng
ban đầu



Sau 1 giờ



Sau 6 giờ



Sau 12 giờ



Sau 24 giờ





AETERDERM®



LEXYFILL

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Quy trình nâng ngực

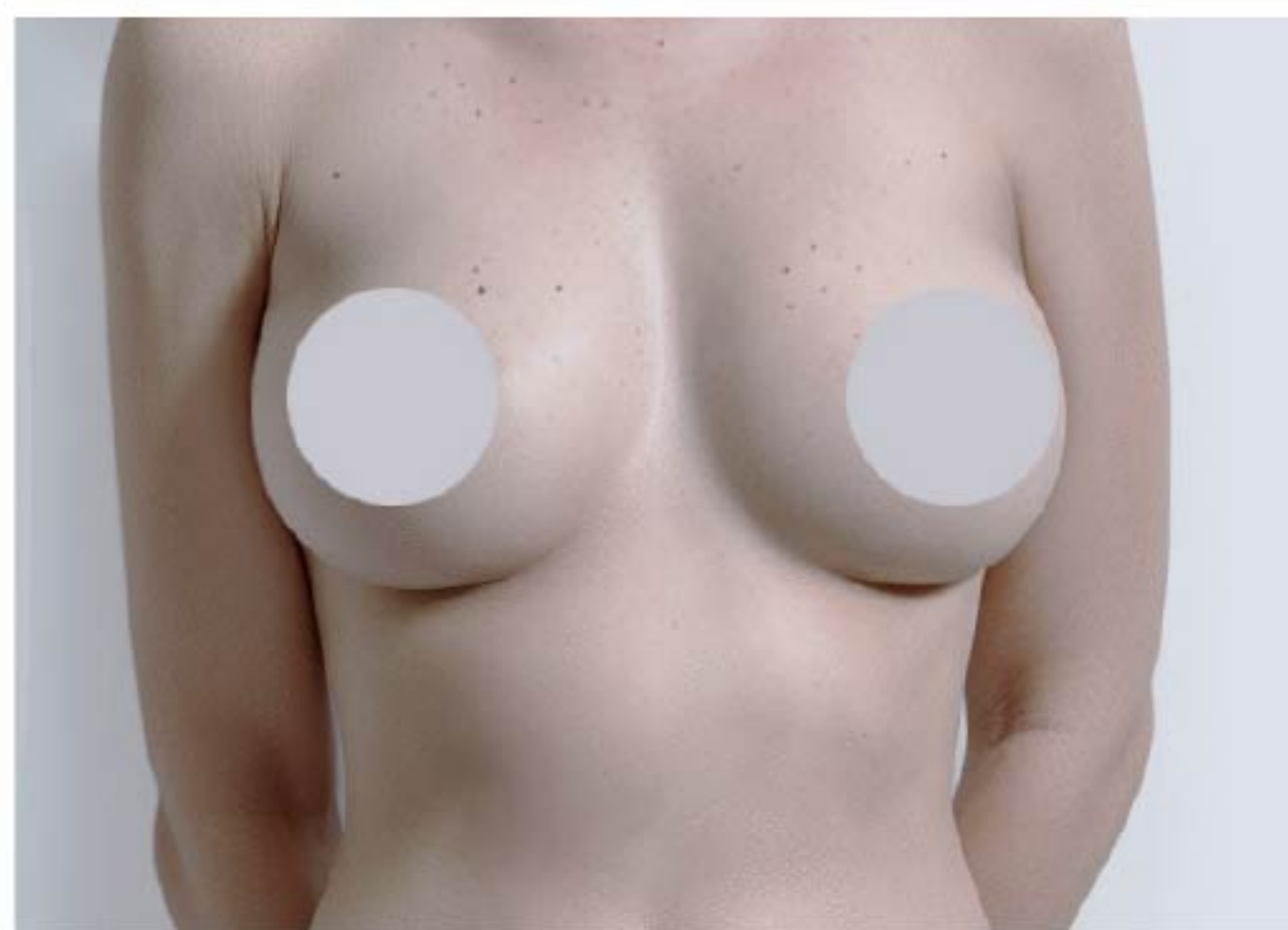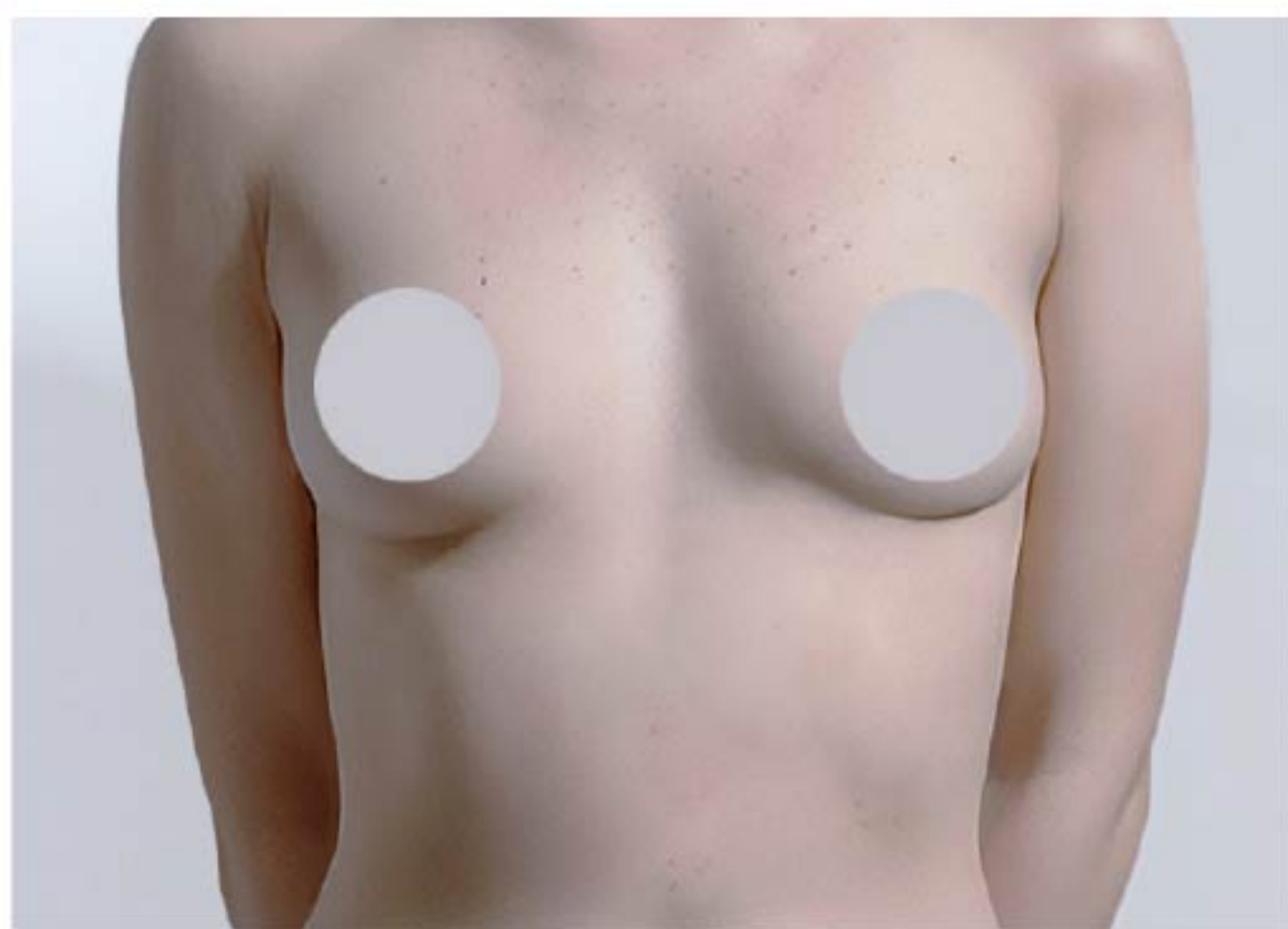


References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;11:3-13

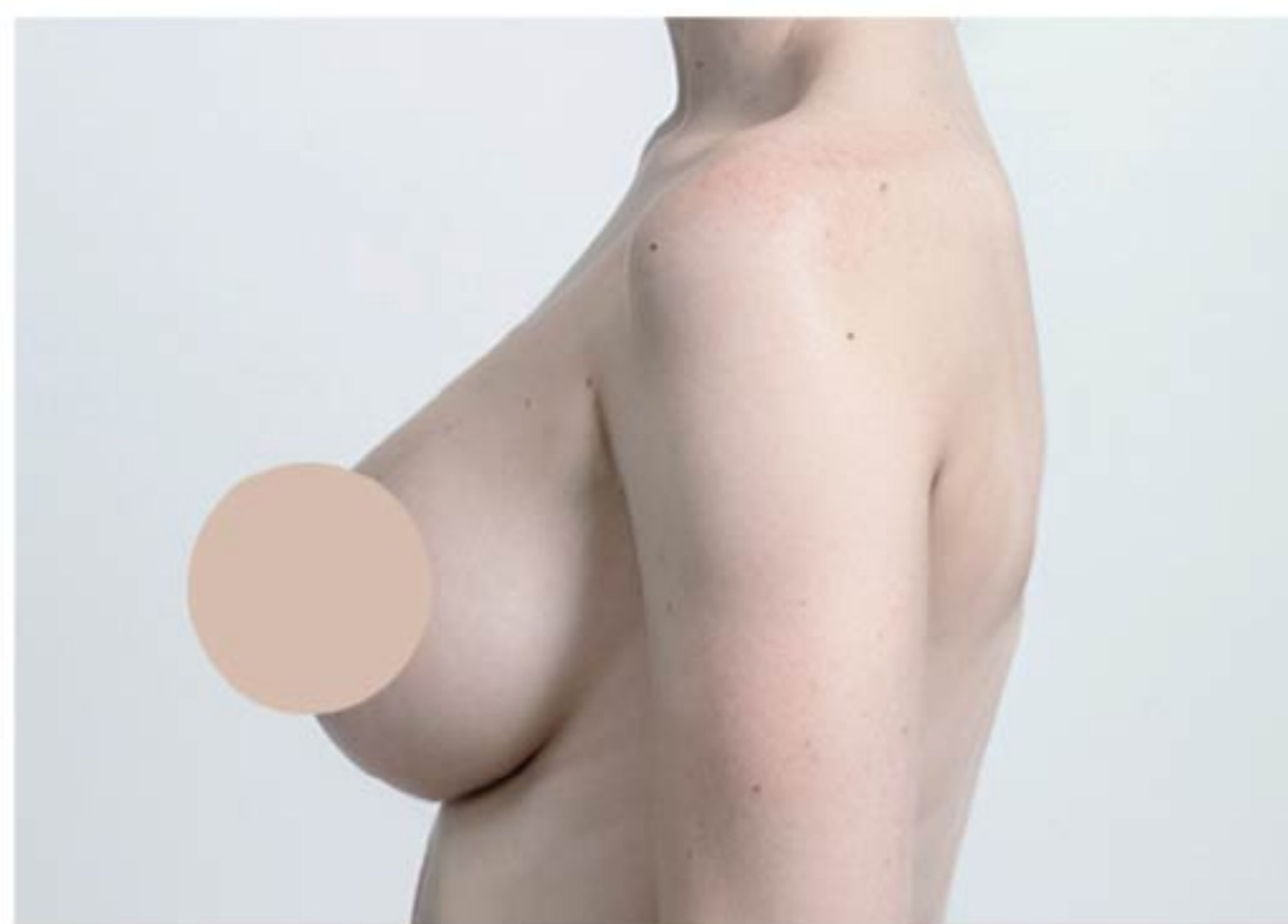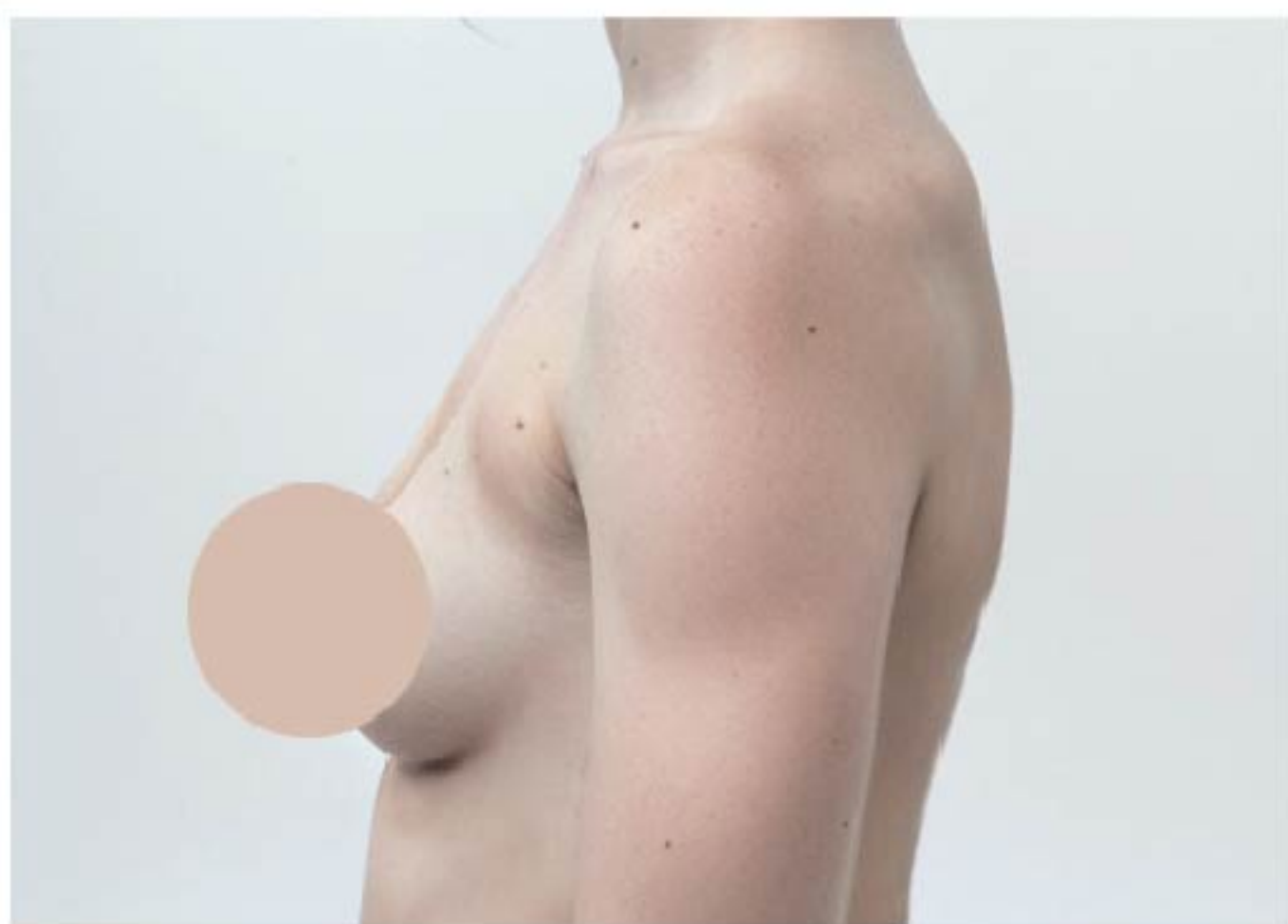

References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;17:10-15

Quy trình nâng mông

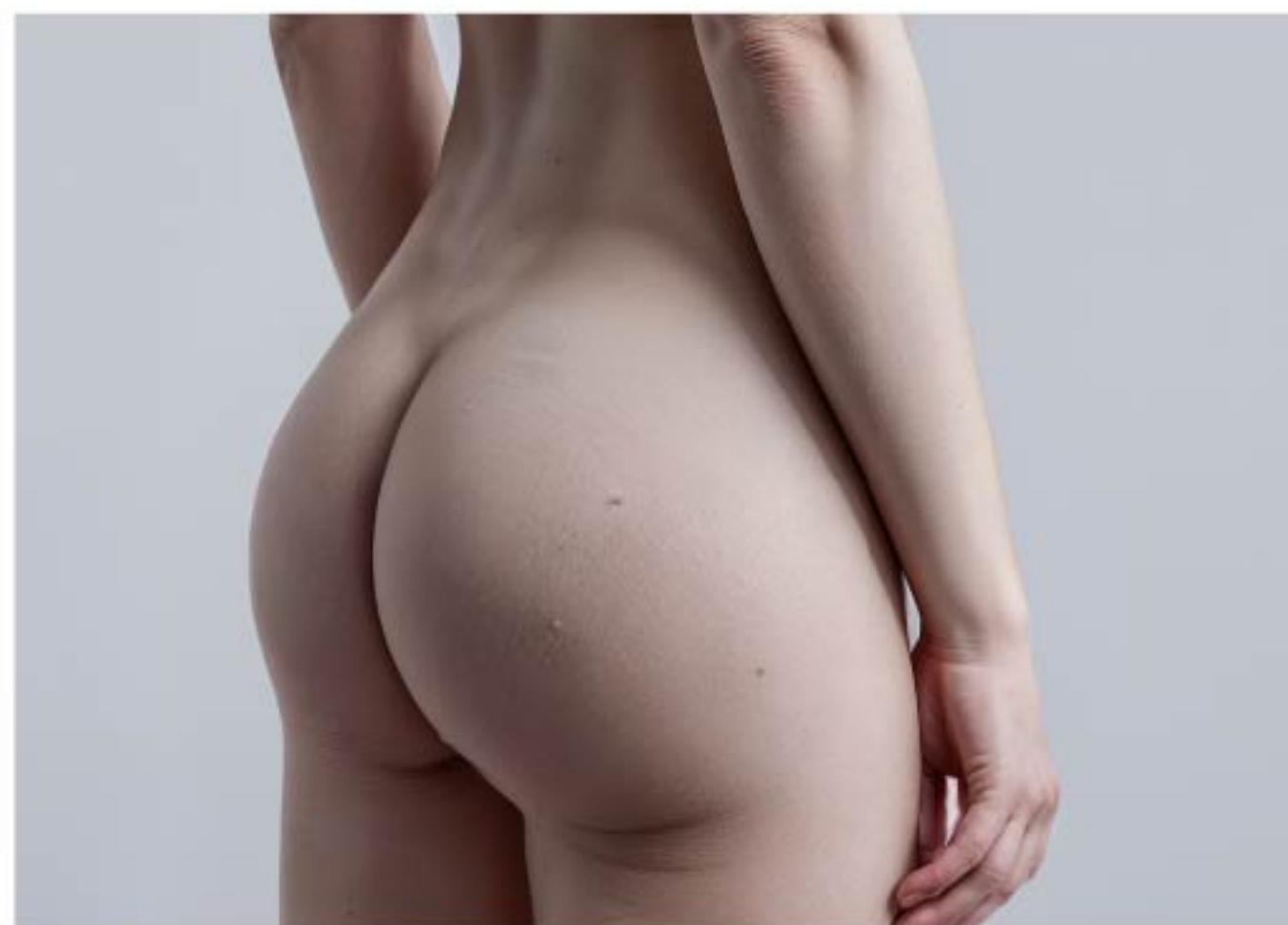


References) Augmentation of buttocks by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;21:35-19


TREATMENT

Khu vực điều trị


Thân trước

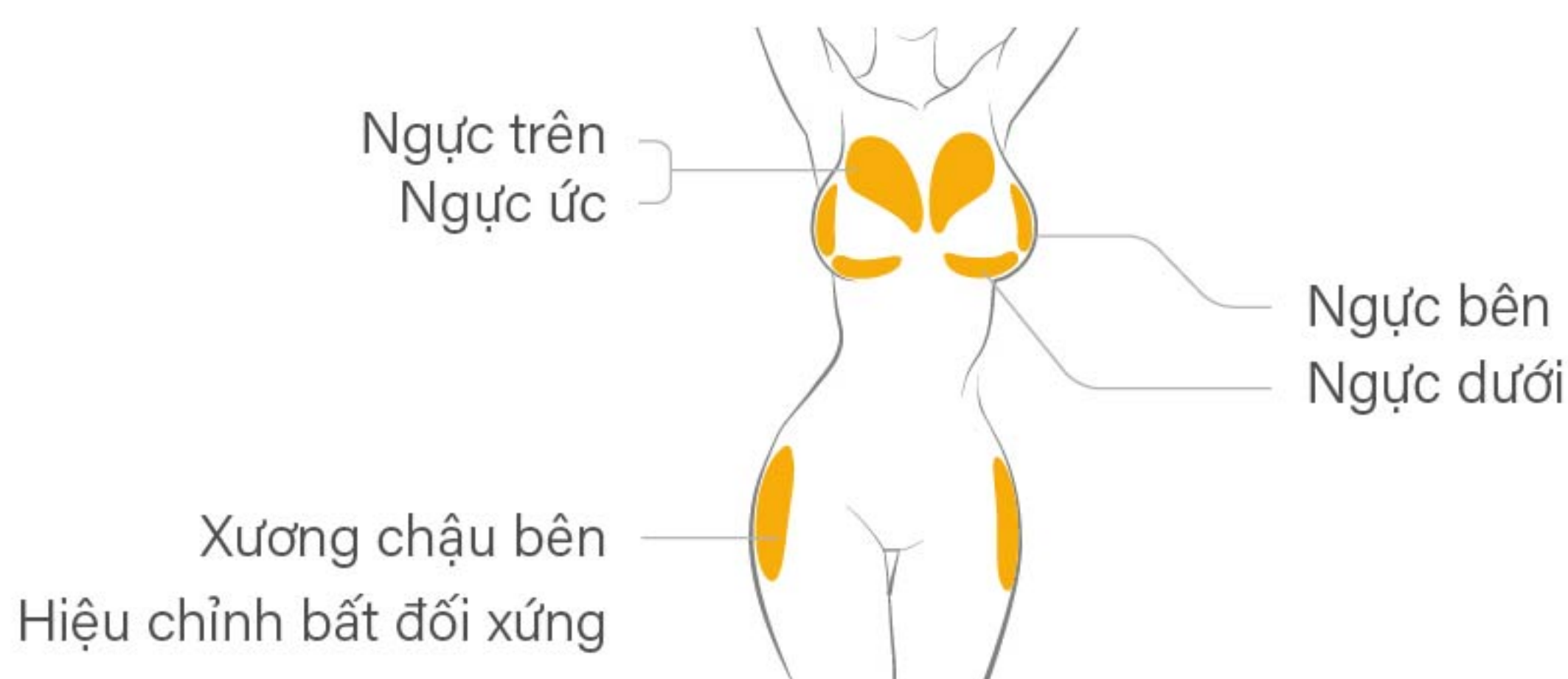

Thân bên

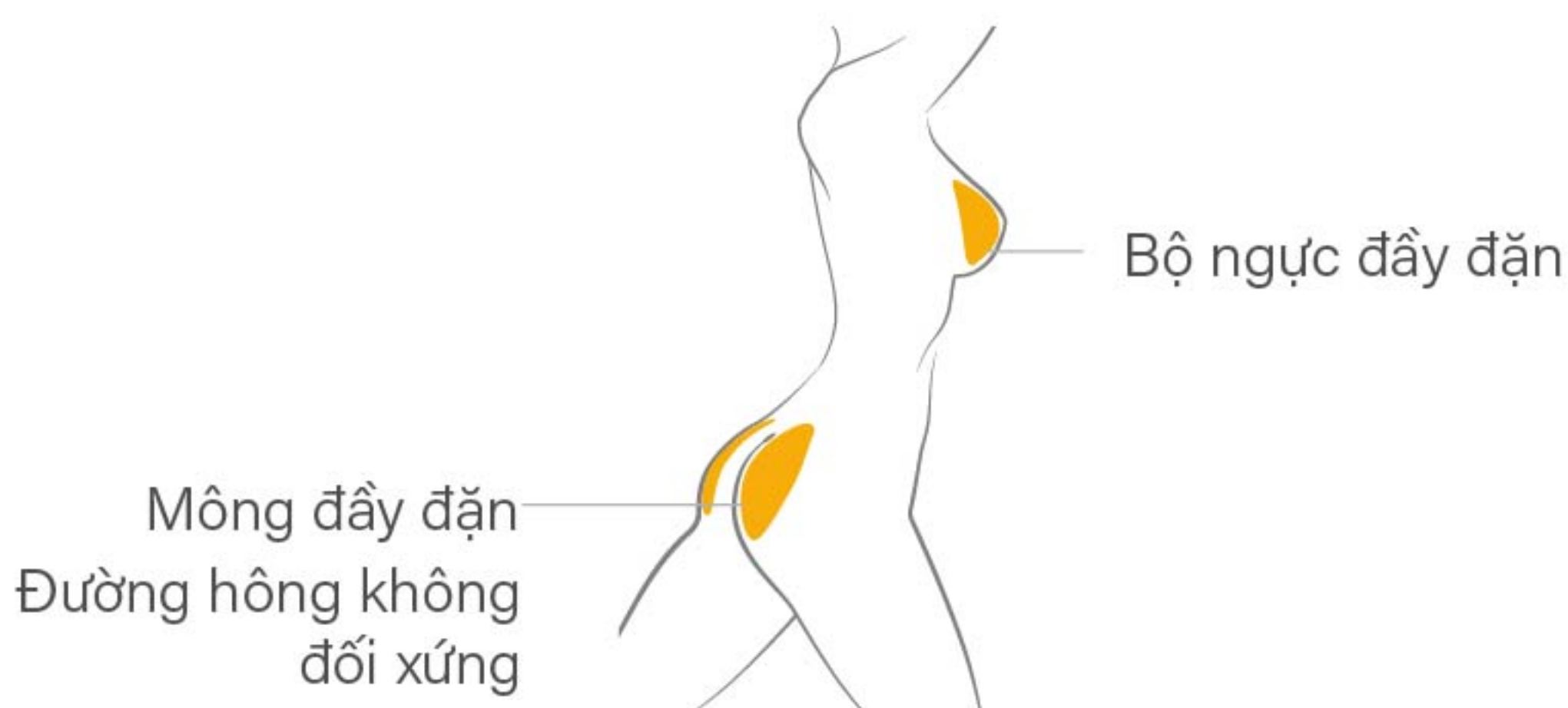


Mặt sau

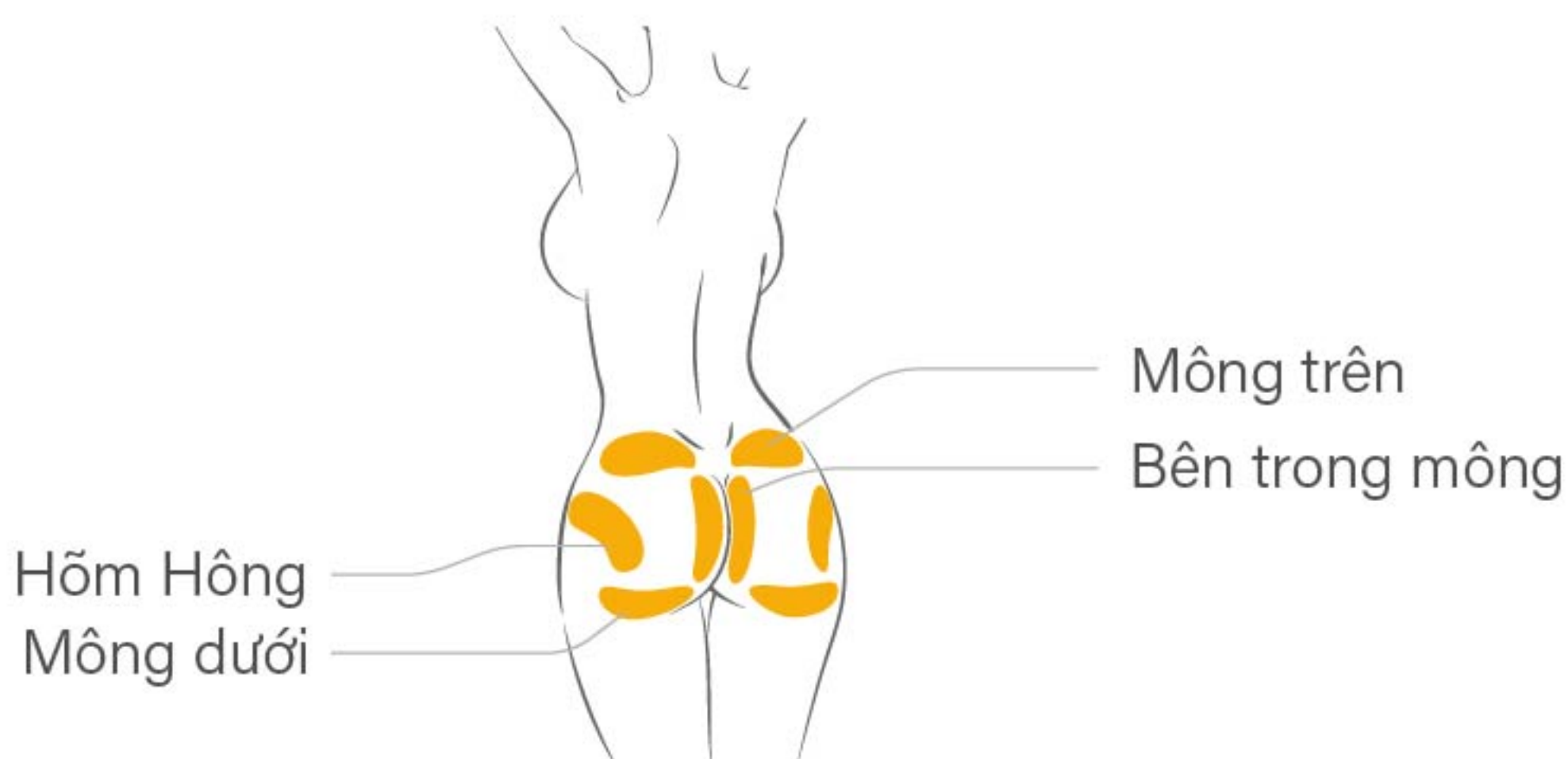

※ Nếu bệnh nhân có tình trạng da lỏng lẻo nghiêm trọng hoặc bị sụp cơ nặng ở mông, không nên tiêm chất làm đầy axit hyaluronic vào phần dưới của mông.

Vị trí tiêm điển hình

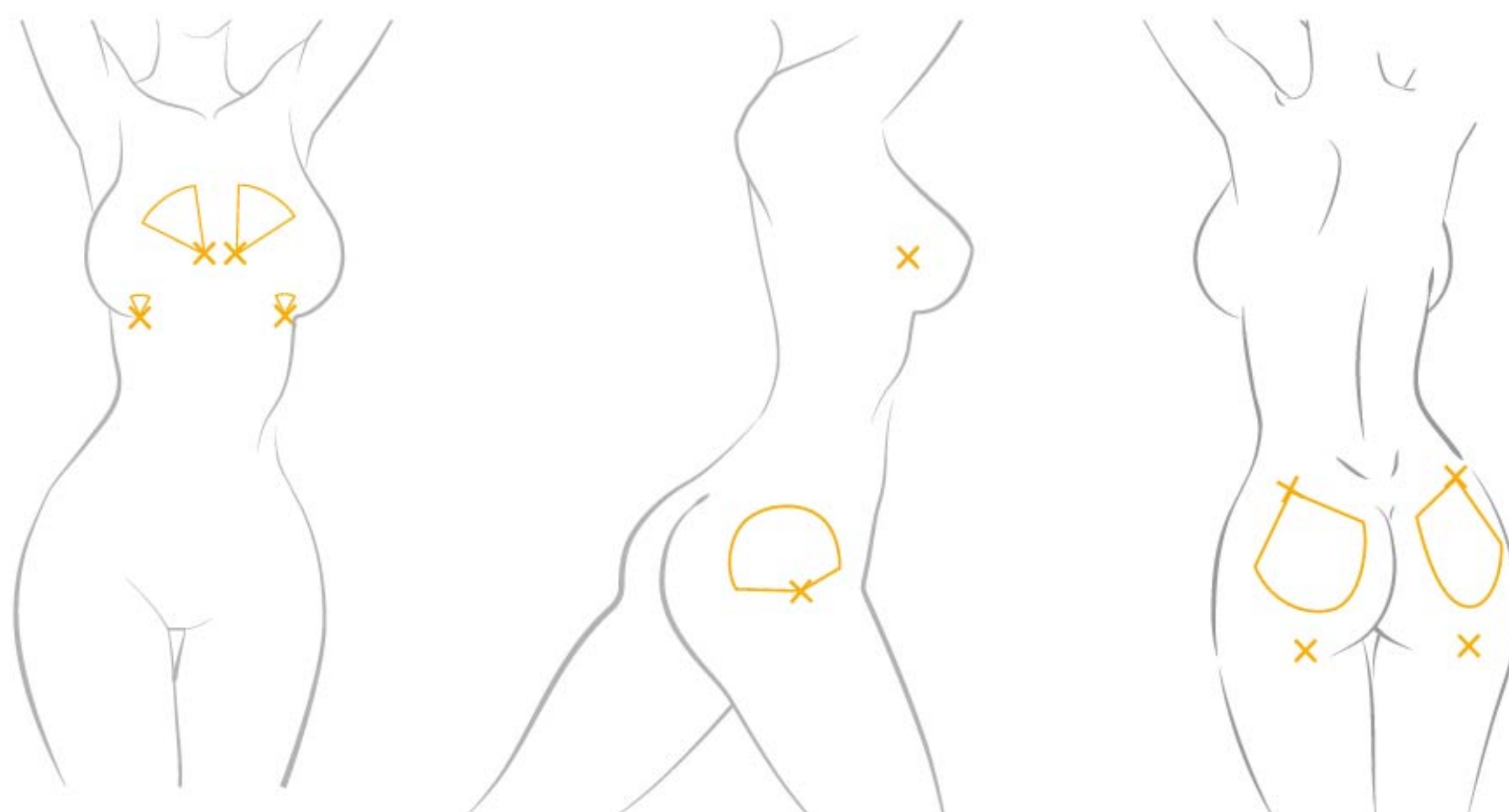

Khuyến nghị nên sử dụng Cannula

- Nâng ngực — 14G 90mm micro-cannula recommended
- Nâng ngực trên — 20G 70mm micro-cannula recommended buttocks
- Nâng mông — 18G 70mm or 18G 90mm micro-cannula recommended

Quy trình xử lý

- Kiểm tra xem bệnh nhân có đủ điều kiện để thực hiện liệu trình hay không.
- Rửa vùng điều trị bằng xà phòng và nước.
- Khử trùng vùng điều trị bằng cồn hoặc chất khử trùng khác.
- Tiêm chất làm đầy cơ thể LEXYFILL HA vào mặt phẳng mô dưới da của vùng điều trị bằng kim hoặc cannula có thành mỏng.
- Khi tiêm xong, vùng điều trị phải được xoa bóp nhẹ nhàng để phù hợp với đường viền của các mô xung quanh.

※ Hướng dẫn sử dụng chi tiết được cung cấp trong sách hướng dẫn kèm theo sản phẩm.

Thận trọng sau khi điều trị

- Chườm túi nước đá lên vùng điều trị trong 15 đến 20 phút mỗi lần, vài lần trong ngày để giúp giảm sưng và bầm tím.
- Tránh gây áp lực lên vùng điều trị trong ít nhất 24 giờ sau khi thực hiện
- Tránh ít nhất 48 giờ sau khi làm thủ thuật
 - Hoạt động thể chất hoặc tập thể dục vất vả
 - Rượu và hút thuốc
 - Phòng tắm nước nóng và phòng tắm hơi, tắm nước nóng

※ Hướng dẫn sử dụng chi tiết được cung cấp trong sách hướng dẫn kèm theo sản phẩm.

Làm đầy hơn nữa bởi LEXYFILL VOLUME CREAM

Chúng tôi tạo ra ^{AETERDERM®} **LEXYFILL VOLUME CREAM**

như một sự hợp tác hiệu quả với ^{AETERDERM®} **LEXYFILL**
bằng cách phát triển công thức tối ưu để tối đa hóa hiệu quả
điều trị và ngăn ngừa tác dụng phụ của chất làm đầy.

■ Hiệu quả 1

Tăng thể tích cơ thể của bạn
thông qua tăng sinh tế bào
mỡ bằng VOLUFILINE

■ Hiệu quả 2

Làm cho da săn chắc và đàn hồi
hơn nhờ quá trình sinh tổng hợp
Collagen & Elastin

■ Hiệu quả 3

Phòng chống rạn da & chữa lành
vết rạn da

■ Hiệu quả 4

Dưỡng ẩm & làm dịu da



Thoa kem này nhẹ nhàng lên vùng
điều trị LEXYFILL hai lần một ngày,
mỗi lần 10 ~ 20 phút.

Nó tối đa hóa hiệu quả của việc điều
trị chất làm đầy cơ thể, duy trì thể tích
trên lâu dài và tạo hình dáng tự nhiên
hơn thông qua sự tăng sinh tự nhiên
của các tế bào mỡ.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

Fill Your Luxury Beauty



Hiệu quả 1

Tăng sinh tế bào mỡ bằng VOLUFILINETM

Nó chứa 50.000 ppm VOLUFILINE, một nguyên liệu thô được cấp bằng sáng chế quốc tế đã được thử nghiệm lâm sàng về khả năng tăng sinh tế bào mỡ.

AETERDERM[®]
LEXYFILL VOLUME CREAM



VOLUFILINETM



Sarsasapogenin

Kích hoạt sự tăng sinh tế bào mỡ

Kích thích hấp thu lipid bằng cách kích hoạt con đường glucose/fructose




Polyisobutene hydro hóa


Cung cấp dầu

Nghiên cứu lâm sàng của VOLUFILINETM

Tỷ lệ tăng tế bào mỡ T1 với VOLUFILINE

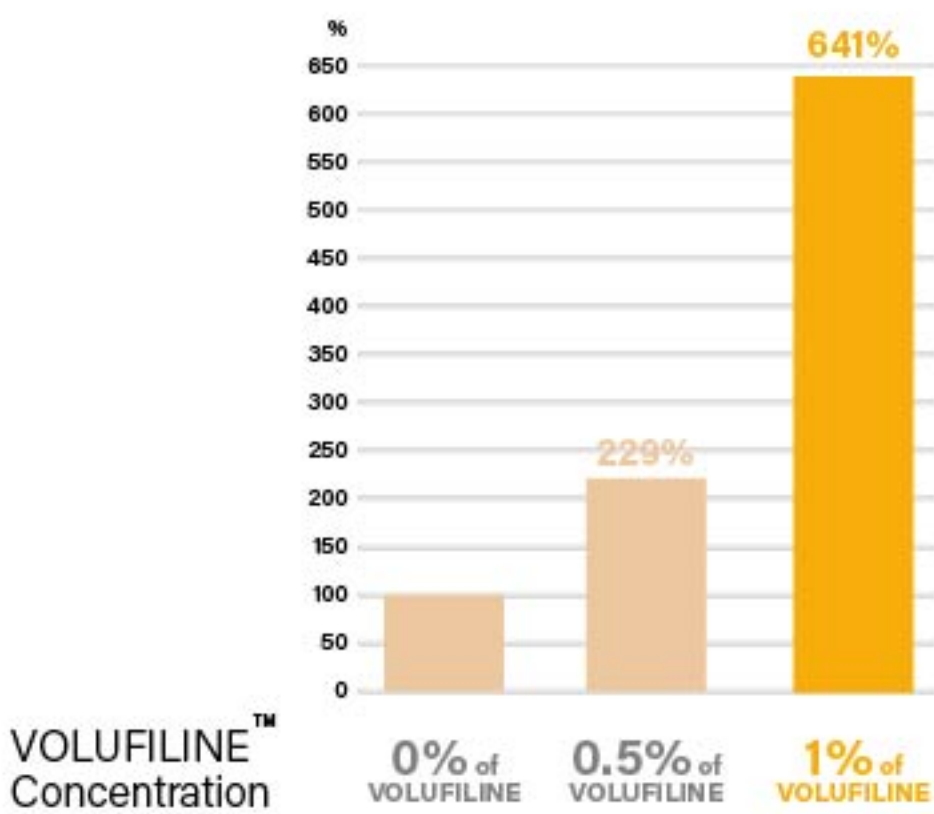


Tốc độ tăng thể tích tế bào T2 với VOLUFILINE

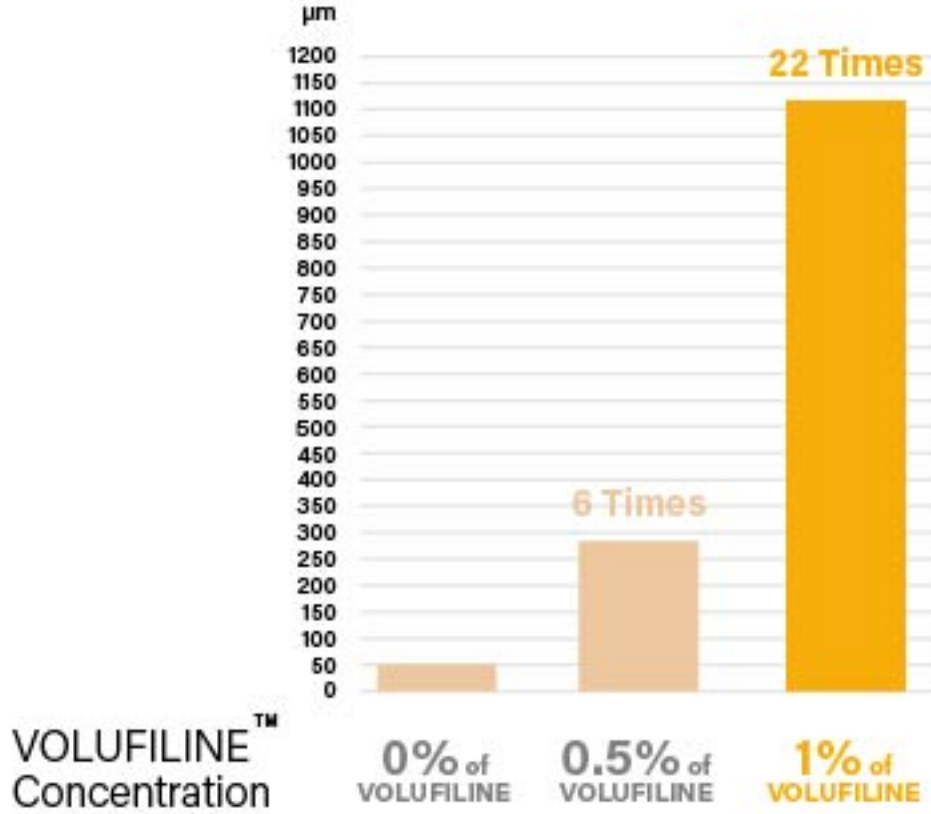


References) Sci Rep 2024;(22)

T1 Ảnh hiển vi tế bào mỡ bằng VOLUFILINE


0% of VOLUFILINE

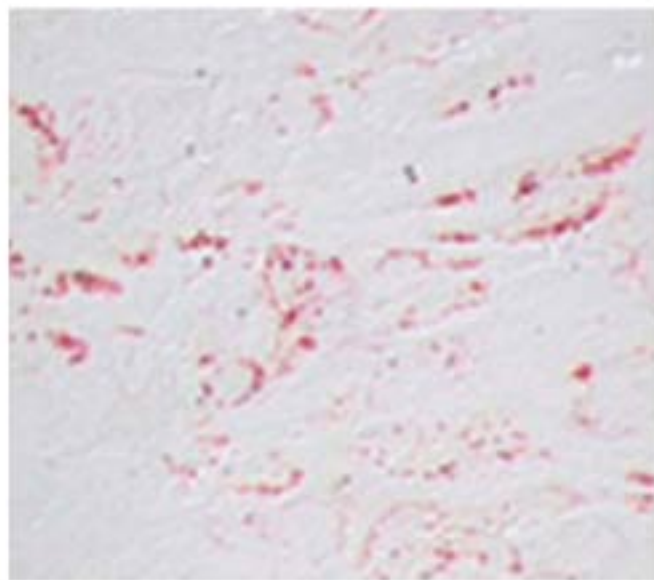

0.5% of VOLUFILINE

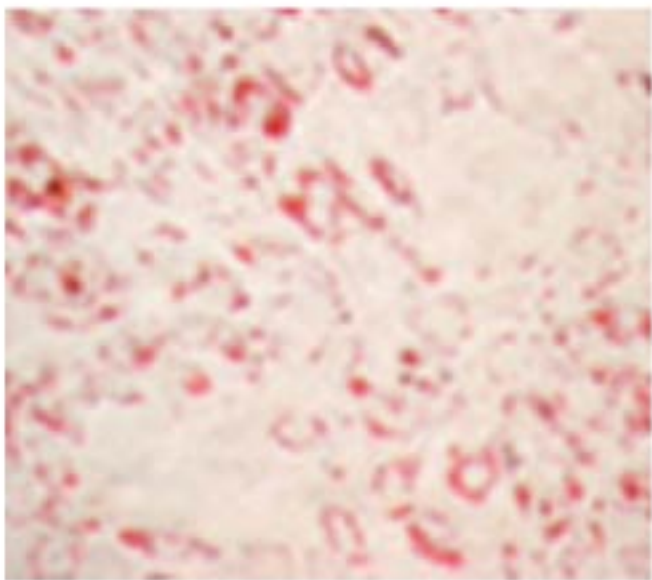

1% of VOLUFILINE

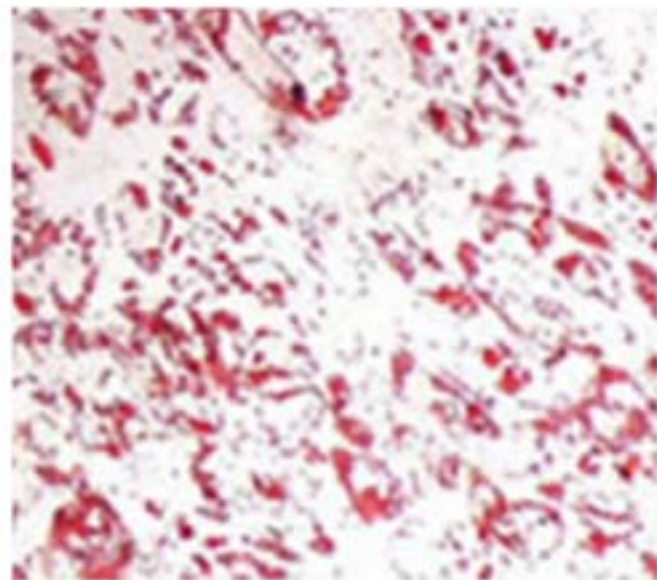


Red colored Fat cells




References) Sci Rep 2024;(27)

Ảnh MRI T2 của tế bào mỡ bằng VOLUFILINE

0% of VOLUFILINE

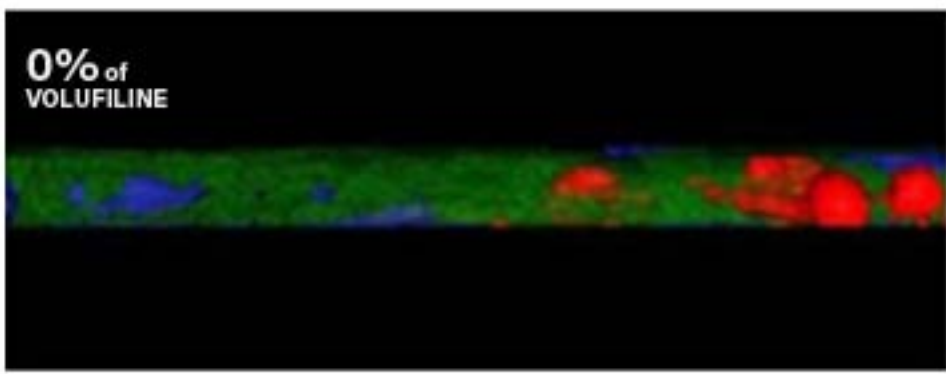

1% of VOLUFILINE

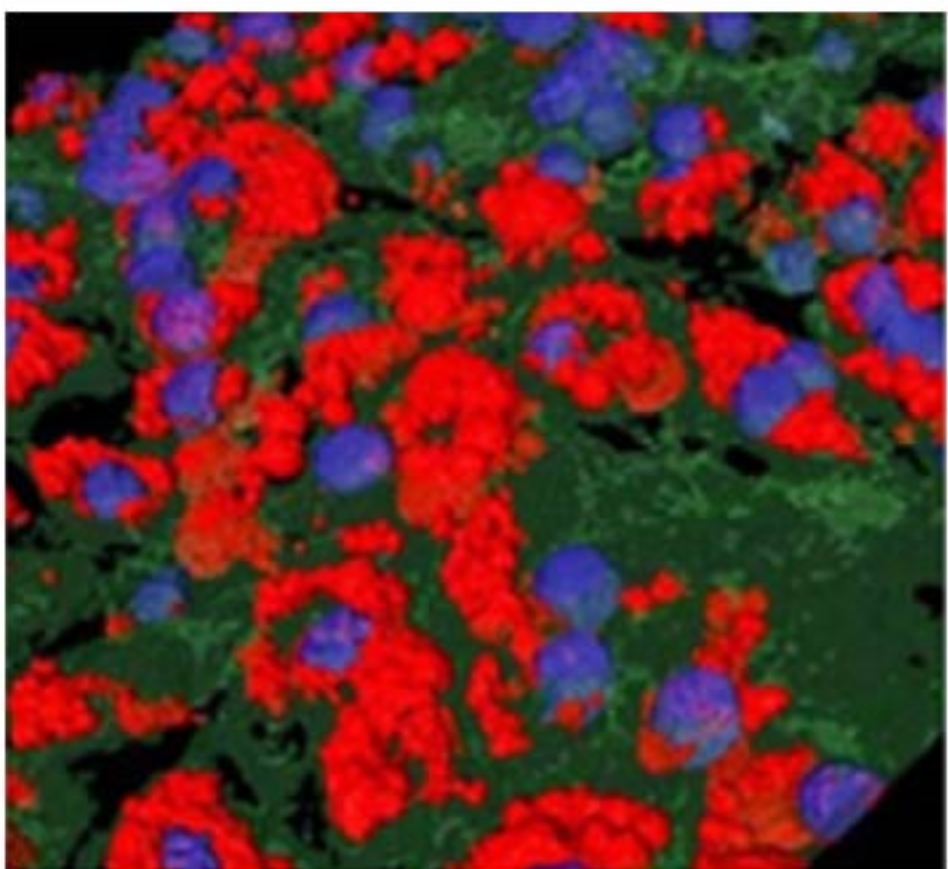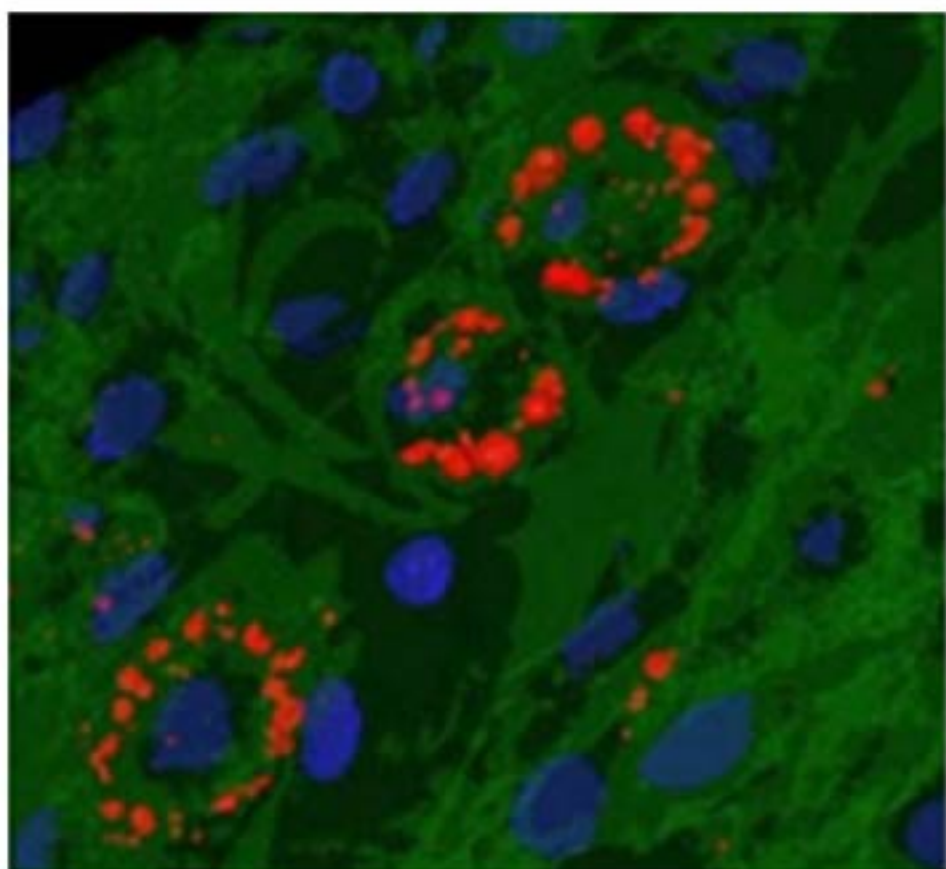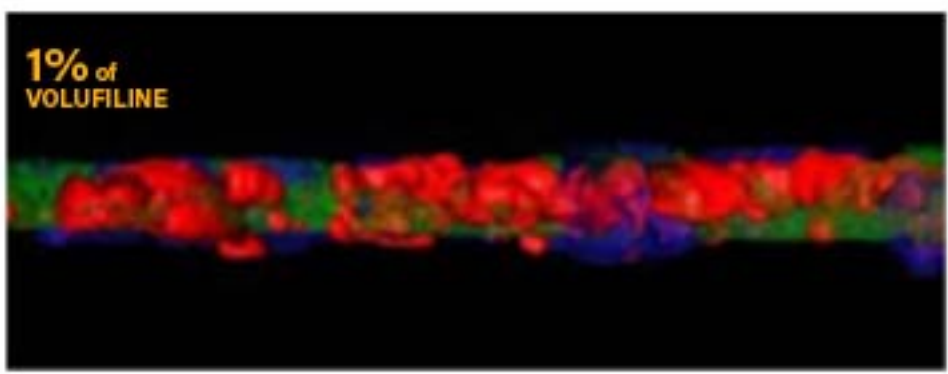


Fat cells

References) Sci Rep 2024;(31)

Hiệu quả 2

Sinh tổng hợp Collagen & Elastin


So với axit hyaluronic được làm đầy qua chất làm đầy, không có đủ collagen và Elastin để hỗ trợ nên độ đàn hồi và khả năng giữ nếp có thể yếu hơn. LEXYFI LL VOLUME CREAM giải quyết cơ bản những vấn đề này bằng độ đàn hồi.

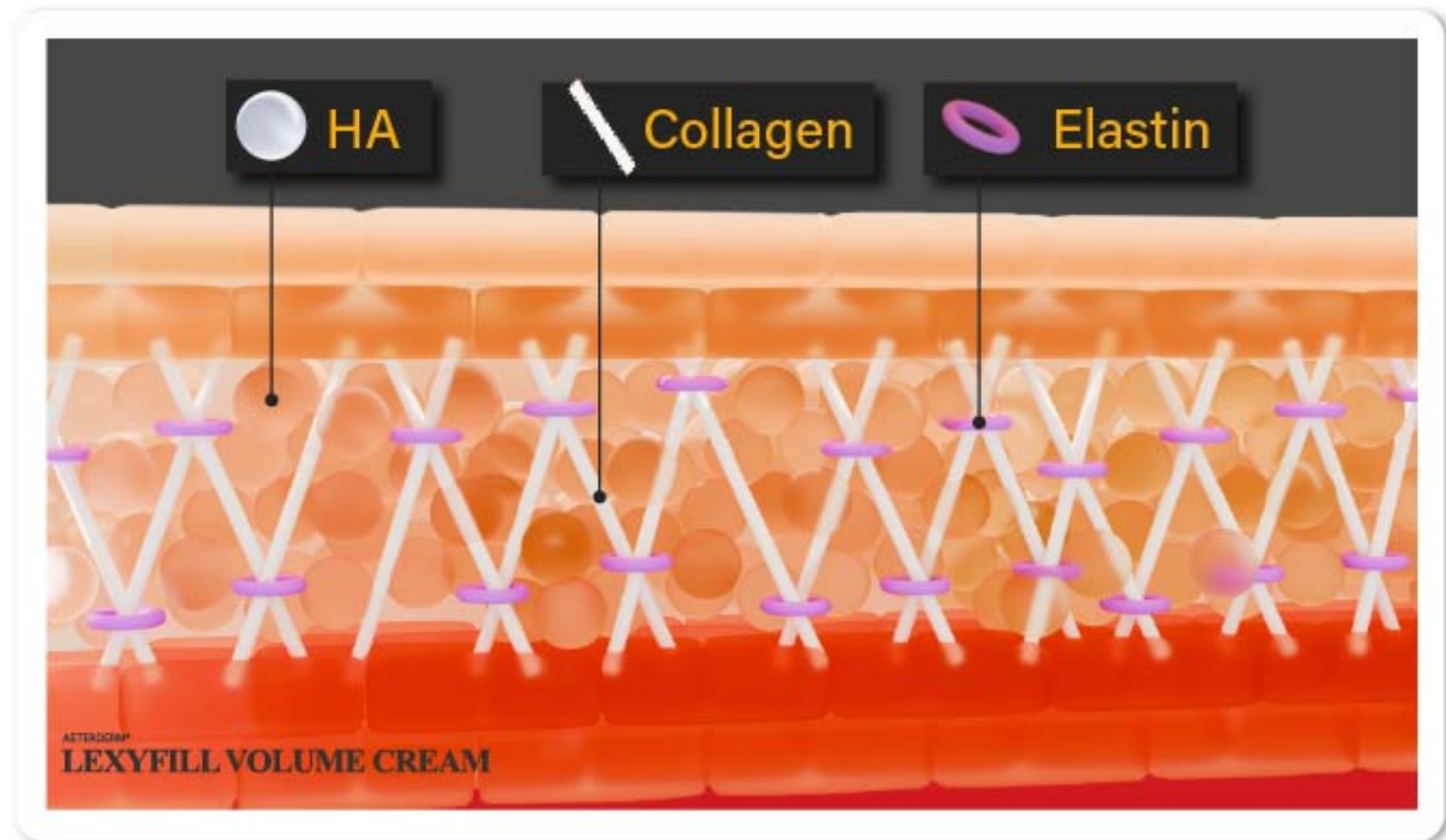


Cấu trúc mô da thông thường

Ba thành phần chính của da

- Hyaluronic Acid
- Collagen
- Elastin

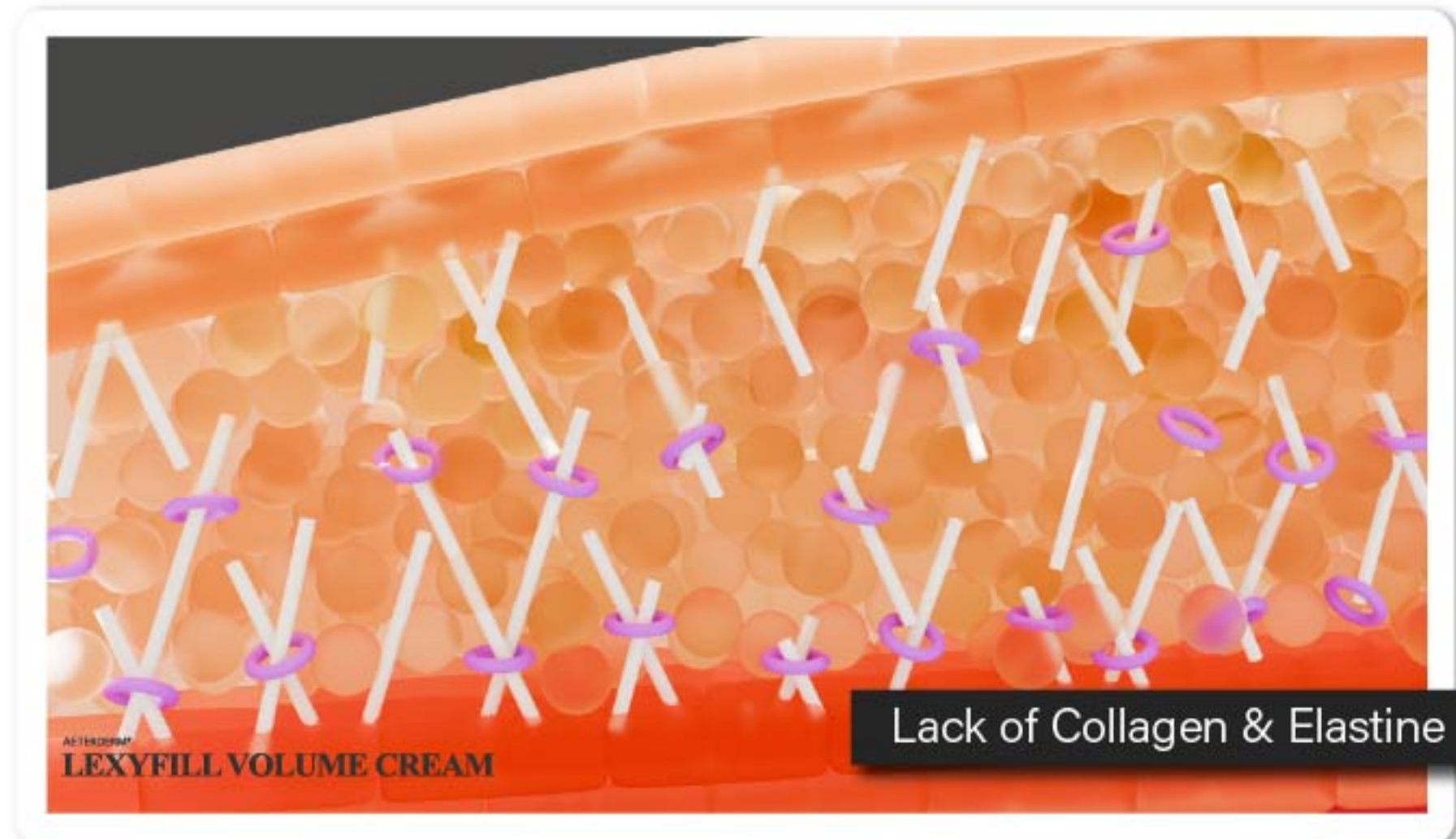

Bổ sung HA Filler vào da

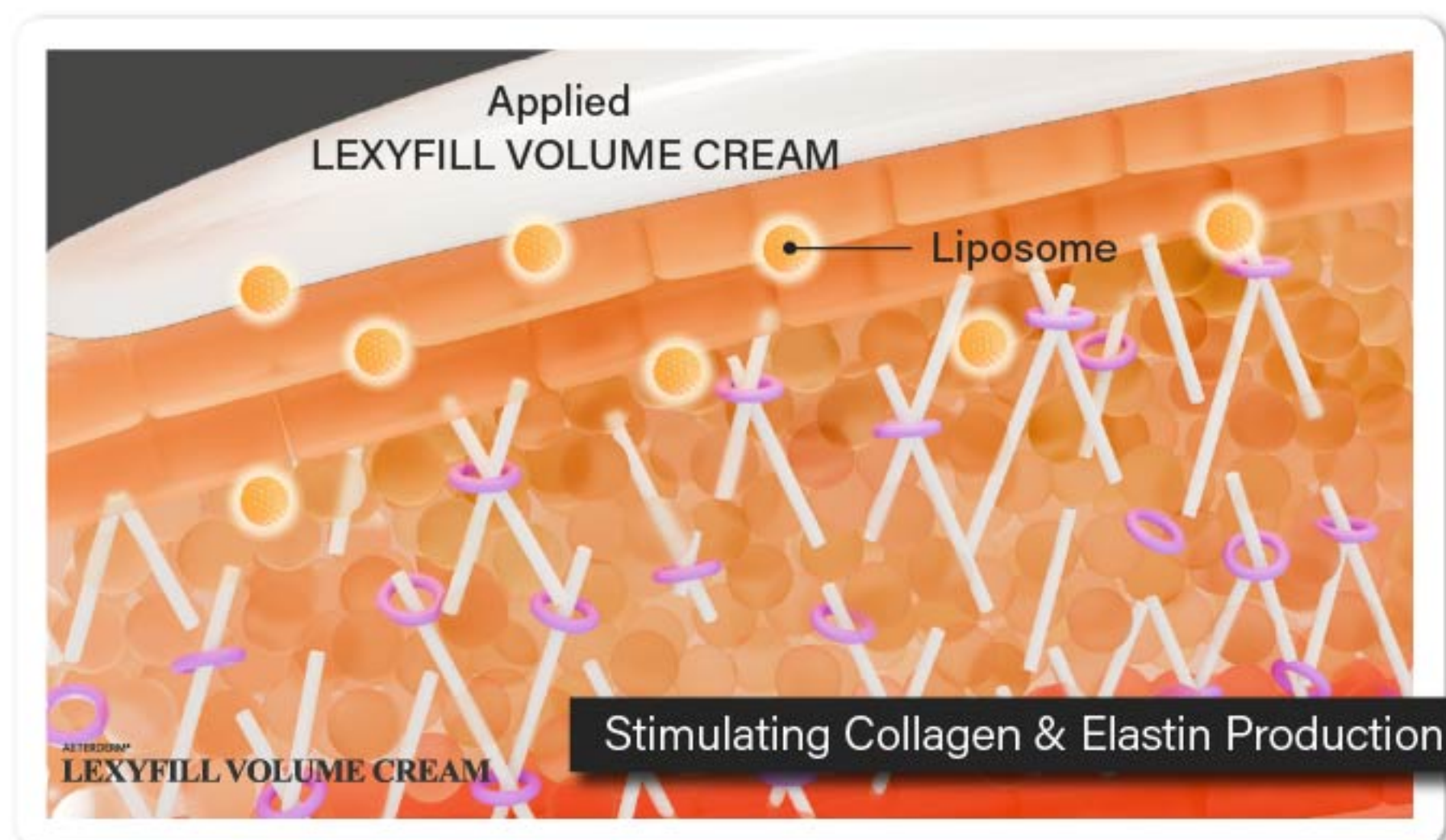


Kích thích sản xuất Collagen & Elastin thông qua Liposome

⦿ Cấu trúc liposome




Cấu trúc liposome cho phép các hoạt chất thấm sâu vào da.

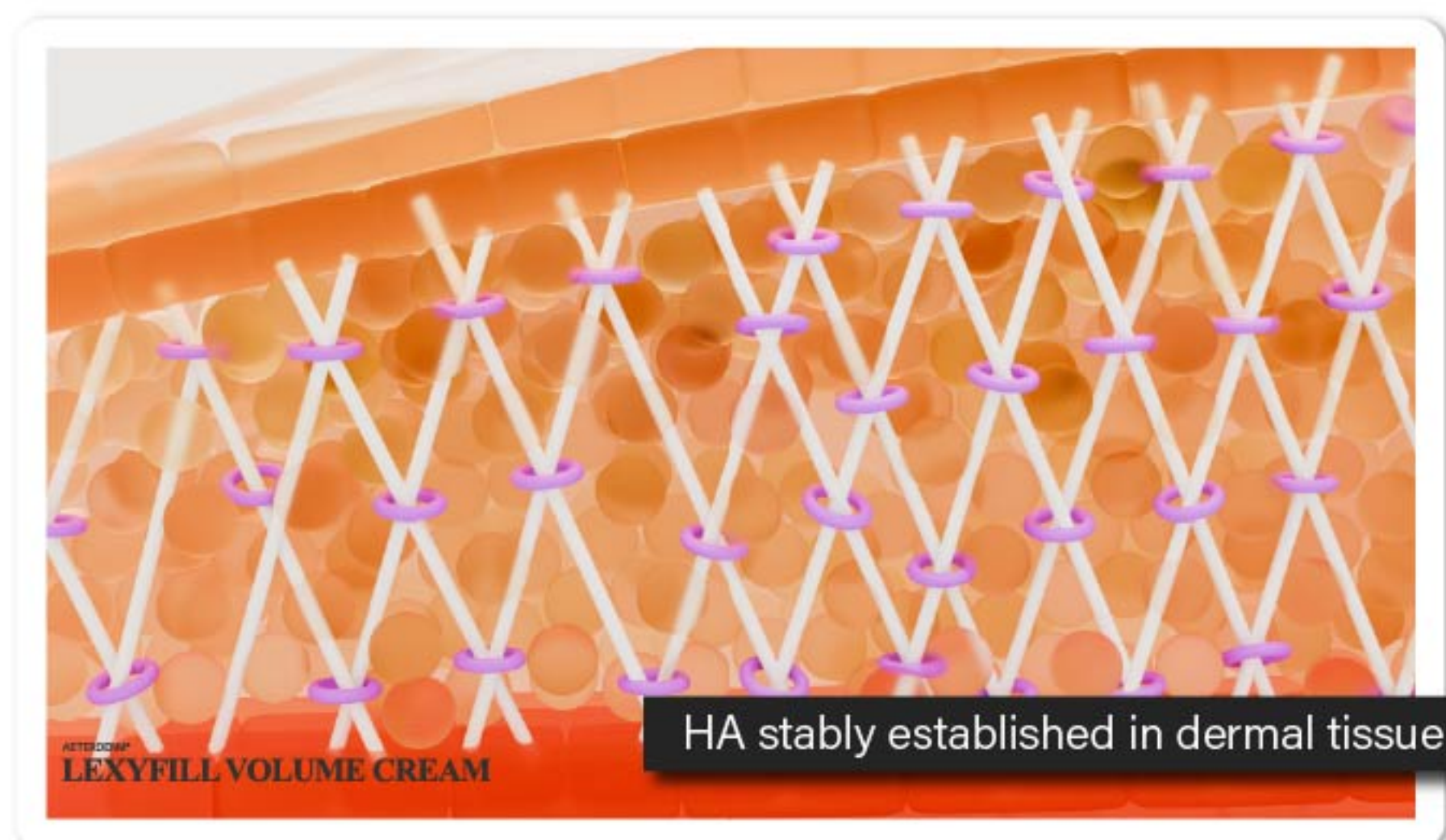

Làm cho da săn chắc và đàn hồi hơn.

Tăng cường độ đàn hồi cho da và duy trì chất làm đầy HA

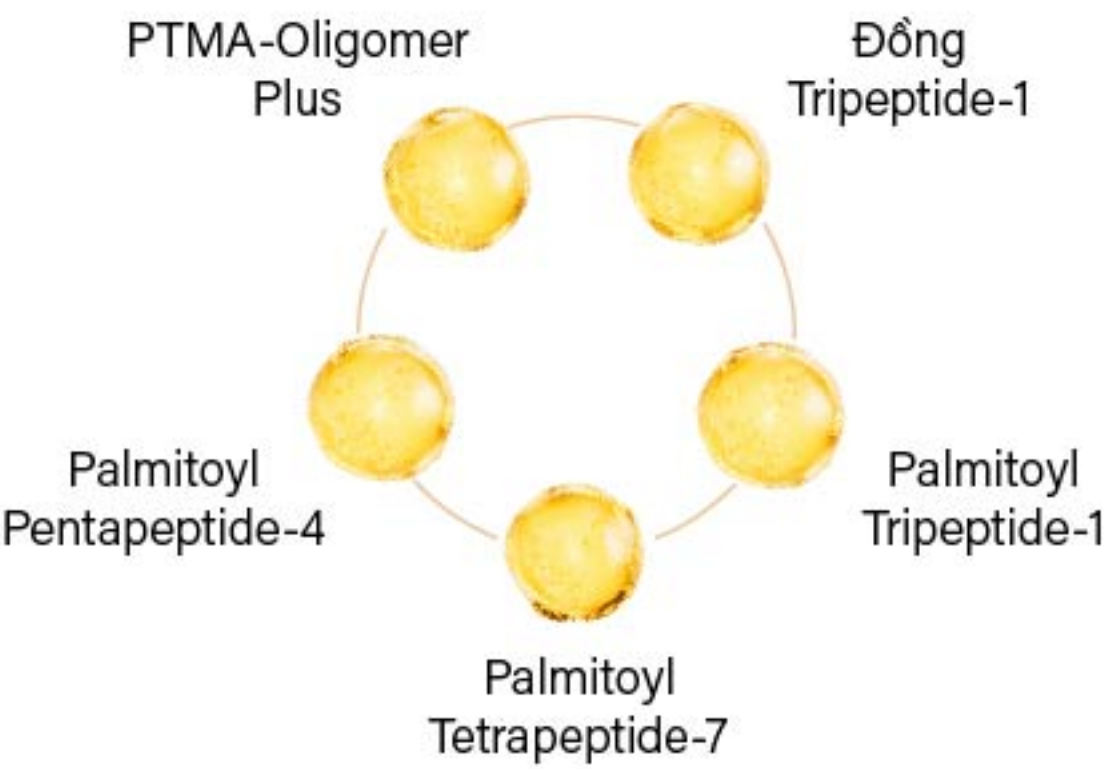

- ⦿ Tăng cường sinh tổng hợp Collagen & Elastin
- ⦿ Kích hoạt EGF (Yếu tố tăng trưởng biểu bì)

Hiệu quả 3

Phòng chống rạn da & chữa lành vết rạn da



Sau khi điều trị bằng bodyfiller, vết rạn da có thể xảy ra do thể tích tăng đột ngột.
KEM TĂNG LƯỢNG LEXYFILL đã được tạo ra như một công thức để giải quyết những vấn đề này.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Panthenol

Shea Butter

- ⦿ Tái tạo da
- ⦿ Loại bỏ Striae Rubra và ngăn ngừa sẹo

LEXYFILL VOLUME CREAM

Magnolia Bark Extract

Acetylhexapeptide-8

Palmitoyl Tetrapeptide-7

Palmitoyl Pentapeptide-4

Copper Tripeptide-1

- ⦿ Tăng cường hàng rào bảo vệ da (Tăng SPT)
- ⦿ Sửa chữa tổn thương da

Hiệu quả 4

Dưỡng ẩm & làm dịu da



Ngay cả khi quy trình được thực hiện bằng cách sử dụng cannula , sự kích thích của lớp da gây ra nhiệt, làm bay hơi độ ẩm của da và da khô dễ mất đi độ đàn hồi và để lại sẹo rạn da (Striae Distensae).

KEM TĂNG LƯỢNG LEXYFILL có công thức hiệu quả để ngăn chặn những tác dụng phụ này.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Allantoin

Phyto-Oligo

Phức hợp Ceracare AC 45

7 loại phân tử của Acid Hyaluronic

- ⦿ Dưỡng ẩm sâu
- ⦿ Ức chế sự bay hơi ẩm

Fill Your Luxury Beauty



AETERDERM®

LEXYFILL

[THÀNH PHẦN]

Axit hyaluronic liên kết ngang	_____	24 mg / mL
Hỗn hợp nước muối phôt-phat	_____	q.s.

[ĐÓNG GÓI]

60cc x 1 Lọ / Hộp

[BẢO QUẢN]

Được bảo quản ở nhiệt độ phòng (1~30°C) tránh ánh nắng trực tiếp.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[THÀNH PHẦN]

Water, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vinyl Dimethicone, Panthenol, C14-22 Alcohols, Ceramide NP, C12-20 Alkyl Glucoside, Dipropylene Glycol, Carbomer, Arginine, Xanthan Gum, Glyceryl Polyacrylate, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Hydrogenated Lecithin, Adenosine, Glyceryl Stearate, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Cholesterol, Ceramide NS, Ceramide AS, Ceramide AP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Althaea Rosea Root Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Glucose, Caulerpa Lentillifera Extract, Codium Fragile Extract, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Tocopherol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Potassium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramide EOP

[ĐÓNG GÓI]

150mL / HỘP