

AETERDERM®



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating



Language TH



AETERDERM®

PURIPDRN

AETERDERM®

PURIPDRM





กระตุ้น



ความชุ่มชื้น



บำรุง

กระตุ้นการสร้างโปรตีน



Niacinamide



PDRN

Poly Deoxy Ribo
Nucleotide




HA

Hyaluronic Acid

สร้างผิวให้แข็งแรง & อ่อนเยาว์

Skin Structure

Purified PDRN ที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์จะทำหน้าที่เป็นแหล่ง DNA โดยตรง ช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูผิวด้วยตัวเองตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นกรดนิวคลีอิกชนิดที่มีความสำคัญมาก ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจน อีลาสติน และเซลล์ผิว

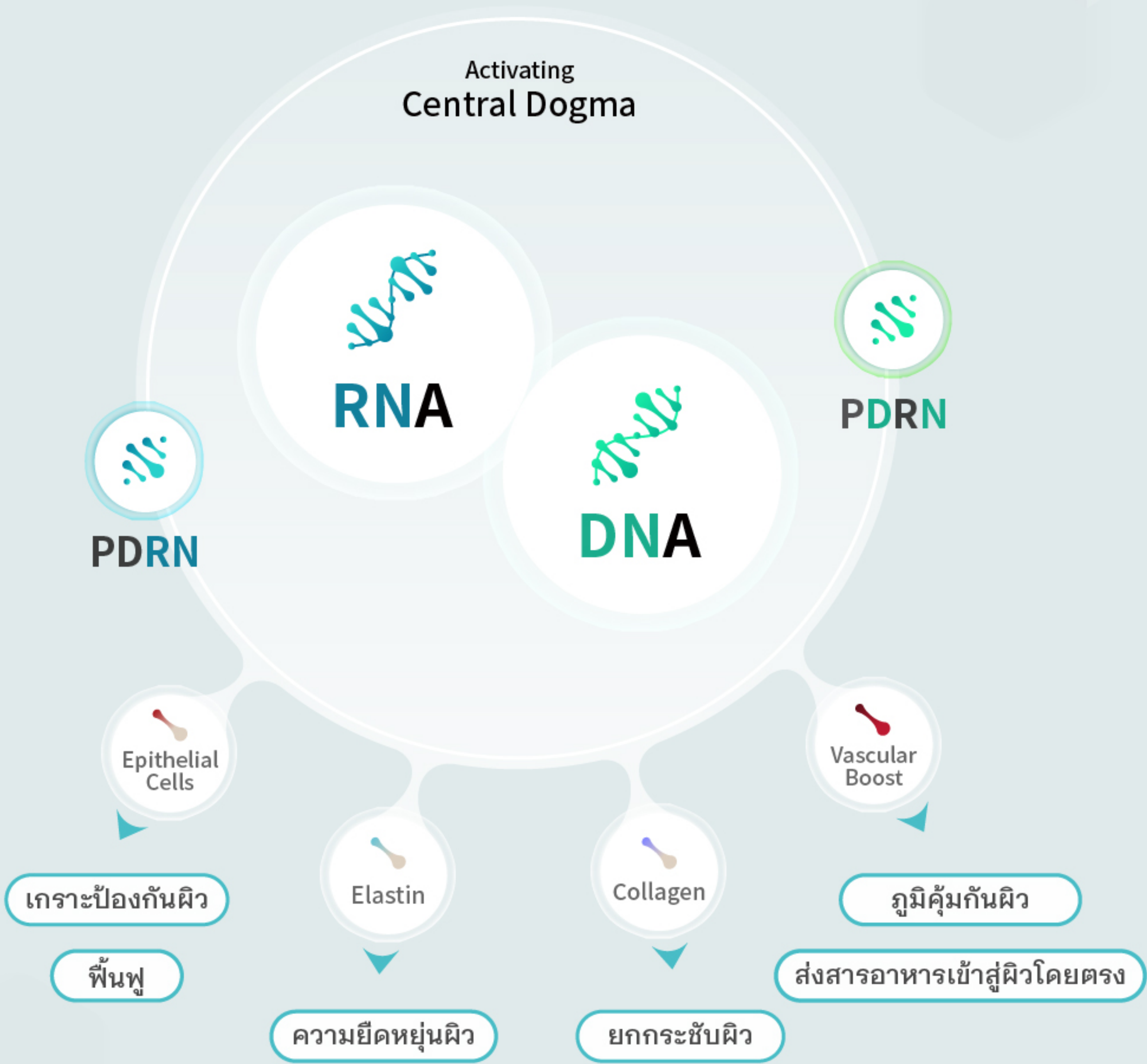

หากร่างกายไม่มีกรดนิวคลีอิกอย่างเพียงพอ เซลล์จะสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองแล้วจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง และสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการชราและตายลง

ชุ่มชื้น & ปลอดภัยผิว

Skin Texture

กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid) ใน PURI PDRN สามารถดูดซับและกักเก็บน้ำได้มากถึงหลายเท่าด้วยตัวเอง จึงช่วยให้ผิวและเซลล์ผิวคงความชุ่มชื้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ผิวเรียบเนียน & กระจ่างใสขึ้น

Skin Tone

ไนอะซิनाไมด์ (Niacinamide) ใน PURI PDRN ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน ทำให้สีผิวดูกระจ่างใส และสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น


ไนอะซิनाไมด์ ไนอะซิनाไมด์ยังช่วยเสริมการทำงานโดยรวมของผิว เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิวหลายด้านจาก **purified PDRN**.



ผลลัพธ์จากการทดลองทางการแพทย์

ข้อมูลทางการแพทย์รวบรวมในช่วงเวลา 4 เดือน
หลังจากทำหัตถการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเว้นช่วงทุก 2 สัปดาห์ และมีระยะติดตามผลอีก 8 สัปดาห์

ความหนาแน่นของผิว

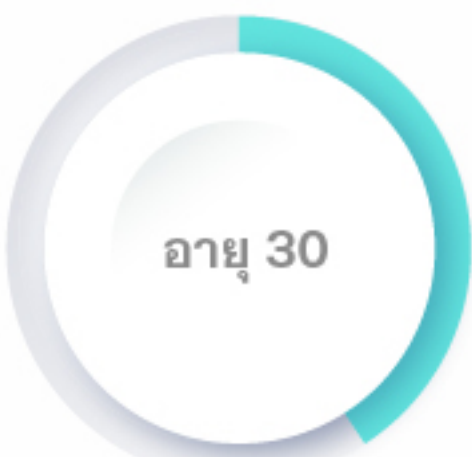


ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
↑ **41.85%**




ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
↑ **64.85%**

แสดงค่าความหนาแน่นของผิวก่อนและหลังการรักษา(SD)

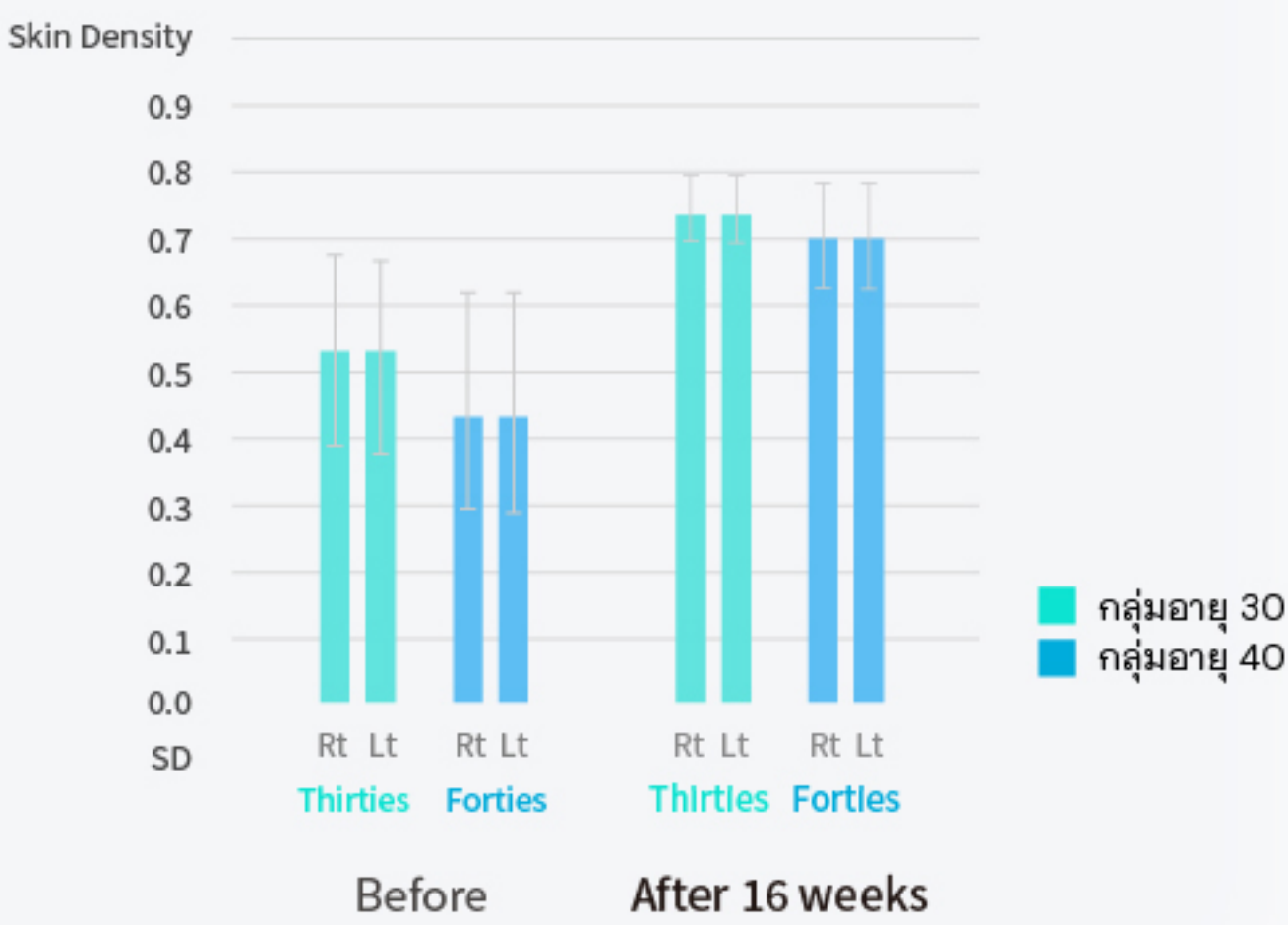


วัดด้วยเครื่อง OCT (Optical Coherence Tomography)


Before

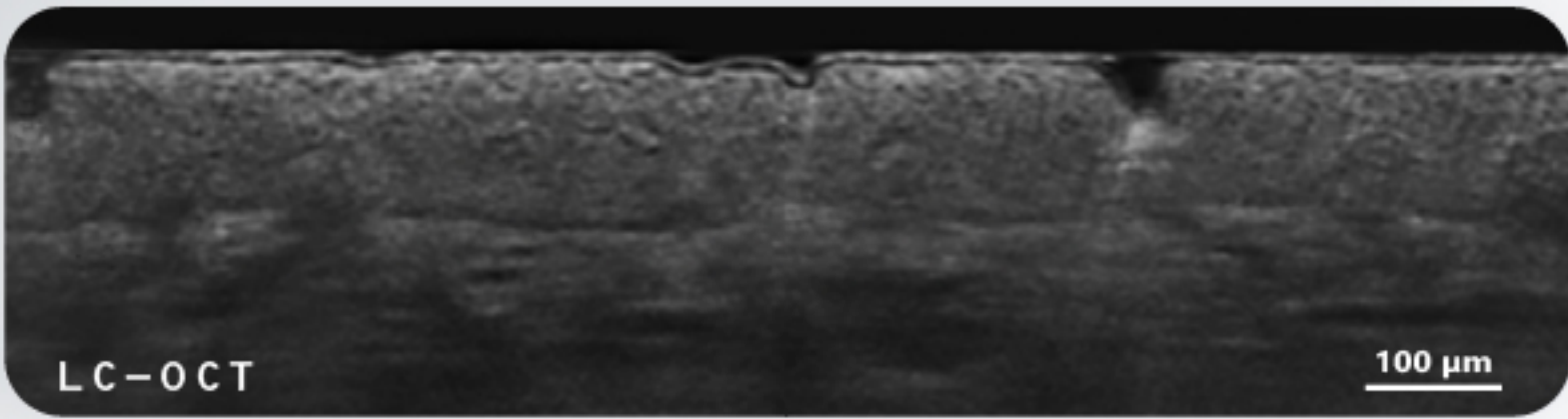

หลังจากการทำ
2 ครั้ง

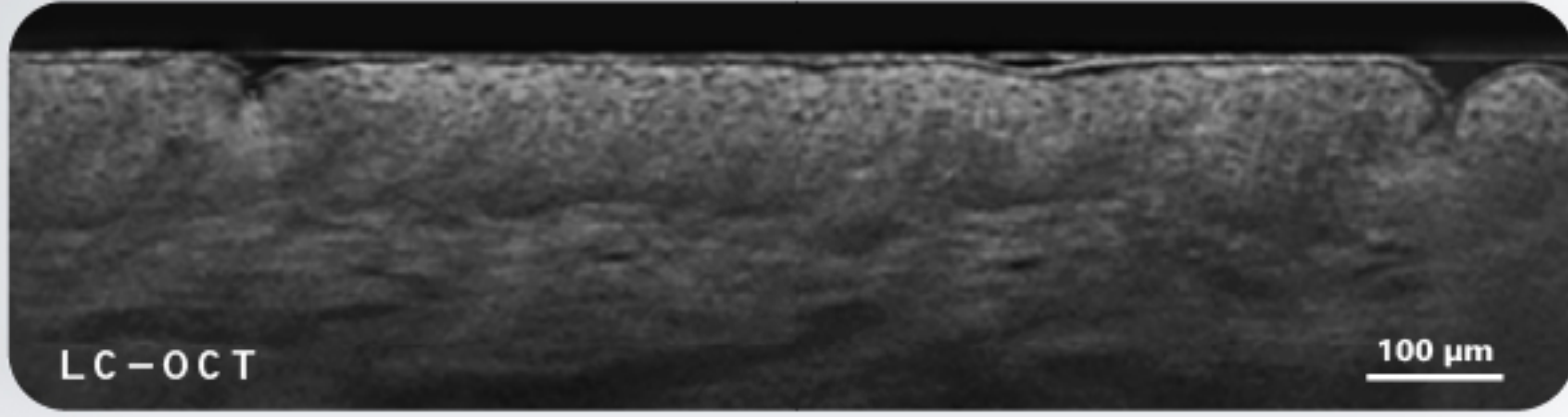

หลังจากการทำ 4 ครั้ง
และผ่านไป 8 สัปดาห์

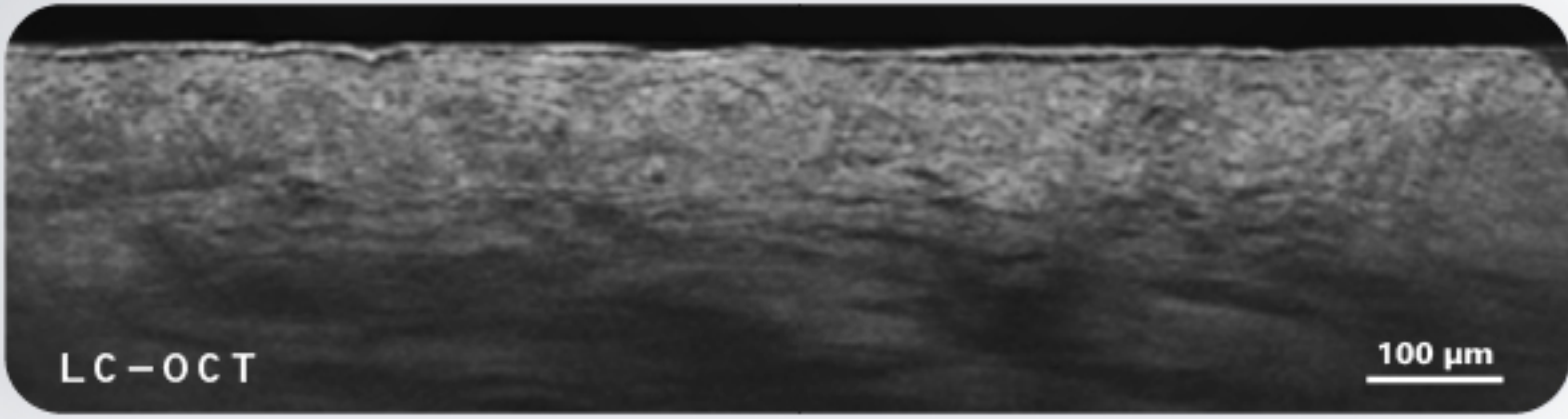


ภาพสแกนนี้ถ่ายบริเวณใต้โหนกแก้ม โดยอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย
จากระดับไมโครเมตร


ลดเลือนริ้วรอย




ลดความลึกของริ้วรอยในแนวตั้ง (µg)

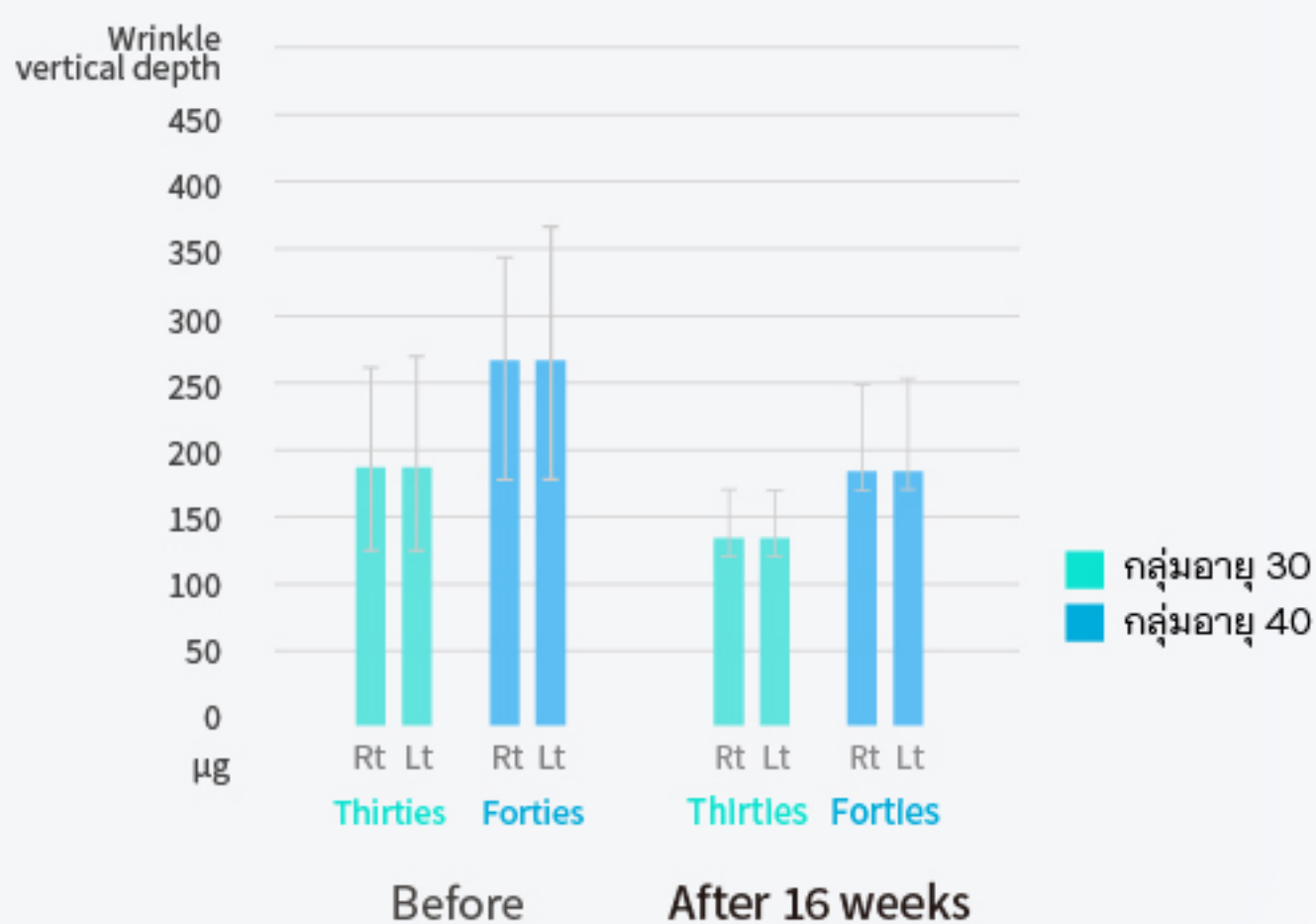


Before

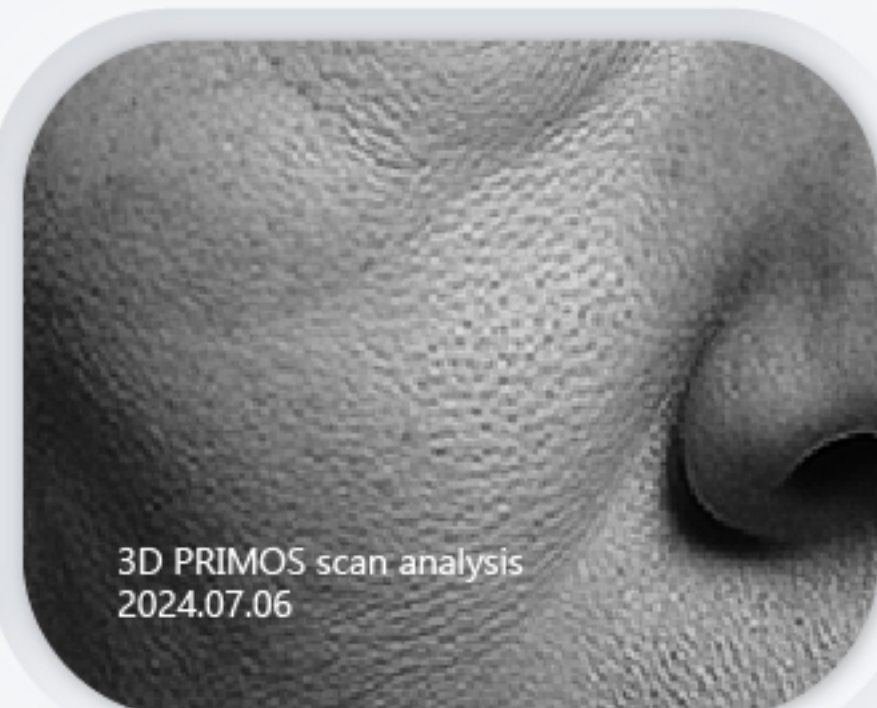


After 17 weeks

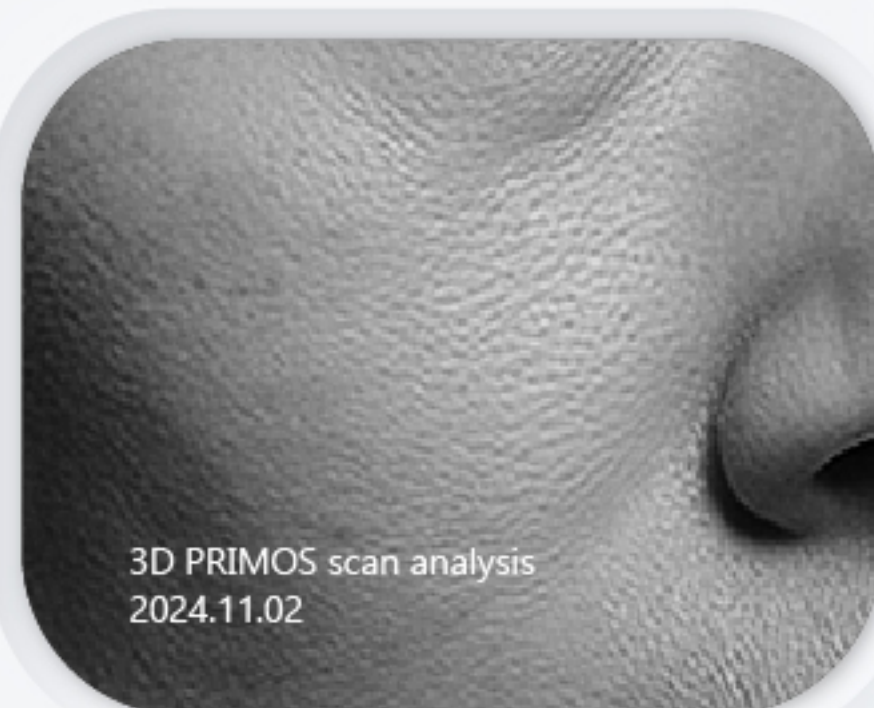

Before

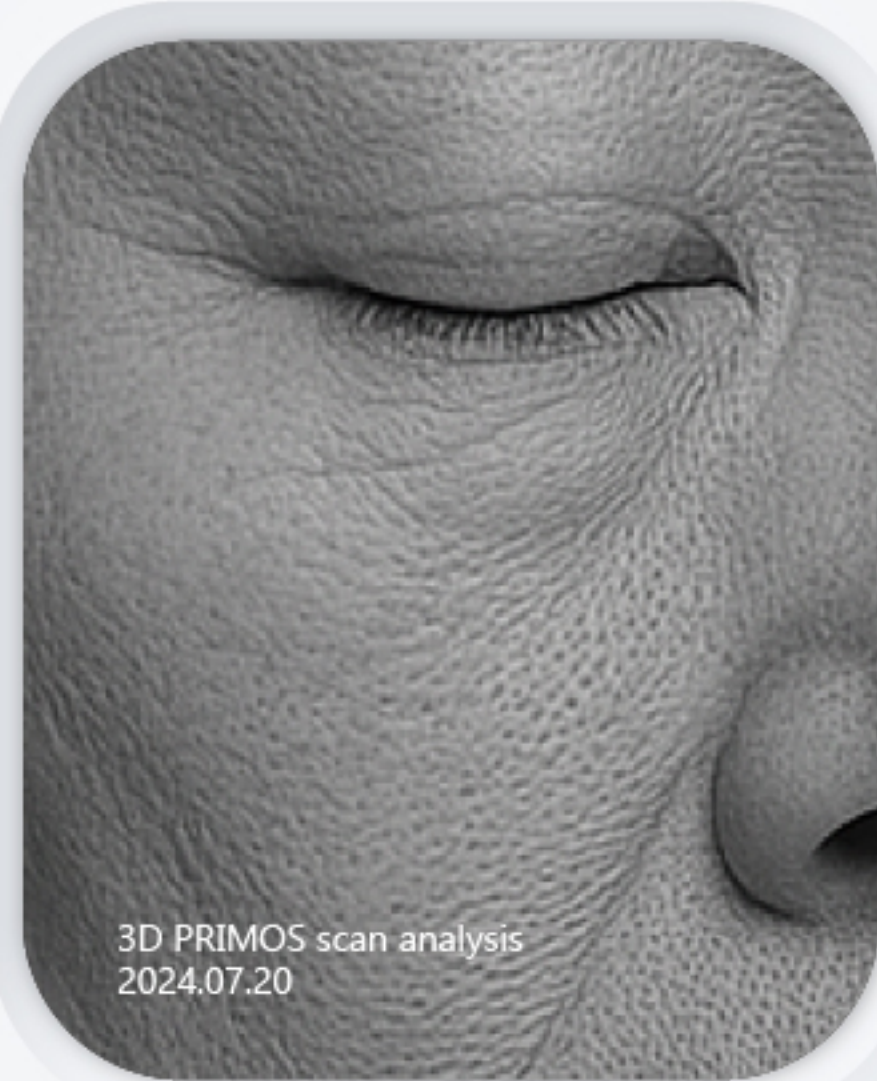

After 16 weeks

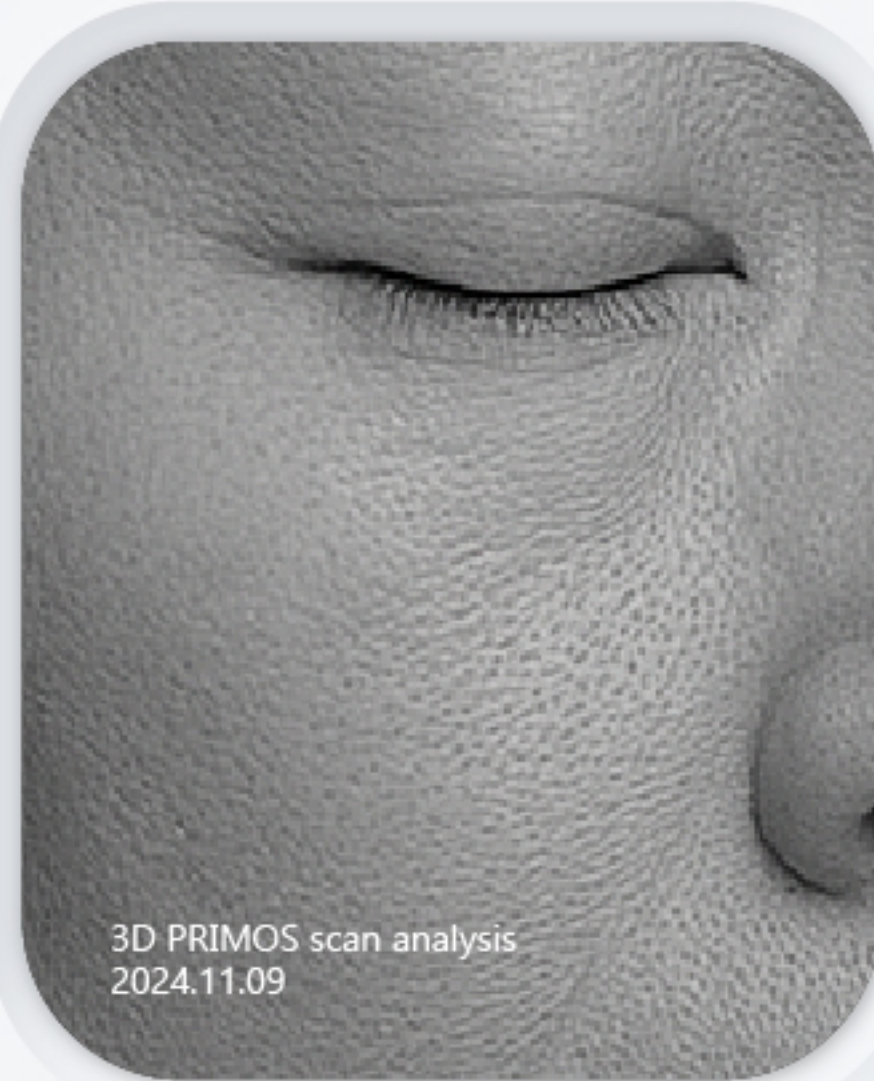

ใช้ความลึกของริ้วรอยเป็นตัวชี้วัดหลักเพราะริ้วรอยลึกมักมีระยะเวลานานกว่าและสังเกตเห็นได้ชัดเจน

ยกกระชับผิว



มีการยกกระชับเฉลี่ยที่ระดับ


↑ **2.75mm**



มีการยกกระชับเฉลี่ยที่ระดับ


↑ **3.11mm**

ความสูงของการยกกระชับผิว (mm)

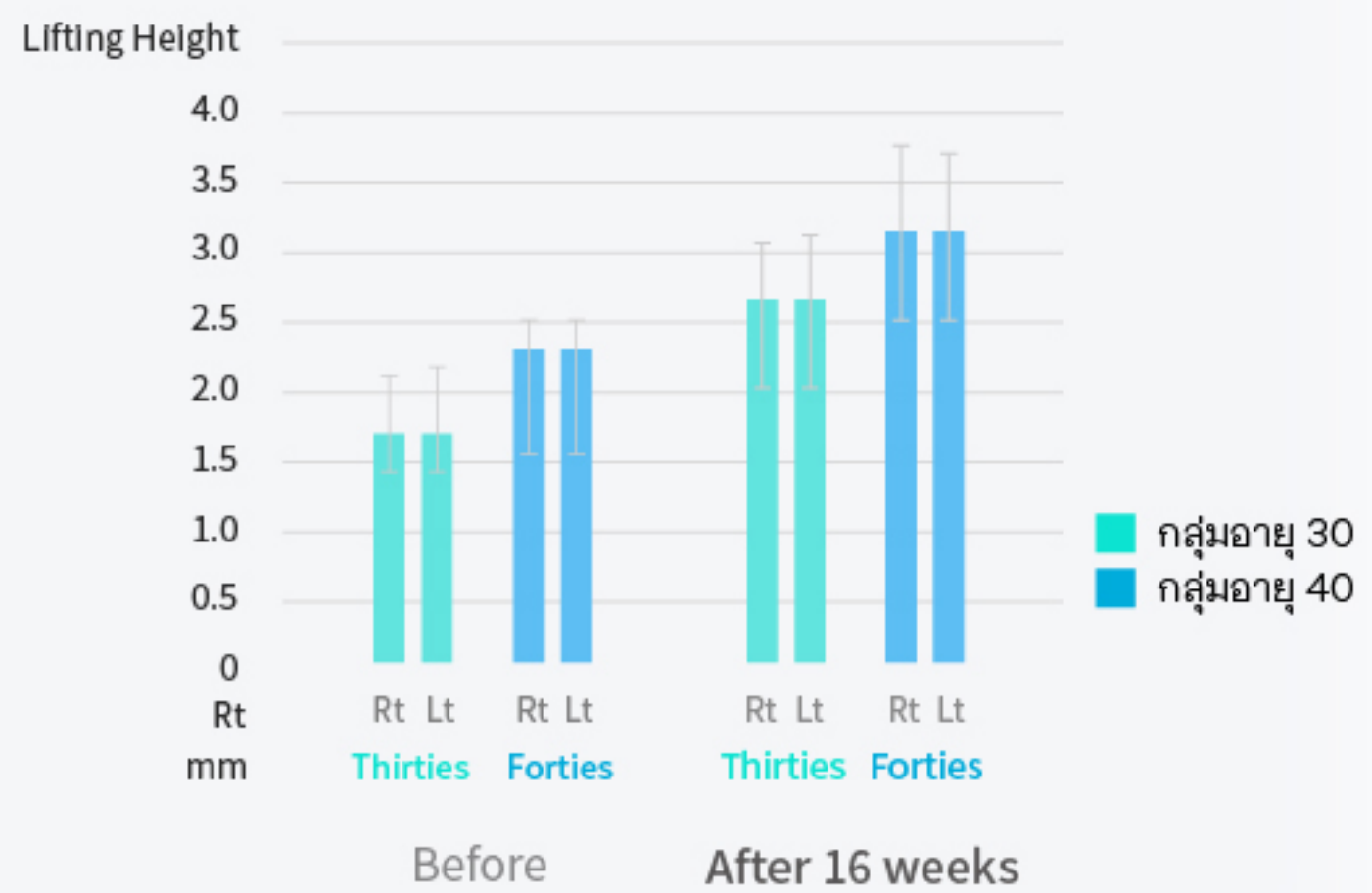


PRIMOS 3D: การวิเคราะห์พื้นผิวและความลึกของผิวหนังแบบ 3 มิติ

Before

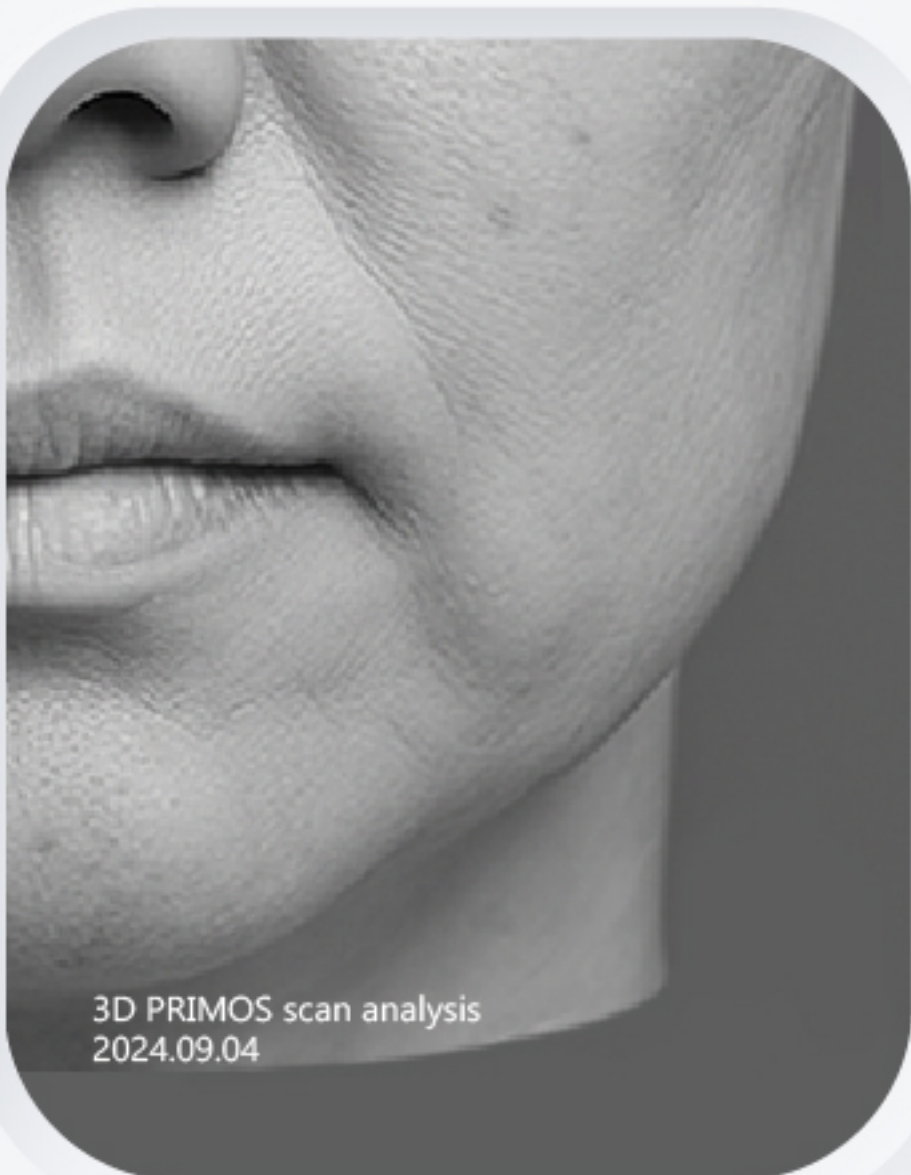

After 17 weeks

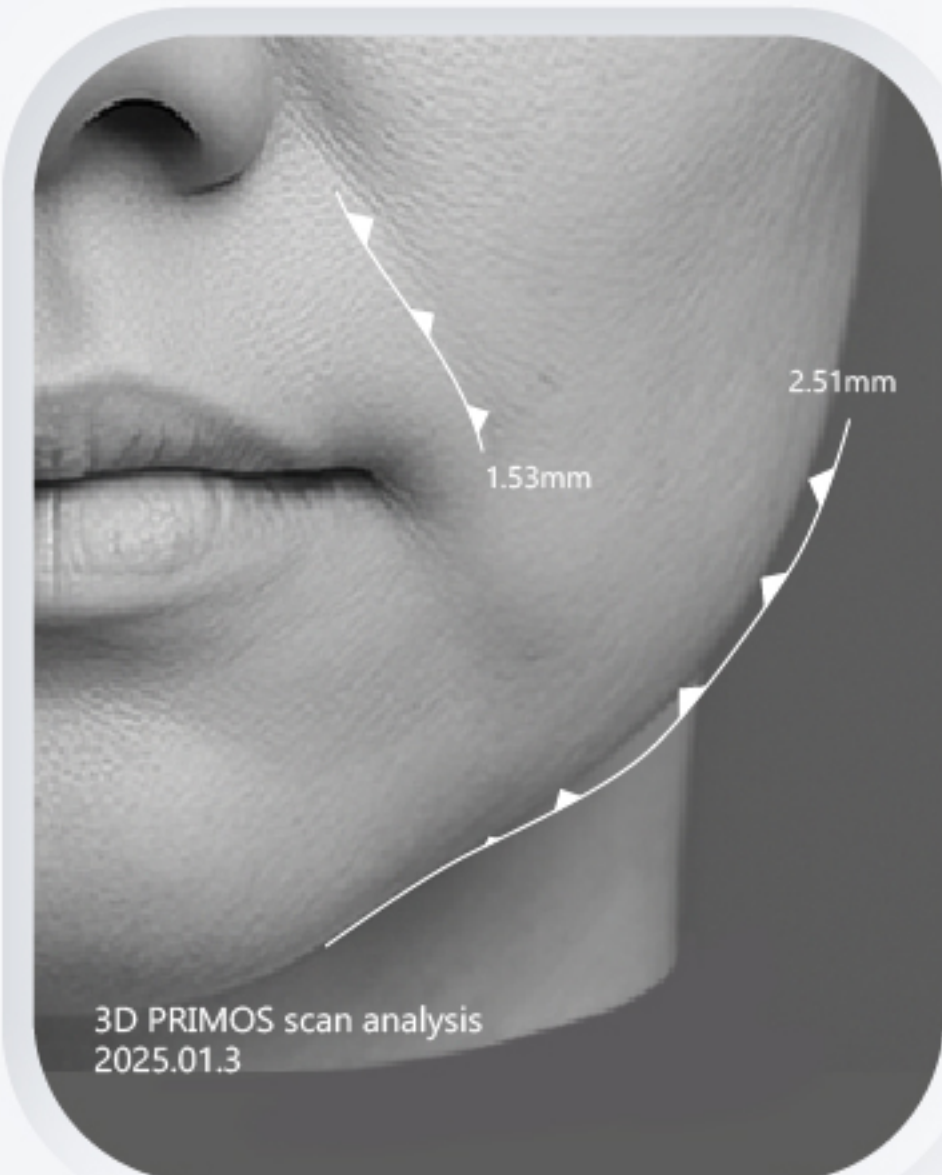

ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและโครงหน้า ที่ถูกวัดแบบมีปริมาณ โดยวัดจากระยะทางเชิงเส้นที่สั้นที่สุดด้วยโมเดล 3 มิติจากระบบ PRIMOS 3D

การสะสมของเม็ดสีเมลานิน



ลดลงโดยเฉลี่ย


↓ **18.40%**




ลดลงโดยเฉลี่ย

↓ **18.15%**

แสดงความเข้มข้นของเมลานินภายในชั้นหนังกำพวด (μg/mg)

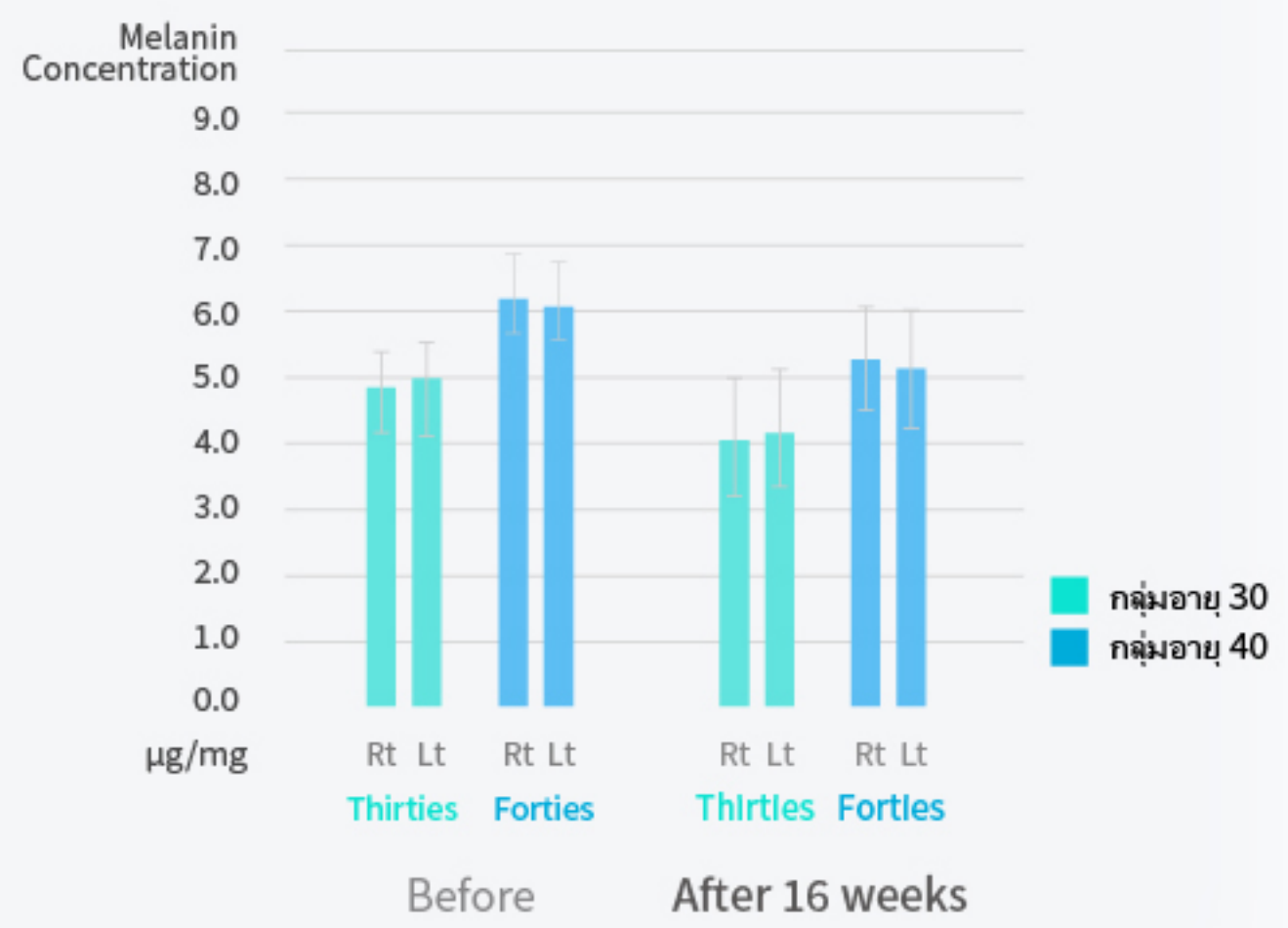


ผลลัพธ์การปรับโทนผิวให้กระจ่างใส

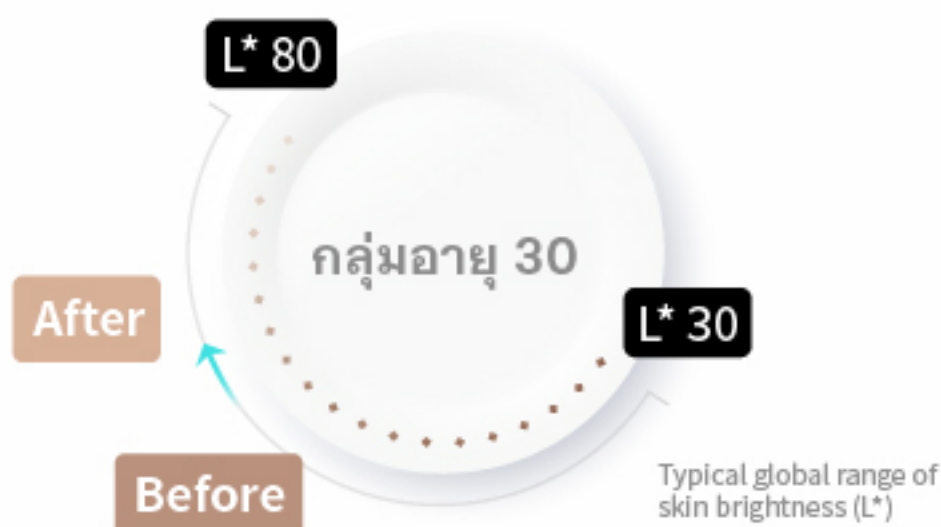

ค่าความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย


↑ **5.97%**

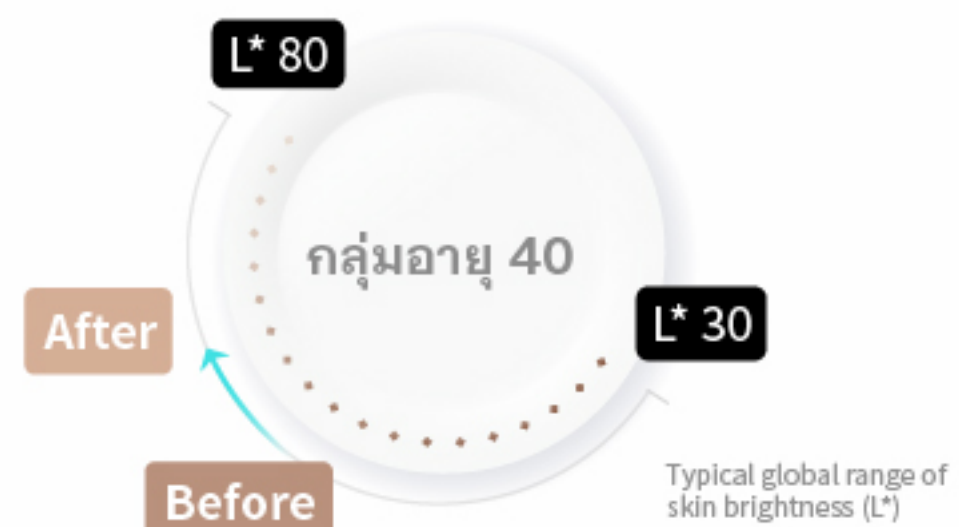

ค่าความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย


↑ **6.88%**

Before

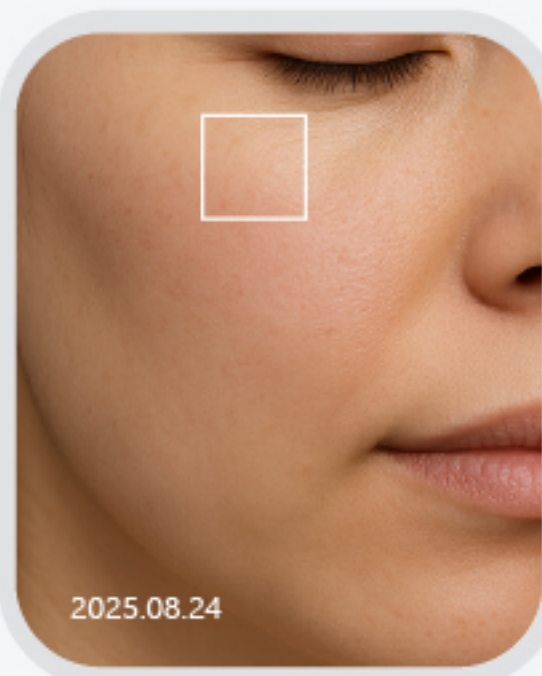

L* 63.42
measured using a Chroma Meter CR-400

After 17 weeks

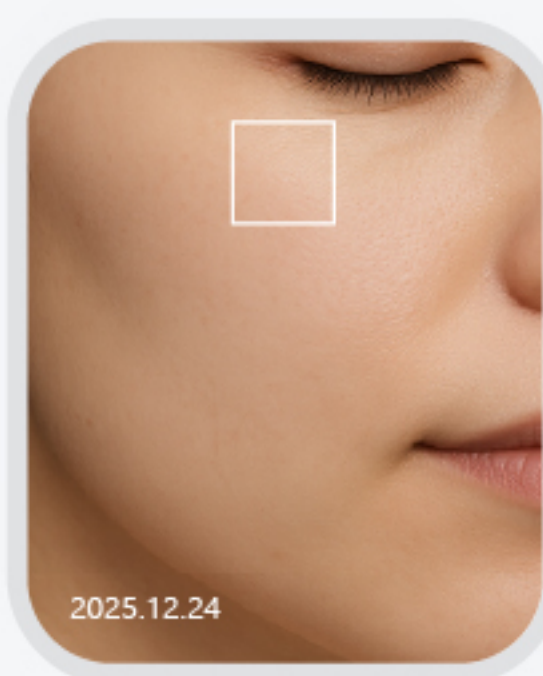

L* 66.64
measured using a Chroma Meter CR-400

ใช้ค่าความลึกของริ้วรอยเป็นตัวชี้วัดหลักเนื่องจากริ้วรอยลึกมักคงอยู่นานและสังเกตได้ง่าย

ลดรูขุมขน



ค่าเฉลี่ยของการลดขนาดรูขุมขน


↓ 25.73%



ค่าเฉลี่ยของการลดขนาดรูขุมขน


↓ 27.31%

การลดลงของเส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขน (μg)

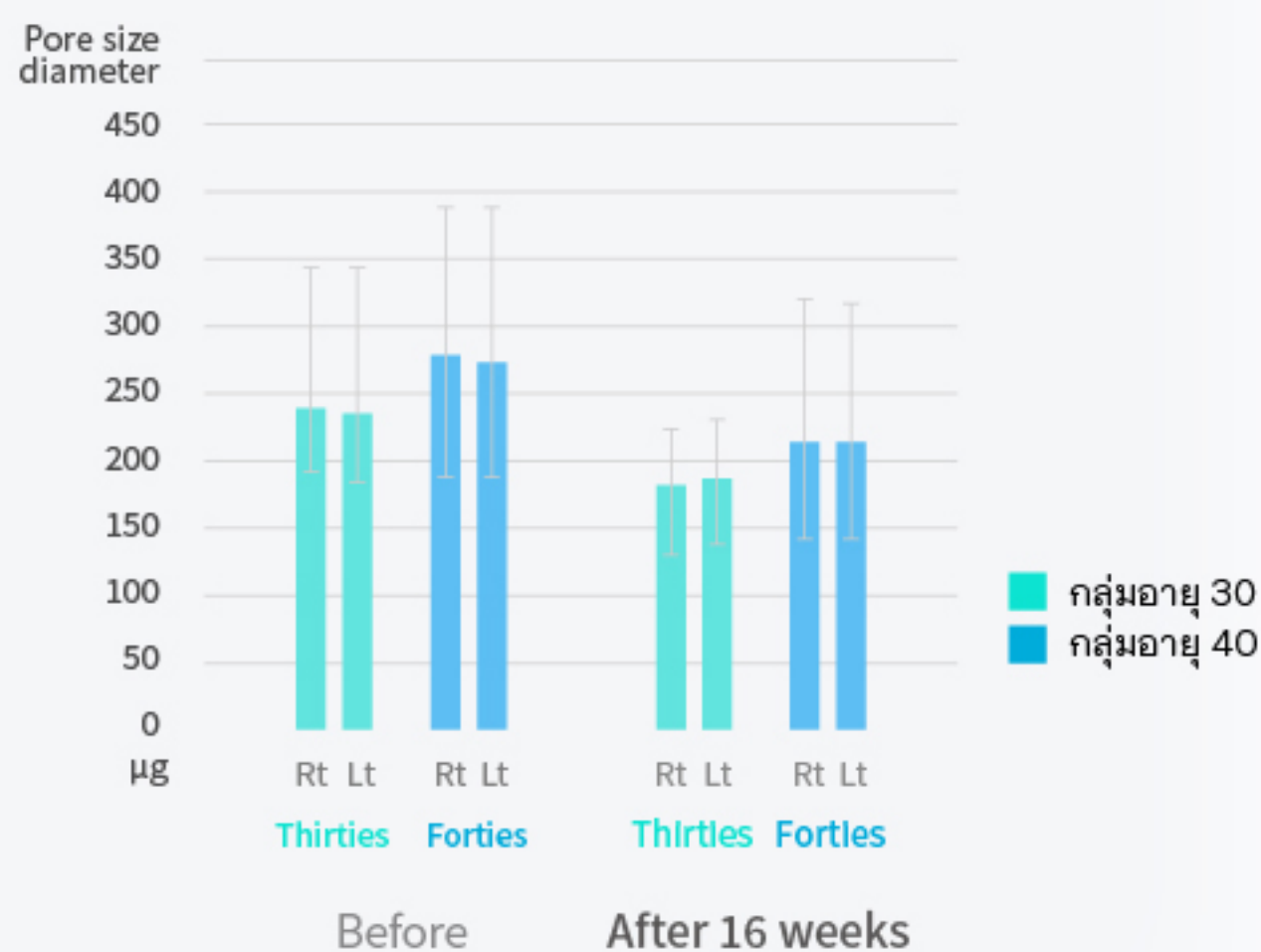

วิเคราะห์โดย Software VISIA – Pore Image Analysis



Before

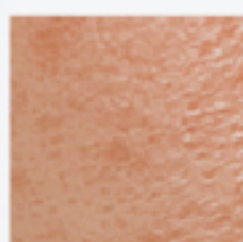



After 16 weeks



Before

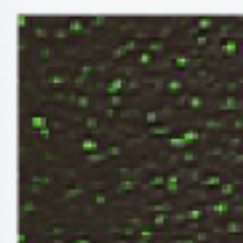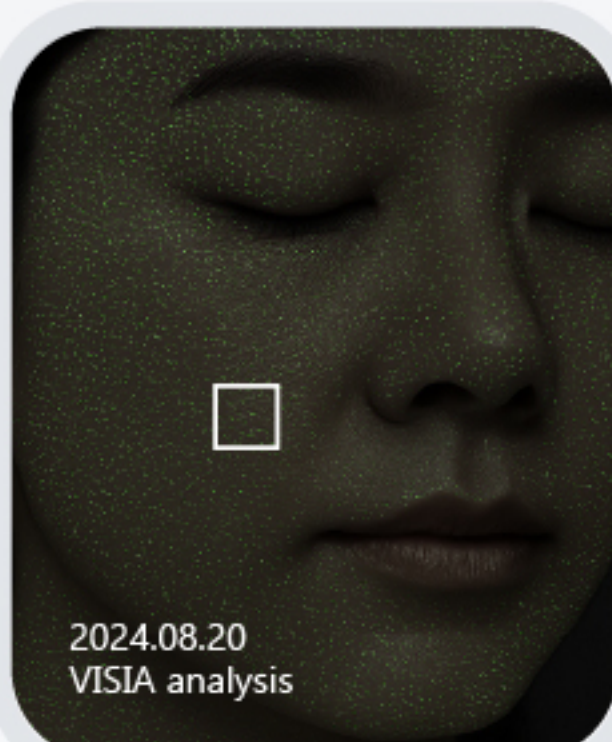

After 16 weeks

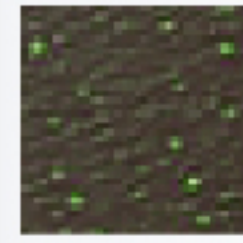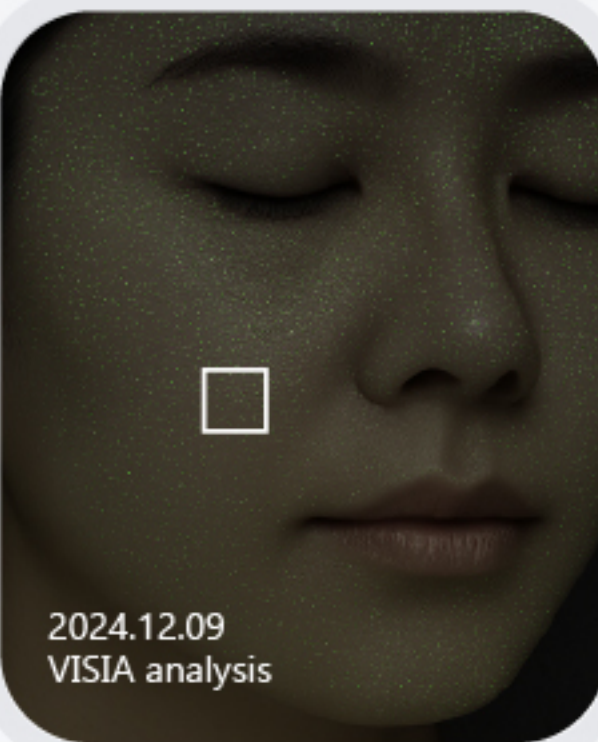


แนวทางปฏิบัติและคำแนะนำการทำหัตถการ

คอร์สหลัก

เว้นระยะห่างทุกๆ 2 สัปดาห์	ครั้งที่ 1	ให้ความชุ่มชื้นทันที & ปรับสีผิวให้กระจ่างใส ระยะเวลา : ประมาณ 2-4 สัปดาห์
เว้นระยะห่างทุกๆ 2-3 สัปดาห์	ครั้งที่ 2	เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ ระยะเวลา : ประมาณ 4-6 สัปดาห์ สัปดาห์
เว้นระยะห่างทุก ๆ 3 สัปดาห์	ครั้งที่ 3	กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน พร้อมช่วยให้ผิวกระจ่างใส ระยะเวลา : ประมาณ 2-3 เดือน
	ครั้งที่ 4	ช่วยคงผลลัพธ์โดยรวมให้ยาวนาน ระยะเวลา : ประมาณ 3-6 เดือน

บริเวณที่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์

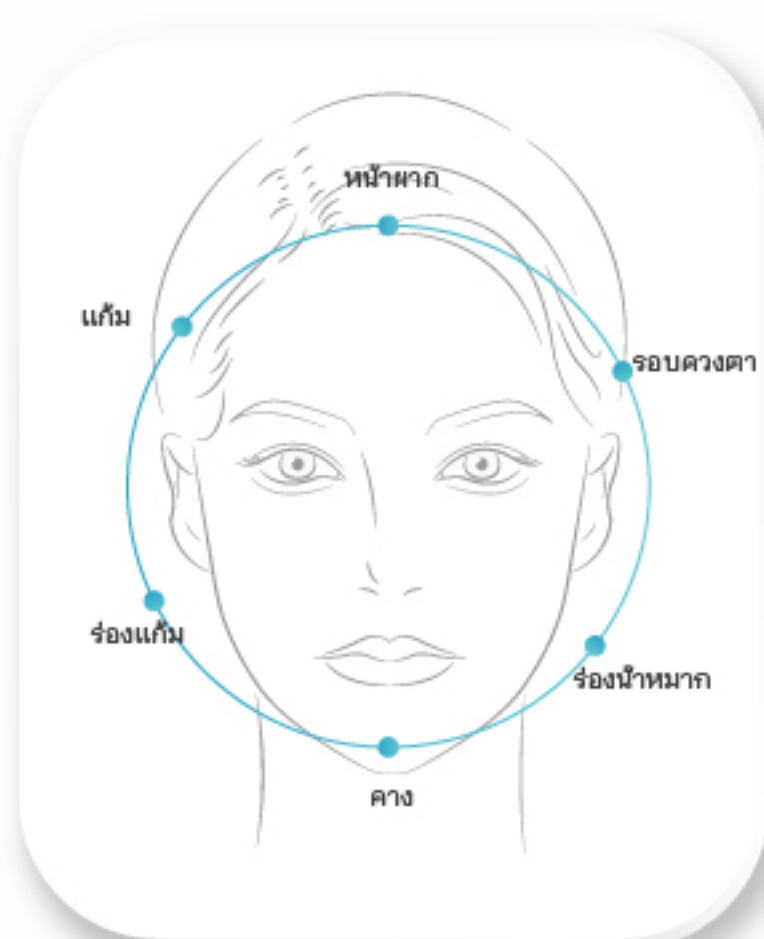

● หัวโขน

สามารถฉีดเข้าสู่ชั้นผิวหนังในบริเวณที่ต้องการการฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหามีได้แก่ หน้าผาก รอบดวงตา แก้ม โหนกแก้ม ร่องแก้ม รอบปาก และคาง

※ ตำแหน่งและความลึกในการฉีดอาจแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจและการประเมินของแพทย์ผู้ทำการรักษา

คำแนะนำการทำหัตถการ

- การฉีดด้วยระบบเข็มหลายหัว (Meso gun)
ใช้เข็มหลายหัวขนาด 31–33G (5-pin / 9-pin)
- การฉีดด้วยมือแบบ (Nappage)
ใช้เข็มเดี่ยวขนาด 30–34G

คอร์สเสริม

หลังจบคอร์สหลัก เว้นระยะ 3-6 เดือน

ความถี่ในการทำหัตถการ 2-3 สัปดาห์/ครั้ง

- ความถี่ในการทำหัตถการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขผิวของผู้รับบริการ เช่น:
 - ✓ เวลาพักฟื้น
 - ✓ ความแห้งกร้าน
 - ✓ ความยืดหยุ่นของผิว
 - ✓ ระดับความลึกของริ้วรอย
 - ✓ อาการระคายเคืองหรืออาการแพ้

ทางเลือกการรักษาเสริม

- เครื่อง MTS (Microneedling)
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวและส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนและการฟื้นฟูผิว
- การใช้ร่วมกับเครื่องพลังงาน
ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ฟื้นฟูผิว และเสริมประสิทธิภาพการรักษาของ PURI PDRN ให้ดียิ่งขึ้น
 - เครื่อง RF Needling (Secret RF, Potenza, Sylfirm X และอื่น ๆ)
 - เลเซอร์ชนิด Fractional (CO2 / Er:YAG และอื่น ๆ)
- เครื่องฟื้นฟูผิว เช่น Cryocell, LDM และ LED เป็นต้น
ช่วยปลอบประโลมผิวและส่งเสริมการฟื้นฟูหลังการรักษา พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อใช้ร่วมกับ PURI PDRN

AETERDERM®

PURI PDRN



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating

[ส่วนประกอบ]

Hyaluronic Acid	25 mg
Polydeoxyribonucleotide	5 mg
Niacinamide	5 mg

[บรรจุภัณฑ์]

2.5 mL X 5 Syringes / Box

