


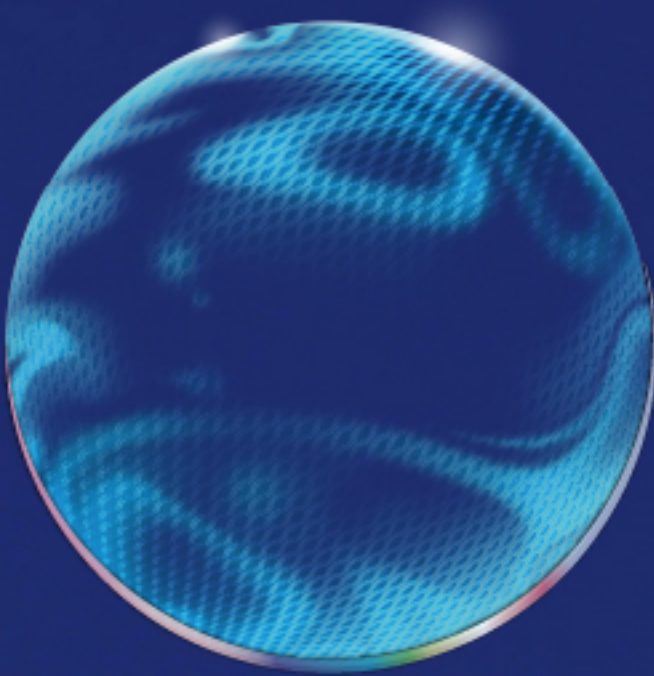

AETERDERM® PURI EYES

AETERDERM® PURI EYES PRO



AETERDERM® PURI EYES PDRN PATCH



AETERDERM®

PURRI EYES PDRN PATCH

AETERDERM®

PURRI EYES PRO

AETERDERM®

PURRI EYES


A close-up, artistic photograph of a woman's face, focusing on her eyes and nose. Her eyes are a striking green color and are looking directly at the camera. Her skin is fair and has a dewy, hydrated appearance, with numerous small water droplets visible on her forehead, nose, and cheeks. Her hair is dark and appears to be wet, with water droplets also visible on it. The background is a soft, out-of-focus blue, suggesting a body of water or a misty environment. The overall mood is fresh, clean, and emphasizes skin hydration.

**ELASTICIDADE QUE  
TRANSFORMA OS OLHOS**




AETERDERM®  
**PURI EYES**  
Polynucleotide **2mg**

- Pouca dor, recuperação rápida
- Conforto e rapidez

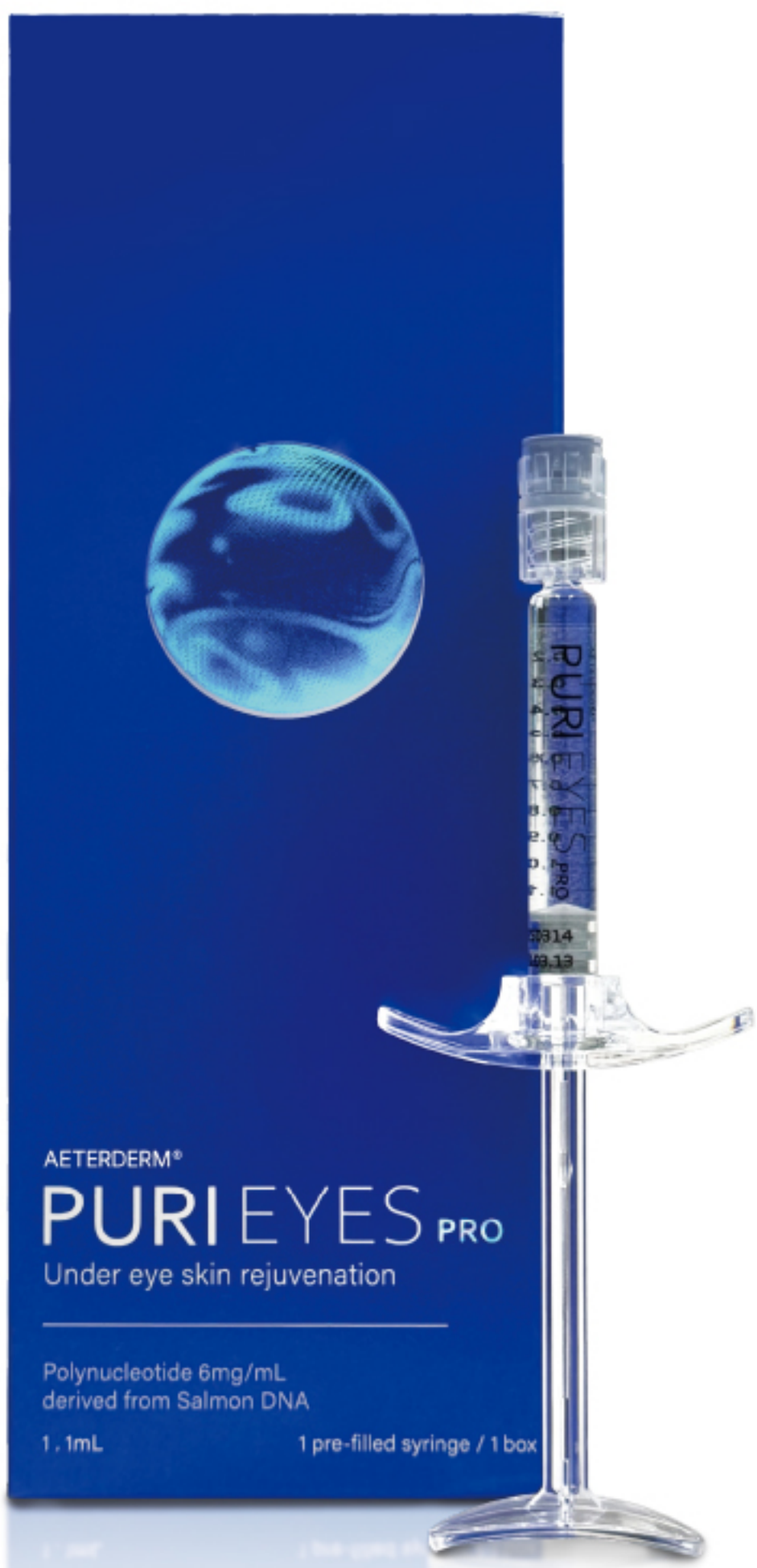

AETERDERM®  
**PURI EYES PRO**  
Polynucleotide **6mg**

- Resultados ainda mais notáveis
- Rejuvenescimento profundo com firmeza visivelmente aumentada

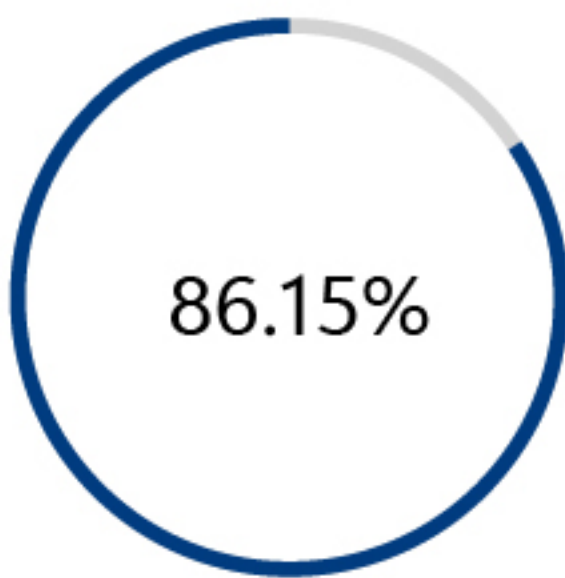


**RECUPERAÇÃO**

As lesões das células dérmicas foram fechadas em mais de 86%

Redução de Rugas

Rejuvenescimento

Tonalidade & Densidade

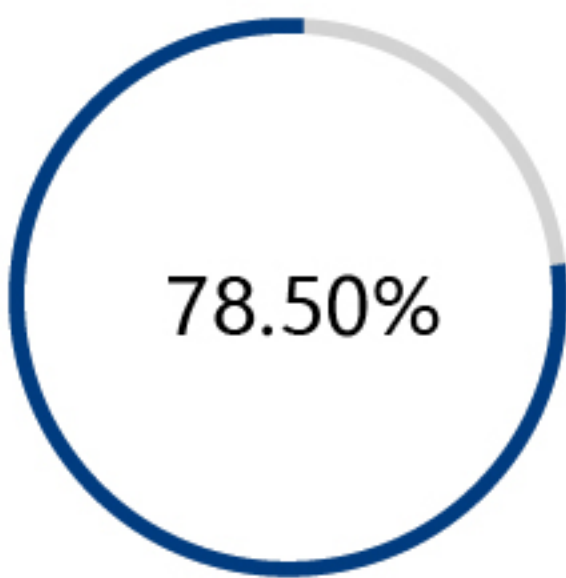

**LIFTING**

Efeito lifting ao aumentar a densidade por proliferação das células dérmicas

Hidratação da Pele

Poros mais Fechados

Pele mais Reforçada

# Tratamento que CURA não só embeleza

PN  
DNA polymer

## Phosphate Groups

## Nitrogenous Bases

Activate cell secretion


- IL-10 Cytokine
- EGF
- FGF
- IGF
- VEGF-A

O polinucleotídeo (PN) de grau médico estimula a recuperação de feridas ao acelerar a taxa de crescimento dos fibroblastos. Além disso, promove a síntese de colágeno e elastina, aumentando a densidade e a espessura da derme.

# Seguro & Confiável

**AETERDERM®PURI EYES** utiliza apenas PN de grau médico certificado, que alcançou altos resultados em análises CoA.

**AETERDERM®PURI EYES** Também é produzido em instalações esterilizadas, certificadas pelas normas GMP e ISO.

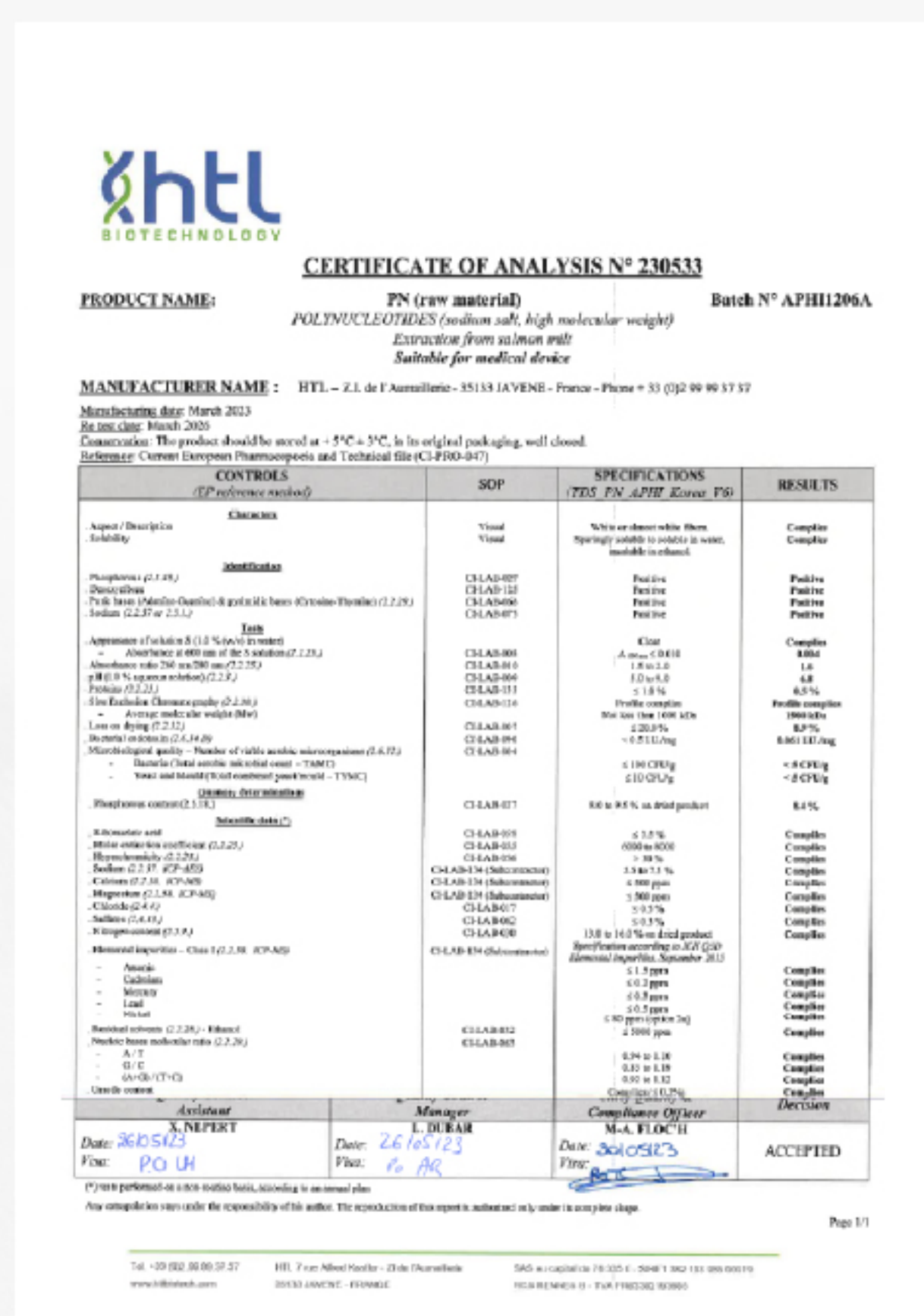

Certificate of analysis (CoA)  
(HTL Biotechnology, Medical grade)

AETERDERM®

# PURI EYES PDRN PATCH

for use with AETERDERM®PURI EYES



Os olhos expressam quem você é, mas a pele ao redor deles é a mais fina do rosto, por isso é a primeira em mostrar rugas.


Fortaleça a pele cansada e cuide dela, pois ela lembra de cada cuidado

# PURI EYES PDRN PATCH


Colaboração de Efeitos:  
Alivia a Pele Irritada Após  
o Tratamento PURI EYES



Polimeros naturais de  
origem vegetal

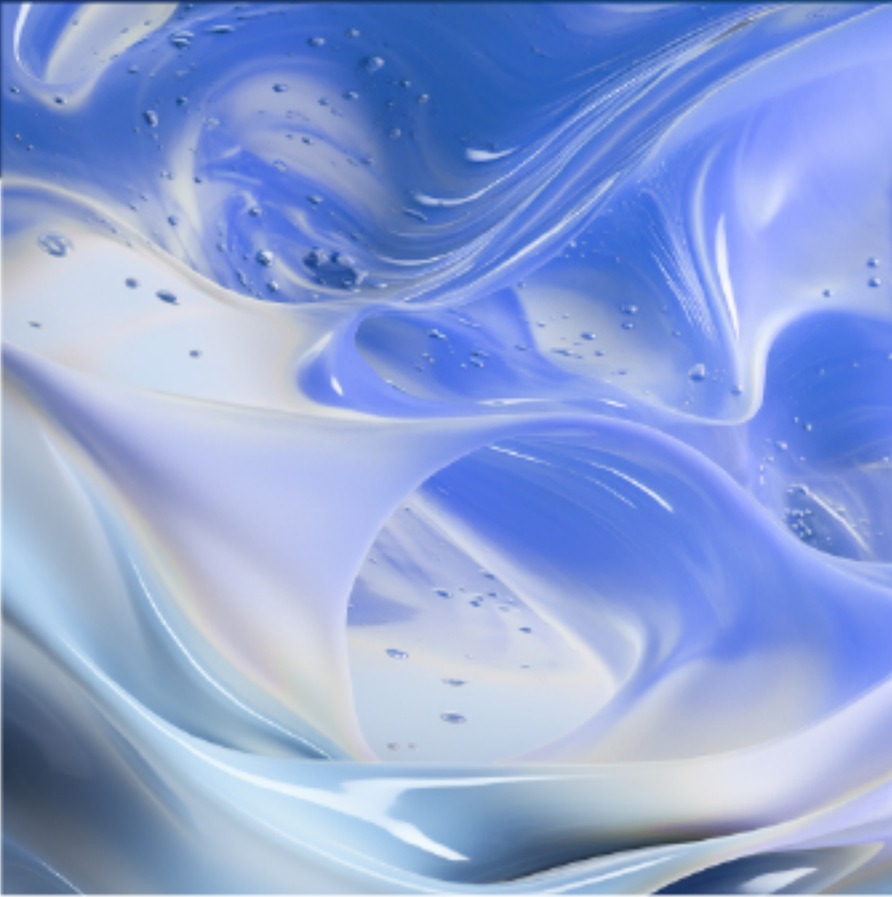

Certificação MFDS de  
patch com dupla função

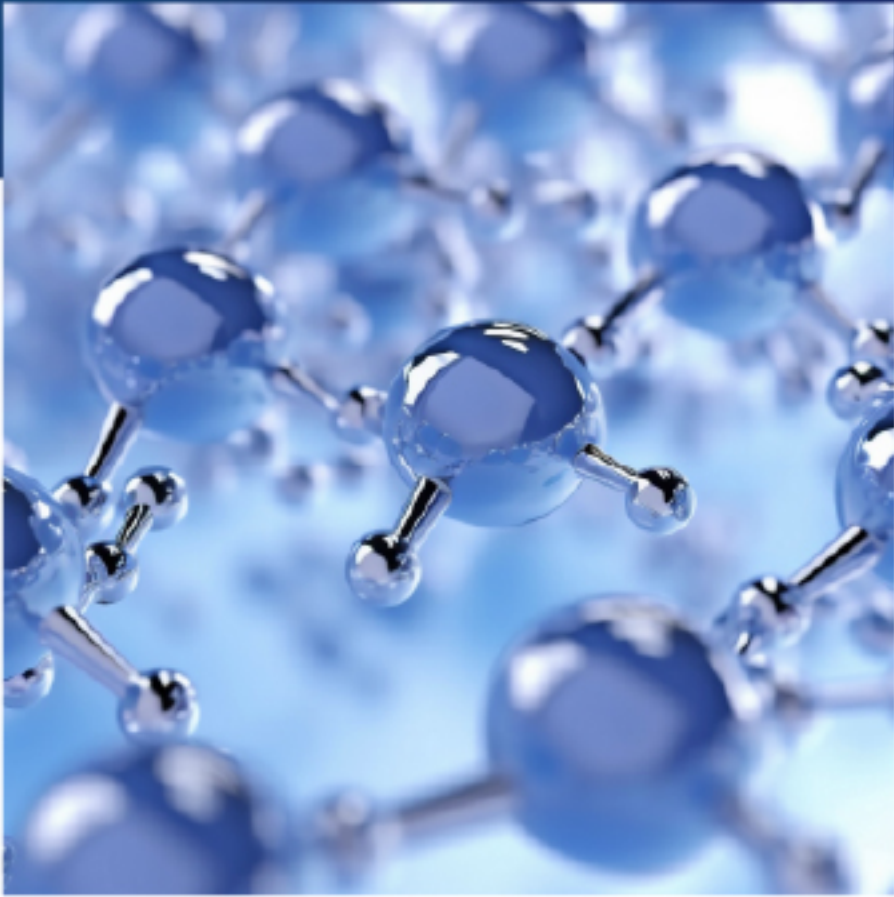

Partículas de gel  
sensíveis à temperatura

## Ingrediente de prescrição dedicado cuidados pós-tratamento PURI EYES



### PDRN

Tissue regeneration ingredient with the same properties as PURI EYES PN



### HA

Intradermal moisturizing



### Collagen

Elasticity improvement



### Allantoin

Moisturizing & Soothing



### Coral

Balances oil & moisture, Relieves troubles



### Niacinamide

Skin whitening



### Adenosine

Anti-wrinkle



### Tocopheryl-Acetate

Antioxidant

Biomateriais para  
Reparação Tecidual


Hidratação & Conforto

Ingredientes Funcionais


# Antes & Depois

## Teste de migração celular (scratch test)

### AETERDERM®PURI EYES

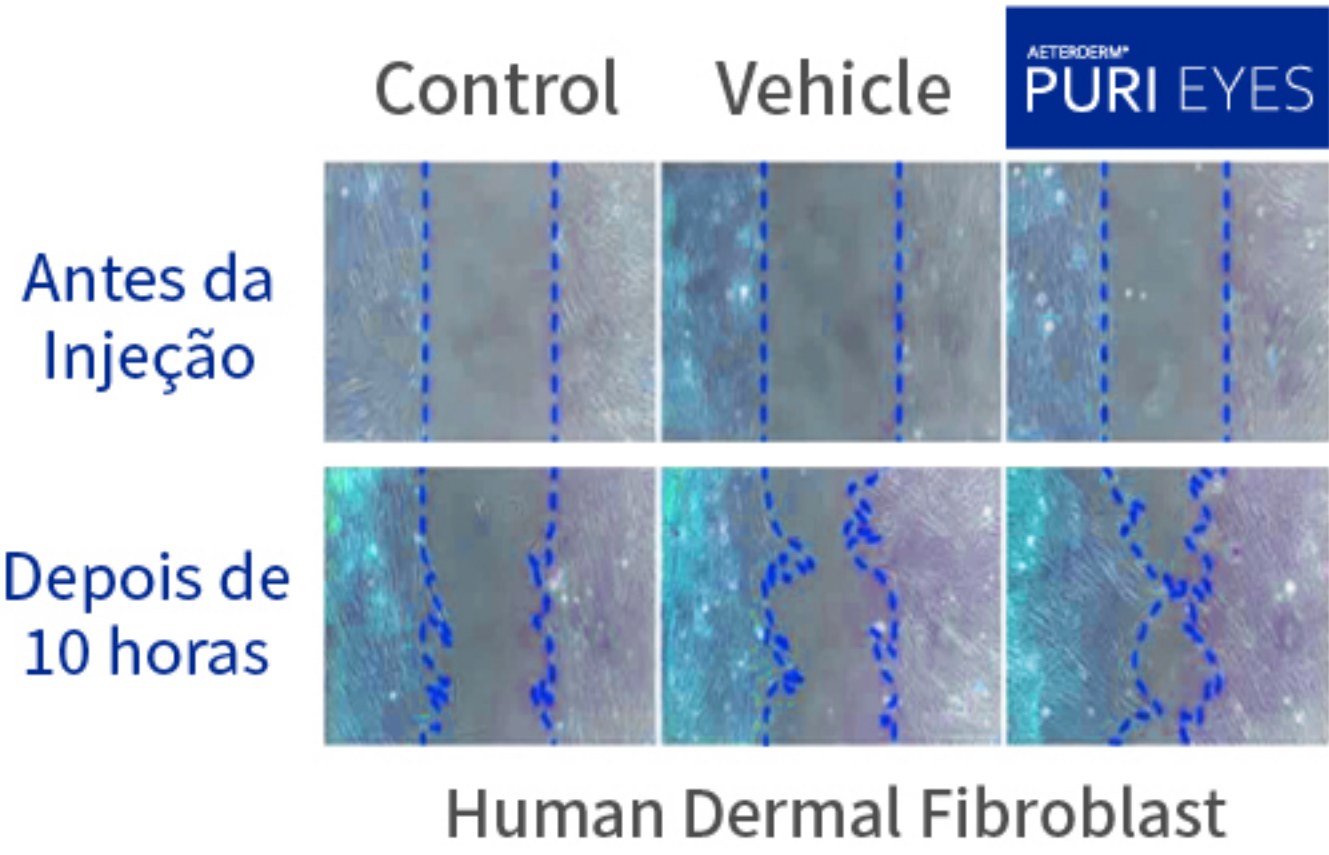


Sci Rep 2020;(10)

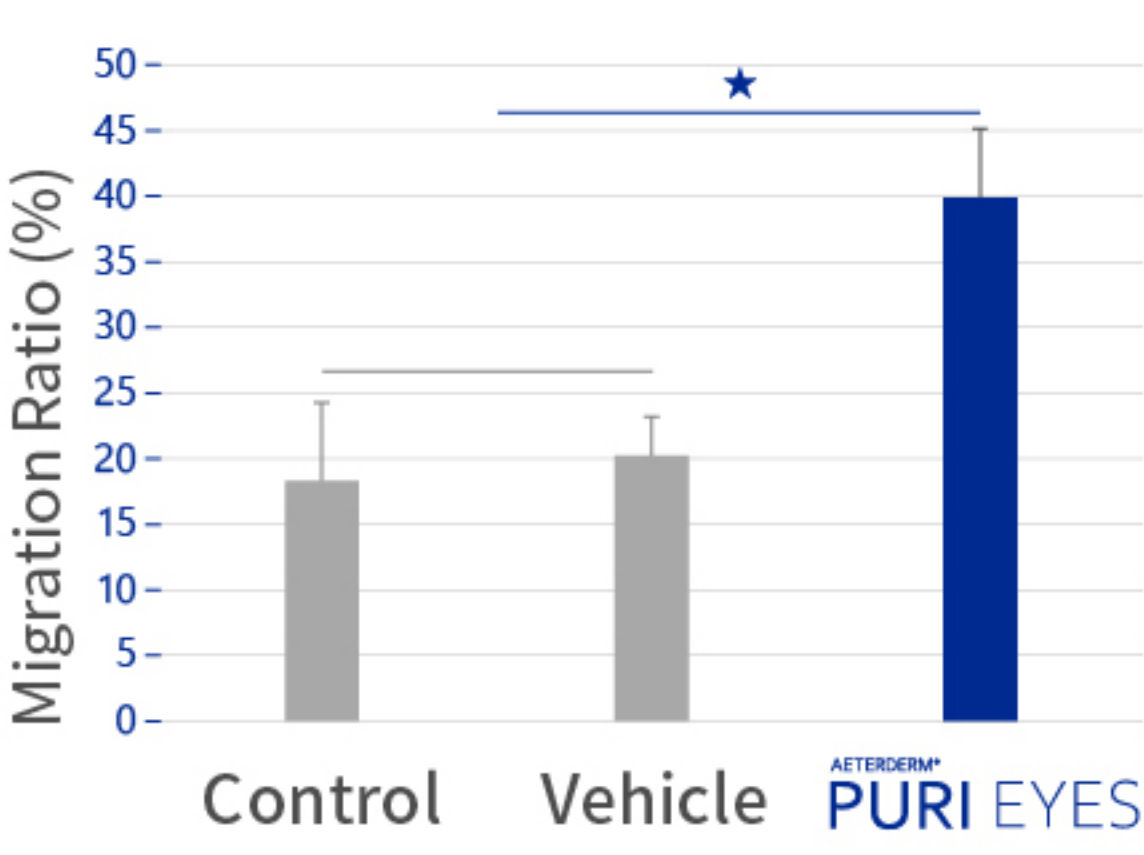


References ) Sci Rep 2020;(10)

## Melhora das Células Mortas da Pele e da Hidratação

### Melhora das Células Mortas da Pele (% , média)

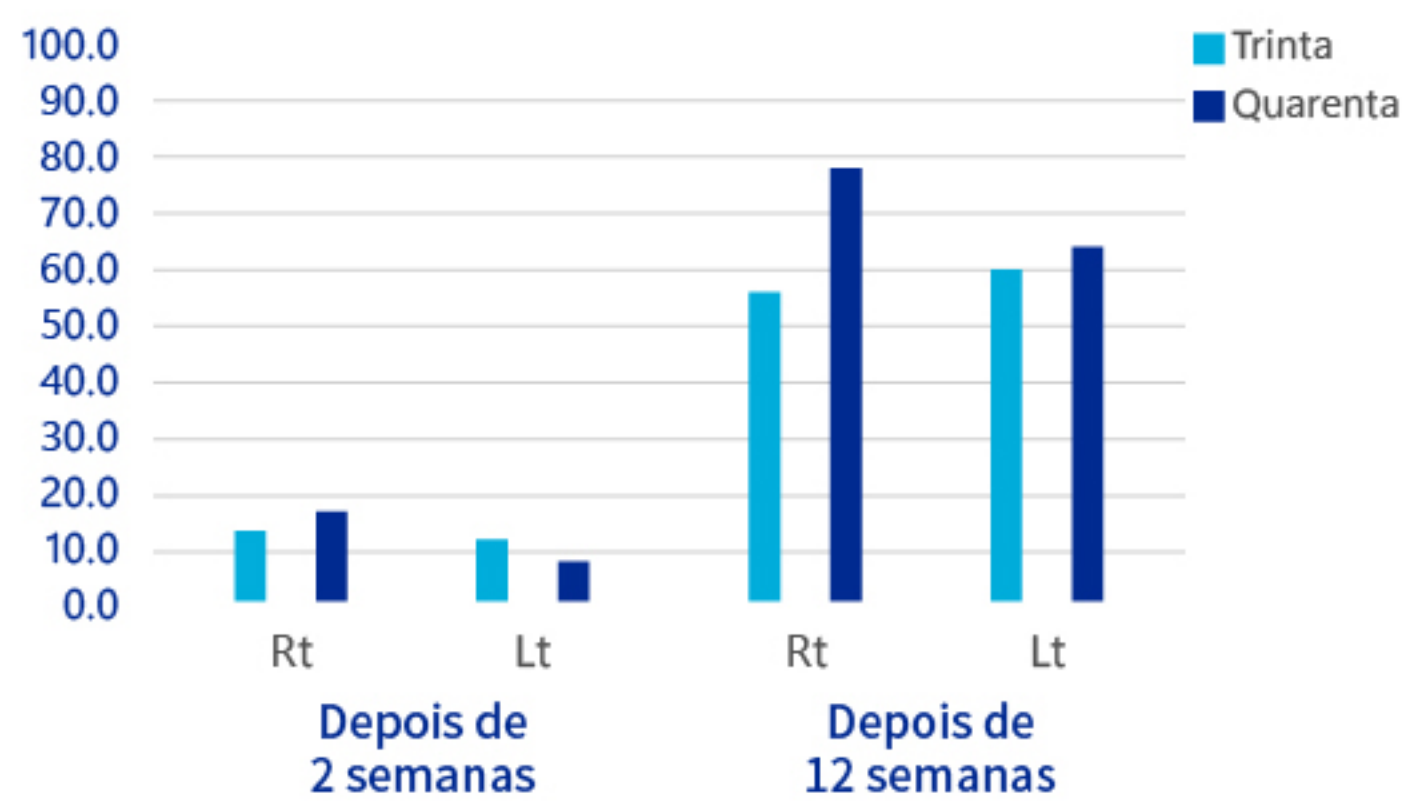

### Melhora da Hidratação da Pele (% , média)

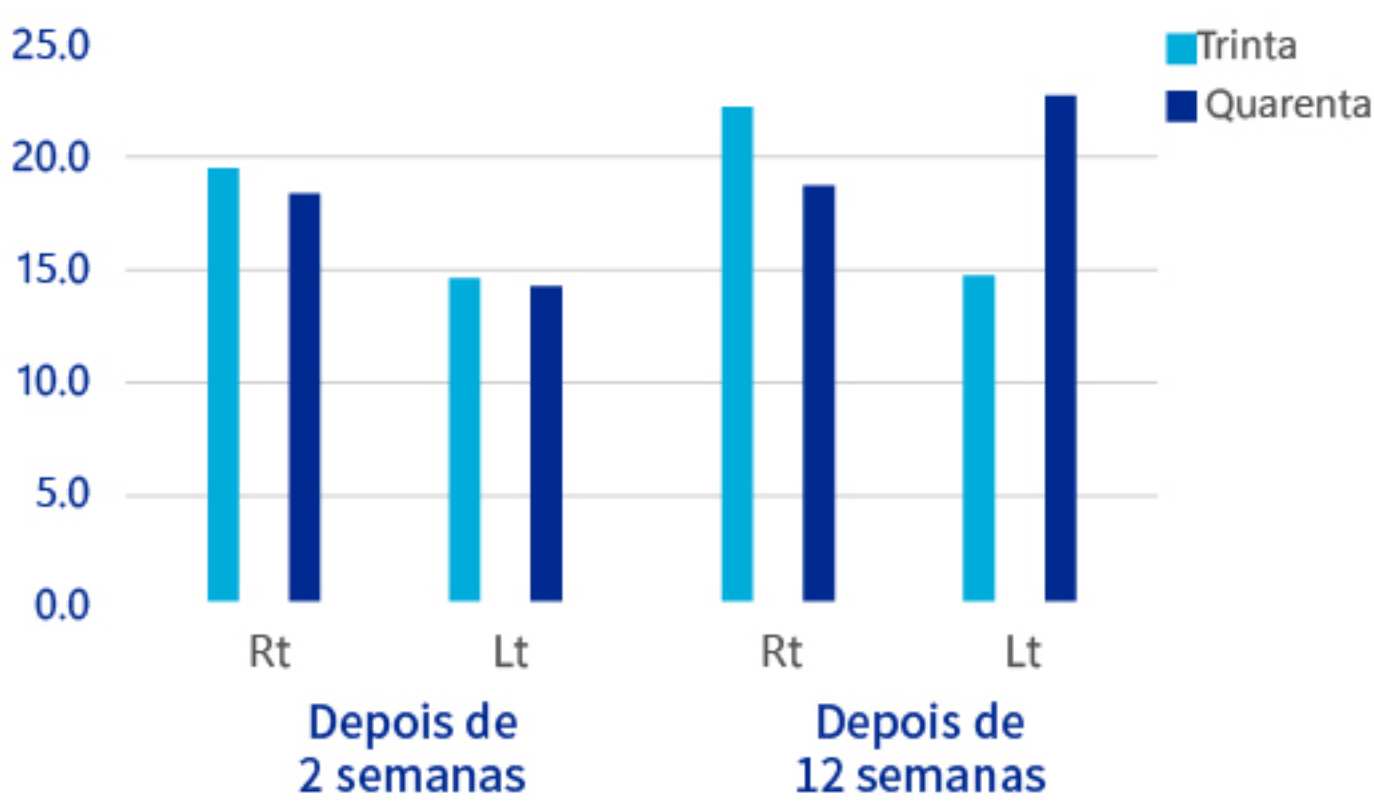

References ) Dermatol Ther 2016;29:37-40

## Brilho & Uniformidade da Pele

### Antes do tratamento



Lado direito




Lado esquerdo

### 12 Semanas após o tratamento



Lado direito

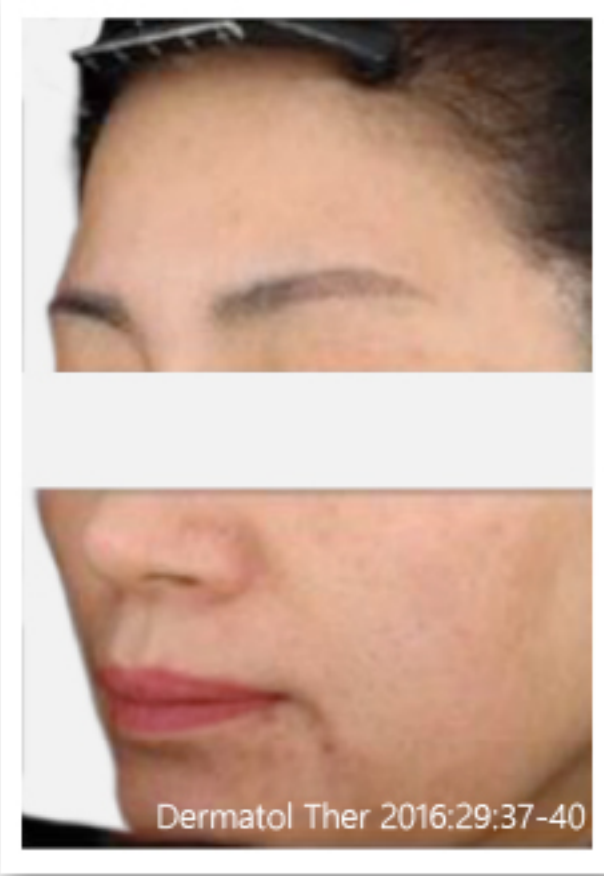


Lado esquerdo


Referencia ) Melhora do tom de pele 12 semanas após a injeção, fotografada pelo VISIA-CR  
Ensaio clínico: Dermatol Ther 2016;29:37-40

# Rugosidade & Volume dos Poros

Rugosidade

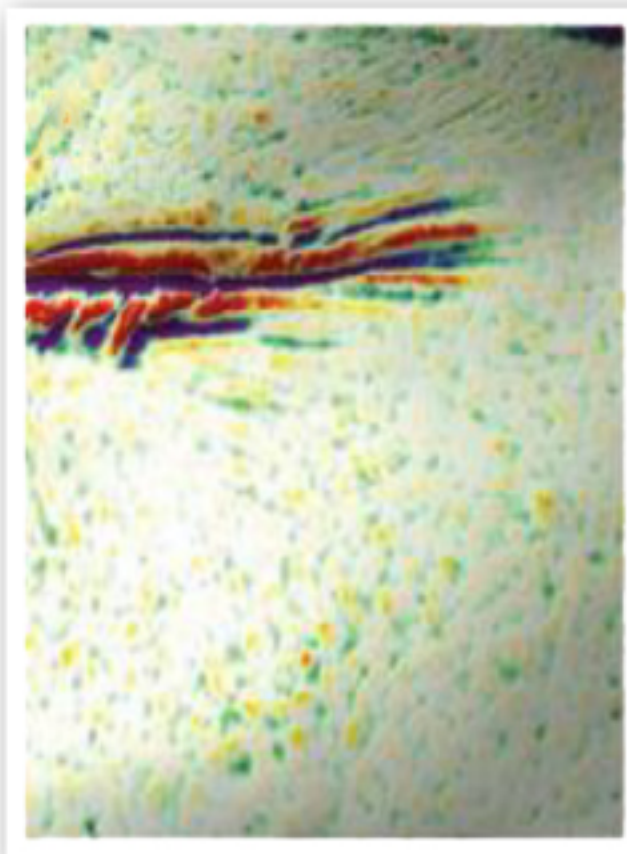

Referência Inicial

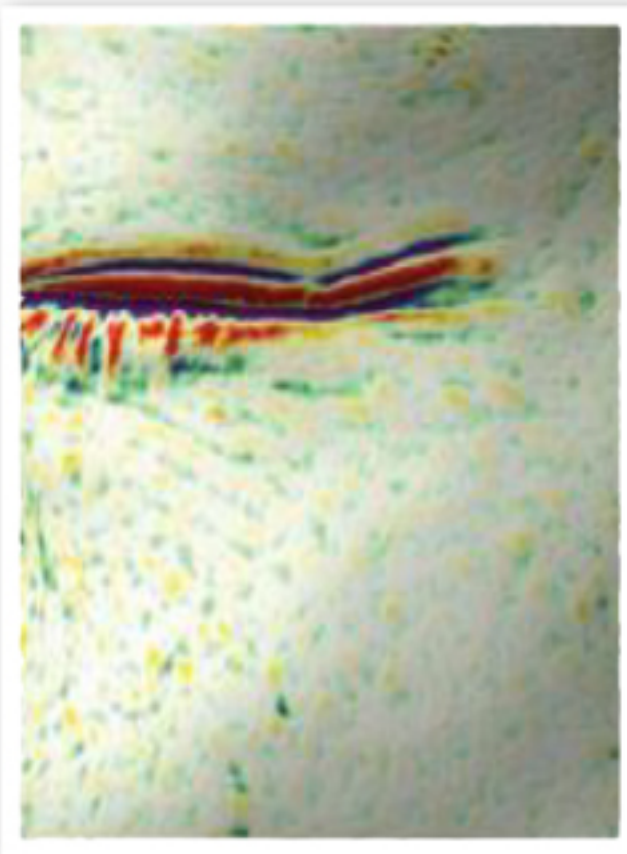


16 semanas depois

Volume dos Poros



Referência Inicial


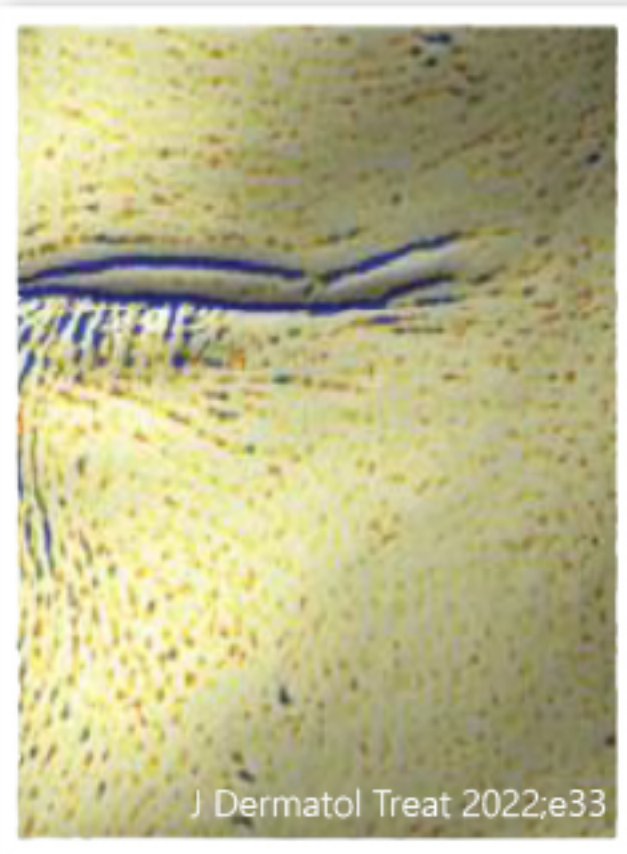


16 semanas depois


References ) J Dermatol Treat 2022;e33

# Regeneração dos Tecidos

Antes do tratamento

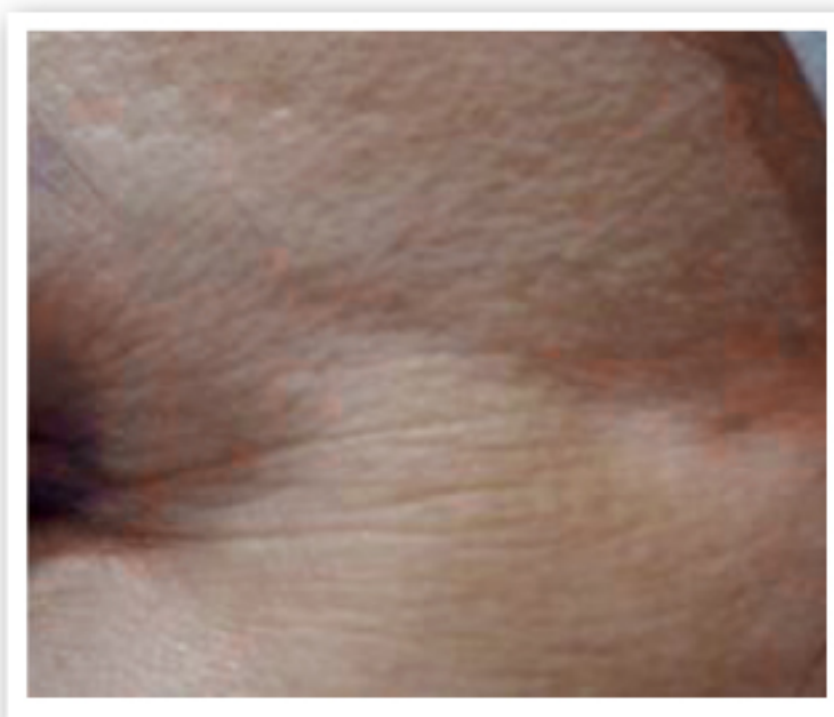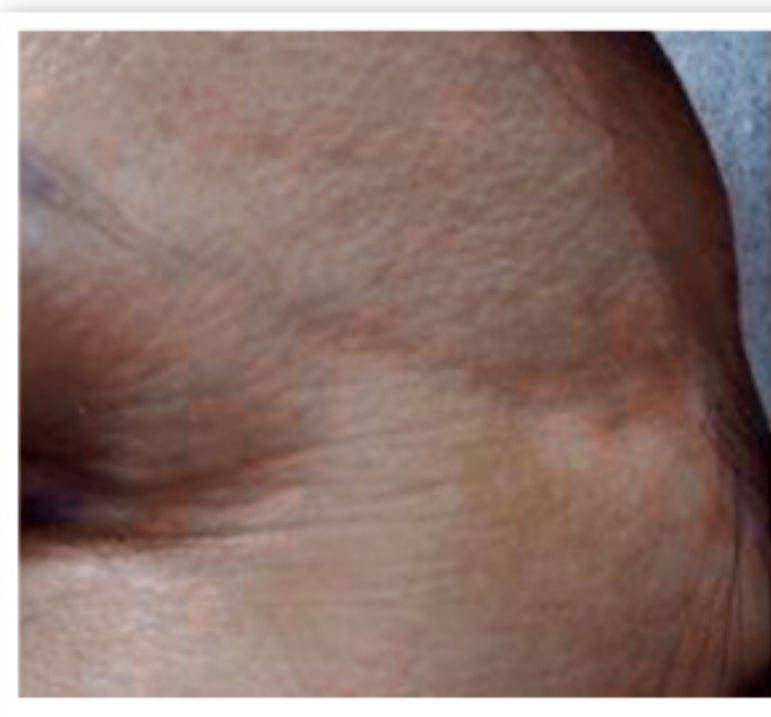

2 Meses depois do sexto tratamento

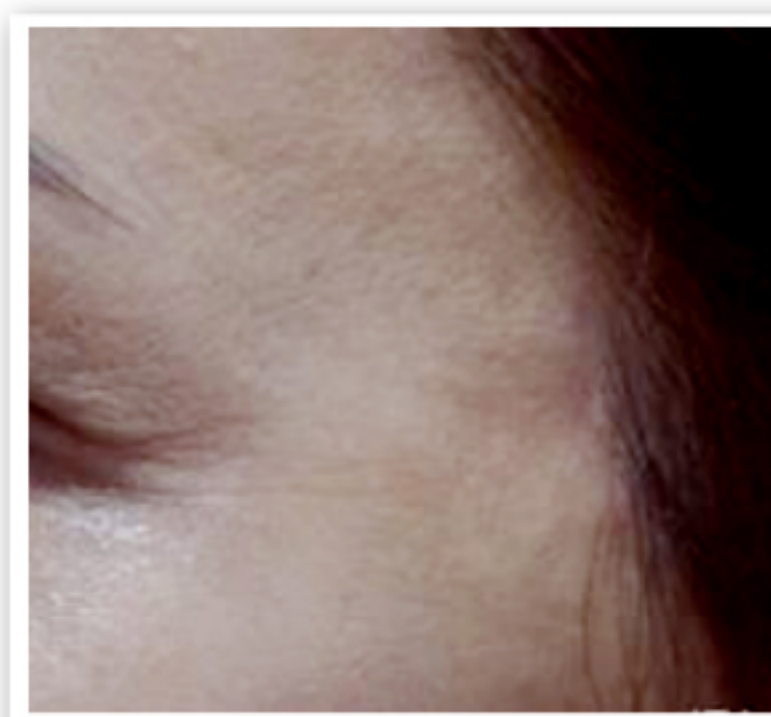


# Regeneração de Cicatrizes Atróficas

Antes do tratamento



2 meses depois do quarto tratamento

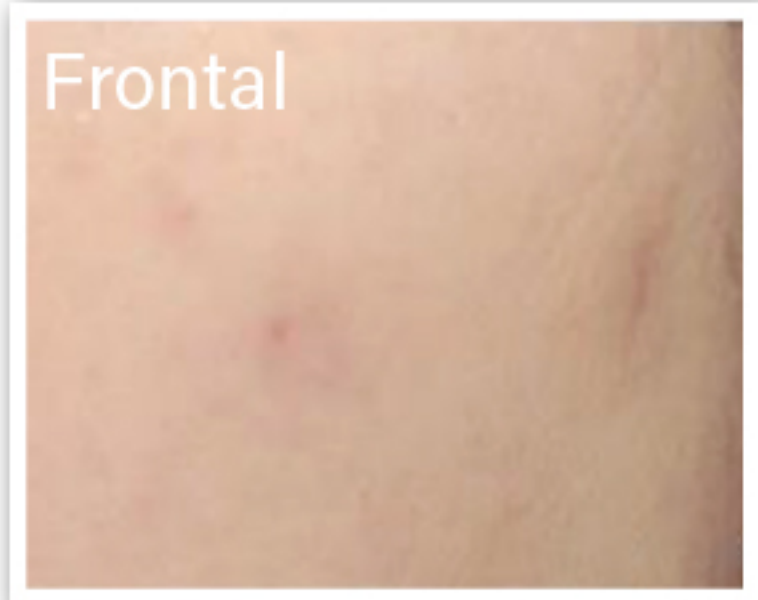

References ) Skin Res Technol 2023:29(8): e13439.

AETERDERM®

# PURI EYES



# Guia de Uso

## STEP 1. AETERDERM®PURI EYES

### Procedimento



#### Agulha Recomendada

32G ~ 34G

#### Ângulo de Inserção de Agulha

∠10°~15° Intradérmico



#### Informações da Injeção

0.02~ 0.035cc por ponto

Fazendo pequenas elevações

6~8mm

15~30 pontos por área dos olhos

1. Lave o rosto do paciente cuidadosamente.
2. Aplique creme de lidocaína na área a ser tratada. Após anestesia, limpe a área.
3. Desinfete a área do tratamento com álcool em algodão ou swabs.
4. Peça ao paciente para abrir os olhos, relaxar e tentar não apertar os olhos.
5. Deposite o material ao redor da área de tratamento da forma mais delicada e suave possível, para reduzir o risco de hematomas e inchaço.
6. Massageie suavemente a área posteriormente e oriente o paciente a massagear suavemente a região por alguns dias para distribuir o produto.
7. É possível utilizar todas as técnicas de injeção estética na camada subcutânea superficial.



AETERDERM®  
**PURI EYES** PRO  
AETERDERM®  
**PURI EYES** PDRN PATCH

## Opções de tratamento adjuvante

### I Técnicas manuais — Para técnicas avançadas de injeção

O PURI EYES fornece com precisão os ingredientes ativos para promover uma melhora imediata da pele, ao mesmo tempo em que minimiza o tempo de recuperação.

- Micro Papular (Nappage)

### I Entrega assistida por dispositivo — Para profundidade precisa e volume consistente

A precisão no direcionamento aumenta a consistência do procedimento e contribui para resultados reprodutíveis.

- Mesogun / Pistola de injeção
- MTS (Microneedling / Microagulhamento)

### I Cuidados pós-procedimento e suporte — Opções de combinação para PURI EYES

Quando utilizados com o PURI EYES, auxiliam na regeneração do colágeno e na recuperação pós-procedimento, potencializando os resultados gerais do tratamento.

- Microagulhamento com RF e Laser Fracionado (Secret RF, Potenza, CO2 etc.)
- Dispositivos não invasivos de recuperação (Cryocell, LDM, LED etc.)

## Pós-Tratamento

### STEP 2. AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH

#### Suporte a recuperação



1. Desinfete a área tratada, limpando suavemente com swabs de álcool.
2. Aplique delicadamente o **AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH** previamente resfriado na área de tratamento.
3. Após 20 minutos, remova o patch e massageie suavemente o restante da essência para que seja absorvida.
4. Oriente o paciente a utilizar **AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH** por 2~3 dias após o tratamento.

**AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH** Responde à temperatura da pele para apoiar a entrega profunda dos ingredientes ativos e a gestão eficiente da recuperação.



## Resultados Pós-Tratamento

### PURI EYES

Pele mais lisa  
Tom mais uniforme  
Equilíbrio da oleosidade

#### Primera Sessão

Normalmente 4 semanas

### PURI EYES PDRN PATCH

PDRN promove a cicatrização rápida  
AH & Colágeno  
Acalma a pele  
Combate o ressecamento pós-tratamento

Maior firmeza na pele  
Rugas visivelmente reduzidas  
Redução dos poros

#### Segunda Sessão

Após 2~4 semanas  
Normalmente 3 meses

Reforço da barreira cutânea  
Alivia a pele aquecida  
Rápida regeneração dérmica com PDRN

Melhora geral da condição da pele  
Pele visivelmente mais saudável  
Pele mais clara e firme

#### Tercera Sessão

Após 1 mês  
Normalmente 6 meses


Previne a pigmentação de melanina  
Clareia e hidrata a pele



AETERDERM®



# EFEITOS COLATERAIS COMUNS DE INJEÇÕES

Procedimentos que injetam diretamente ingredientes ativos na pele podem causar diversas irritações cutâneas e efeitos colaterais

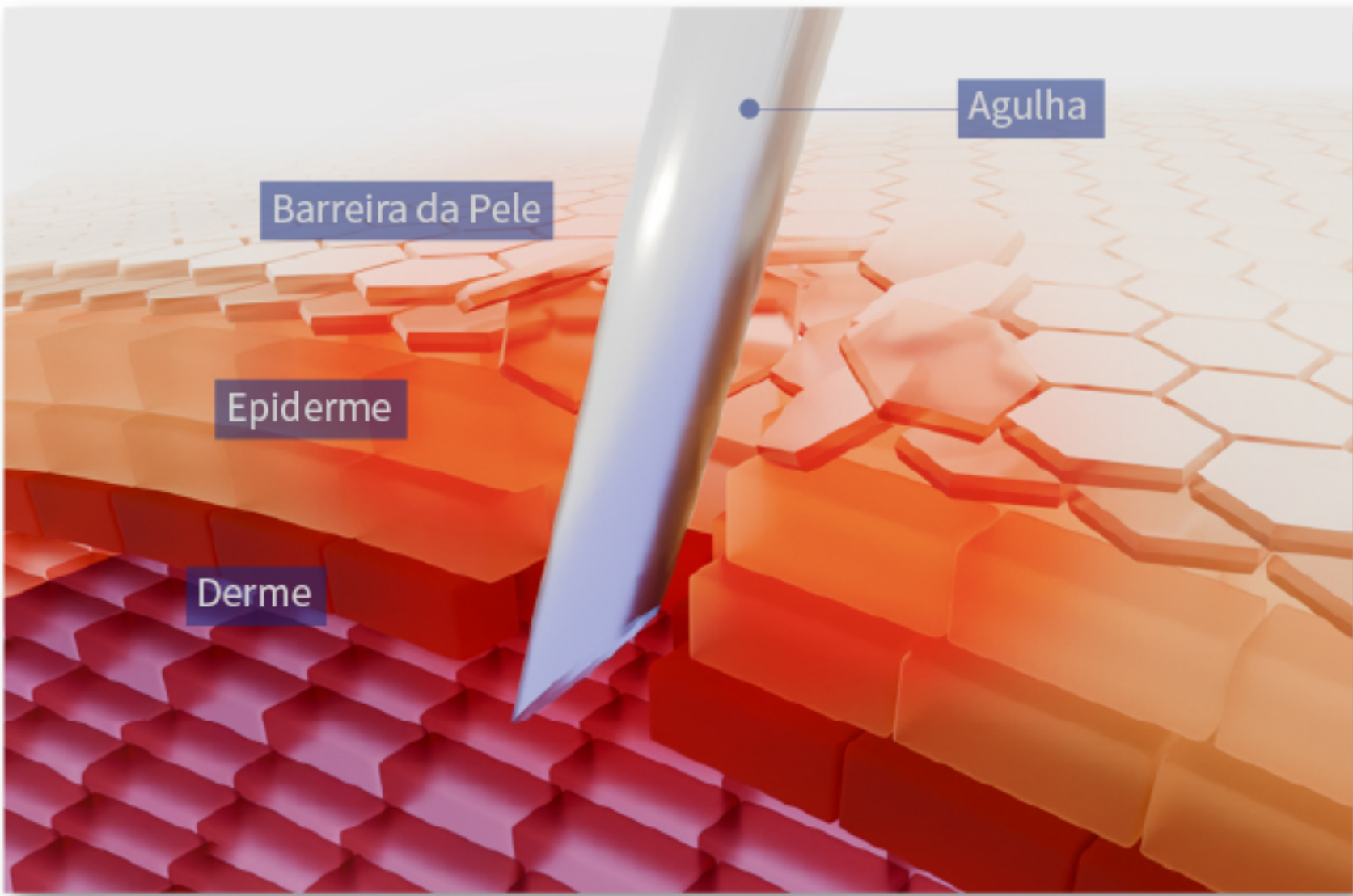

Quando a agulha penetra na pele, causa uma forte irritação na epiderme e na derme.

Calor causado pela irritação  
Evaporação e ressecamento da pele devido ao calor  
Barreira cutânea comprometida

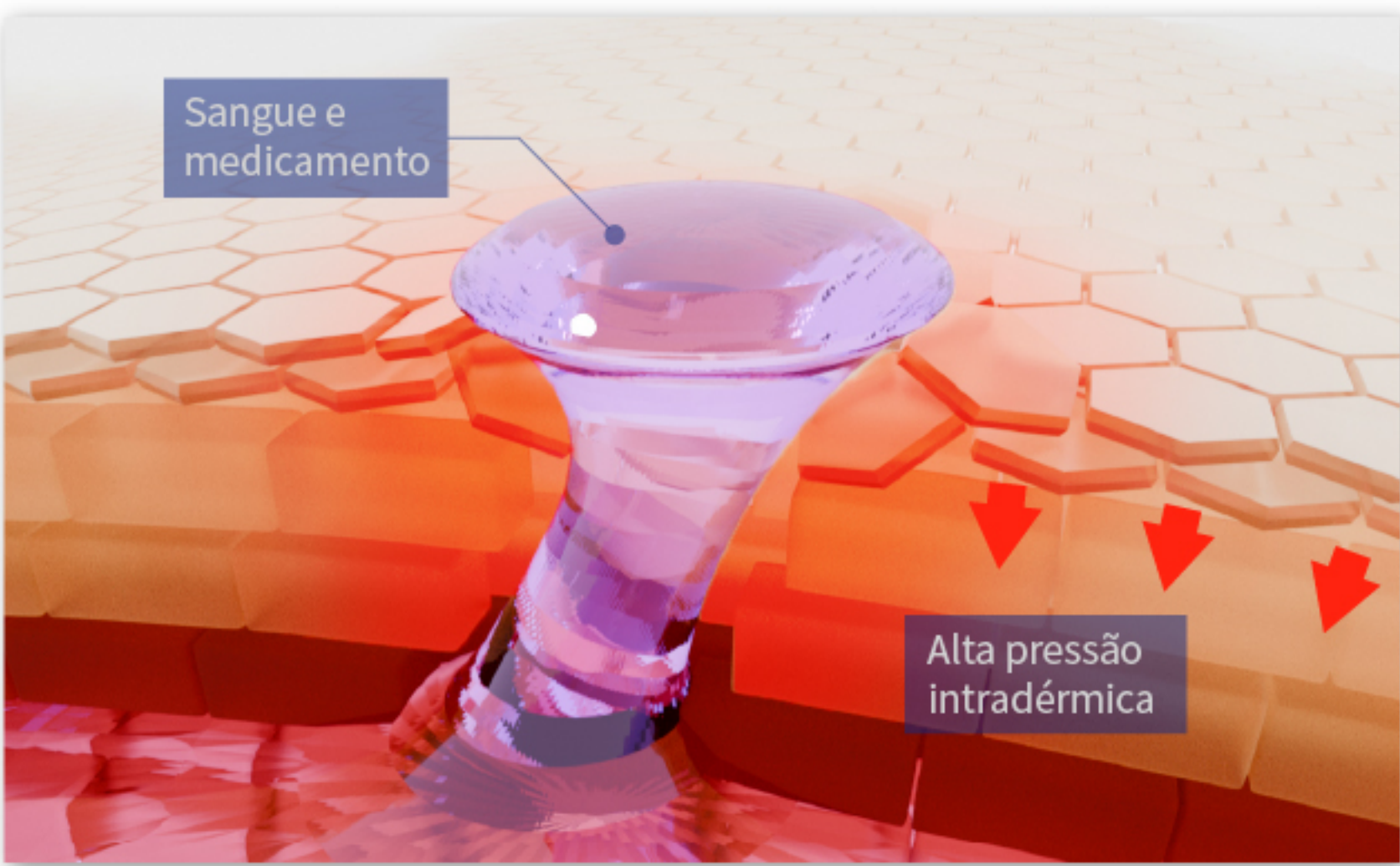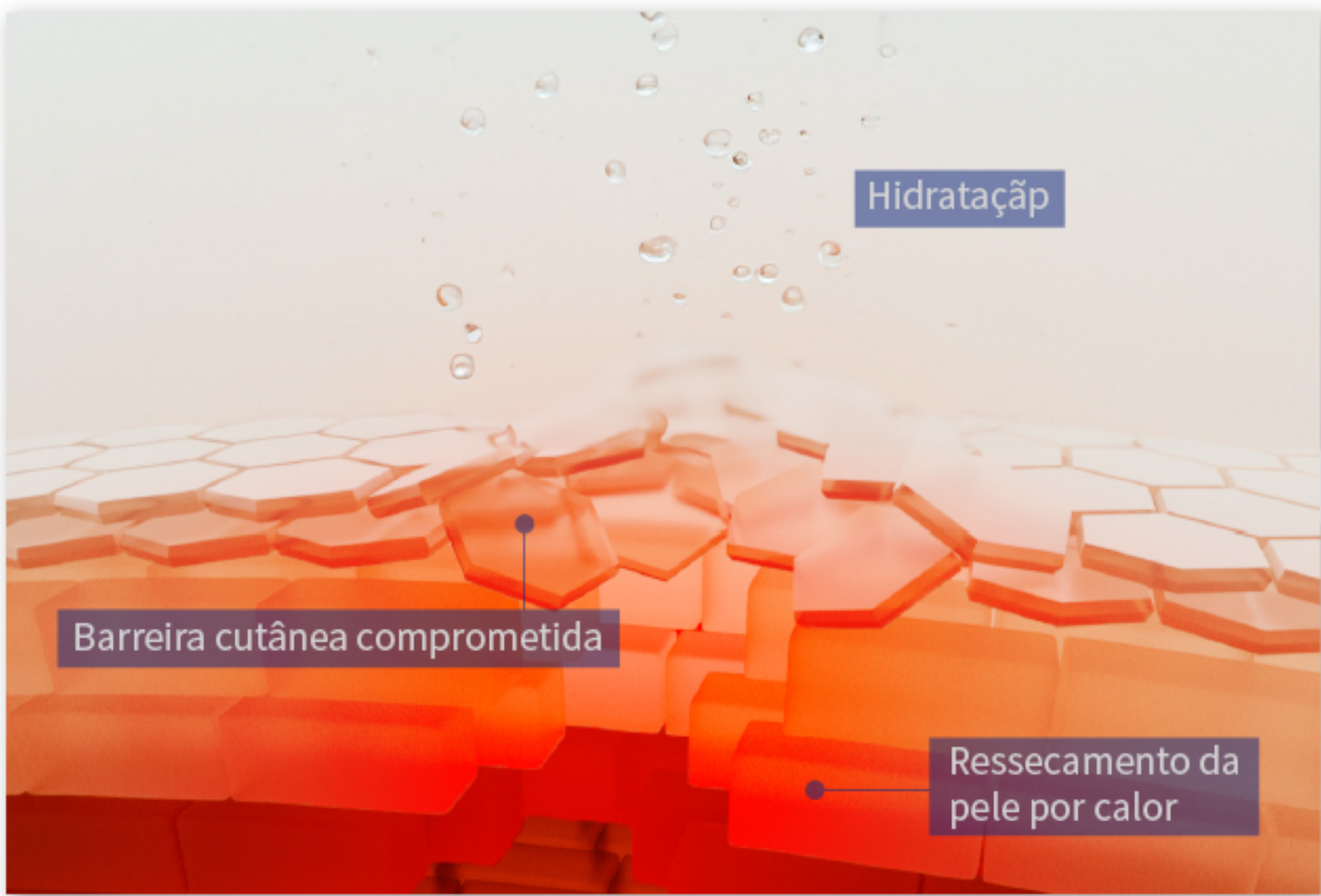


Vazamento do medicamento junto com sangue devido á alta pressão intradérmica e a pequenos orifícios de injeção ainda não cicatrizados

## AETER PURI EYES PDRN PATCH


É um patch de cuidados pós-procedimento desenvolvido para melhorar os problemas crônicos dos procedimentos de injeção dérmica e acalmar rapidamente a pele irritada.

# COMBINED ACTION


of PURI EYES & PURI EYES PDRN PATCH

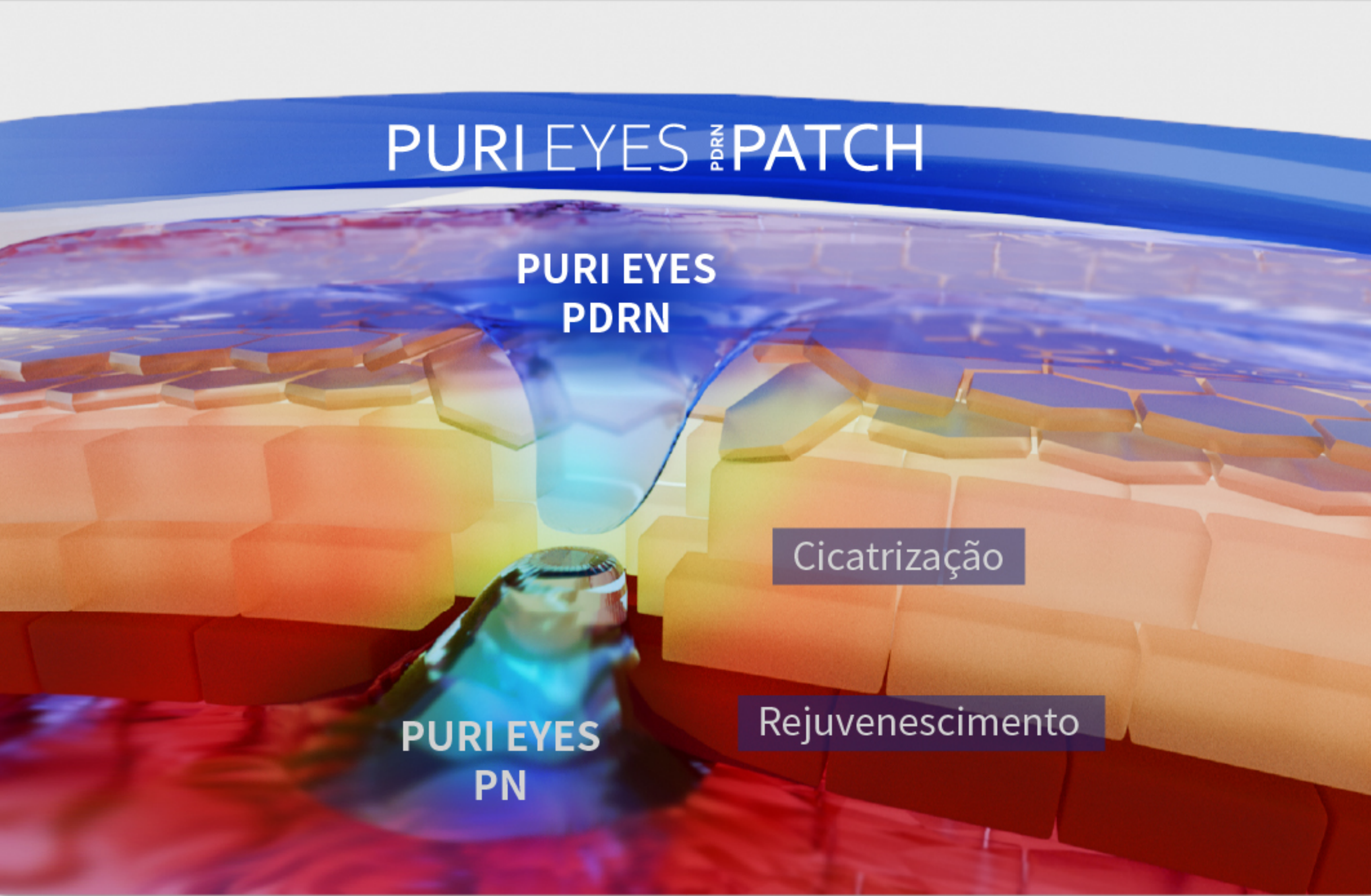


- Ao aplicar PDRN em alta concentração, que possui as mesmas propriedades físicas do PURI EYES PN na pele, evita-se o extravasamento de fármacos intradérmicos devido a osmose.
- O PDRN e o PN atuam na epiderme quanto na derme, promovendo a cicatrização de feridas e a regeneração tecidual de forma interna e externa.

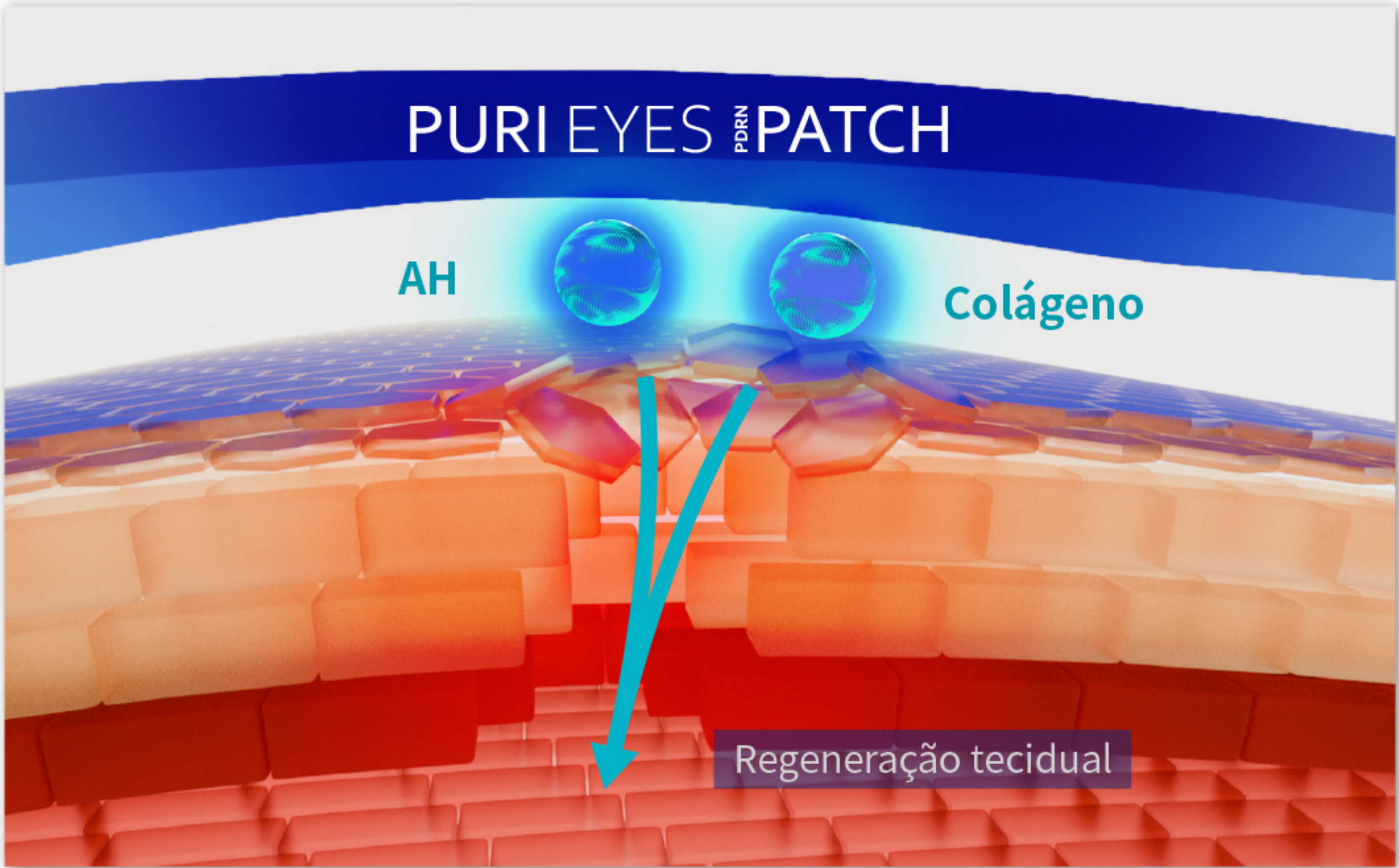


- O AH (ácido hialurônico) e o colágeno hidrolisado, biomateriais para reparação tecidual, podem penetrar na derme através do orifício criado durante o procedimento de injeção.

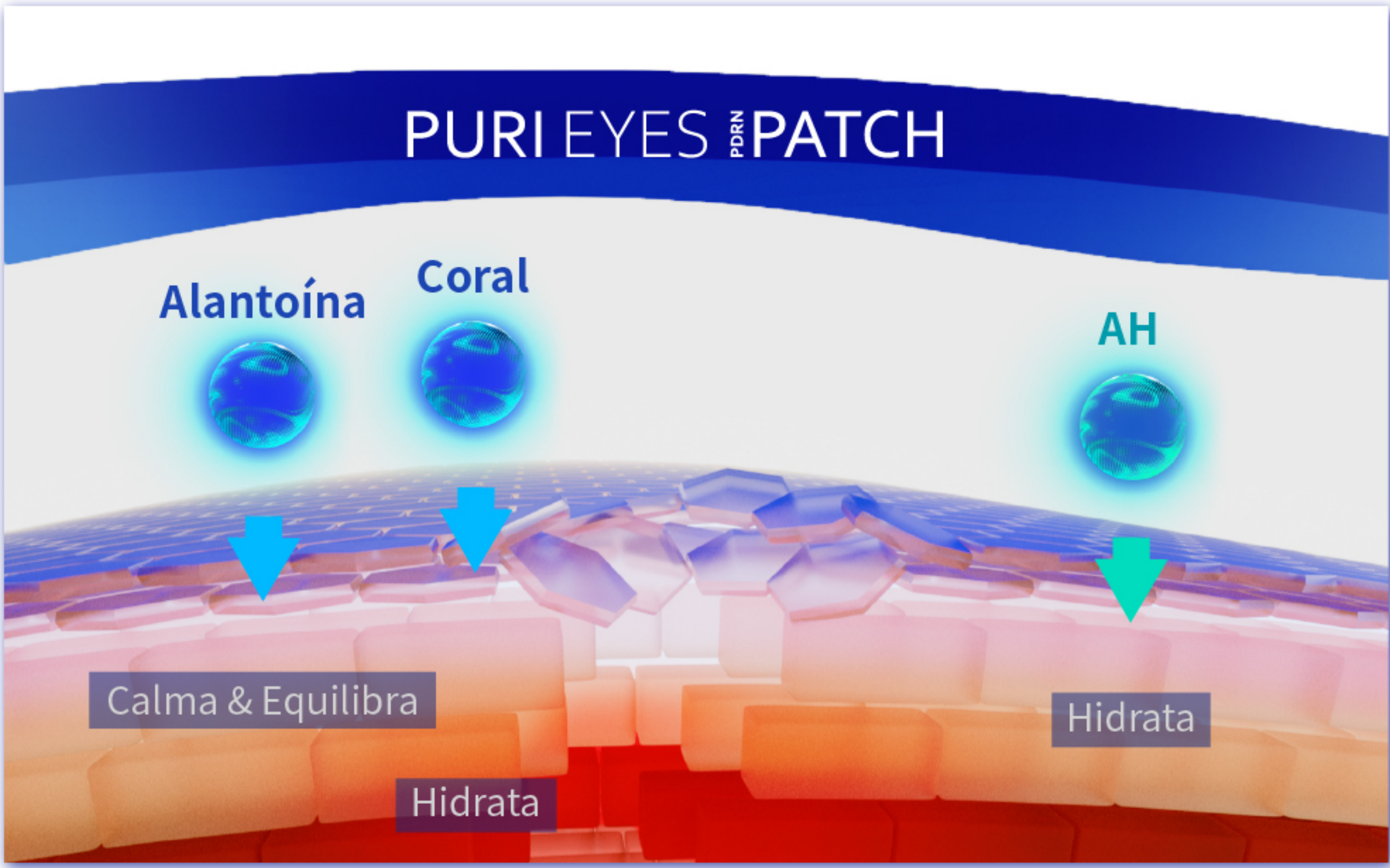

- A alantoína acalma a pele irritada, e os ingredientes de coral hidrolisado e ácido hialurônico(AH) proporcionam hidratação suficiente à pele ressecada devido ao calor.
- Para maximizar o efeito calmante da pele, prepare e aplique o PURI EYES PDRN PATCH enquanto estiver frio.

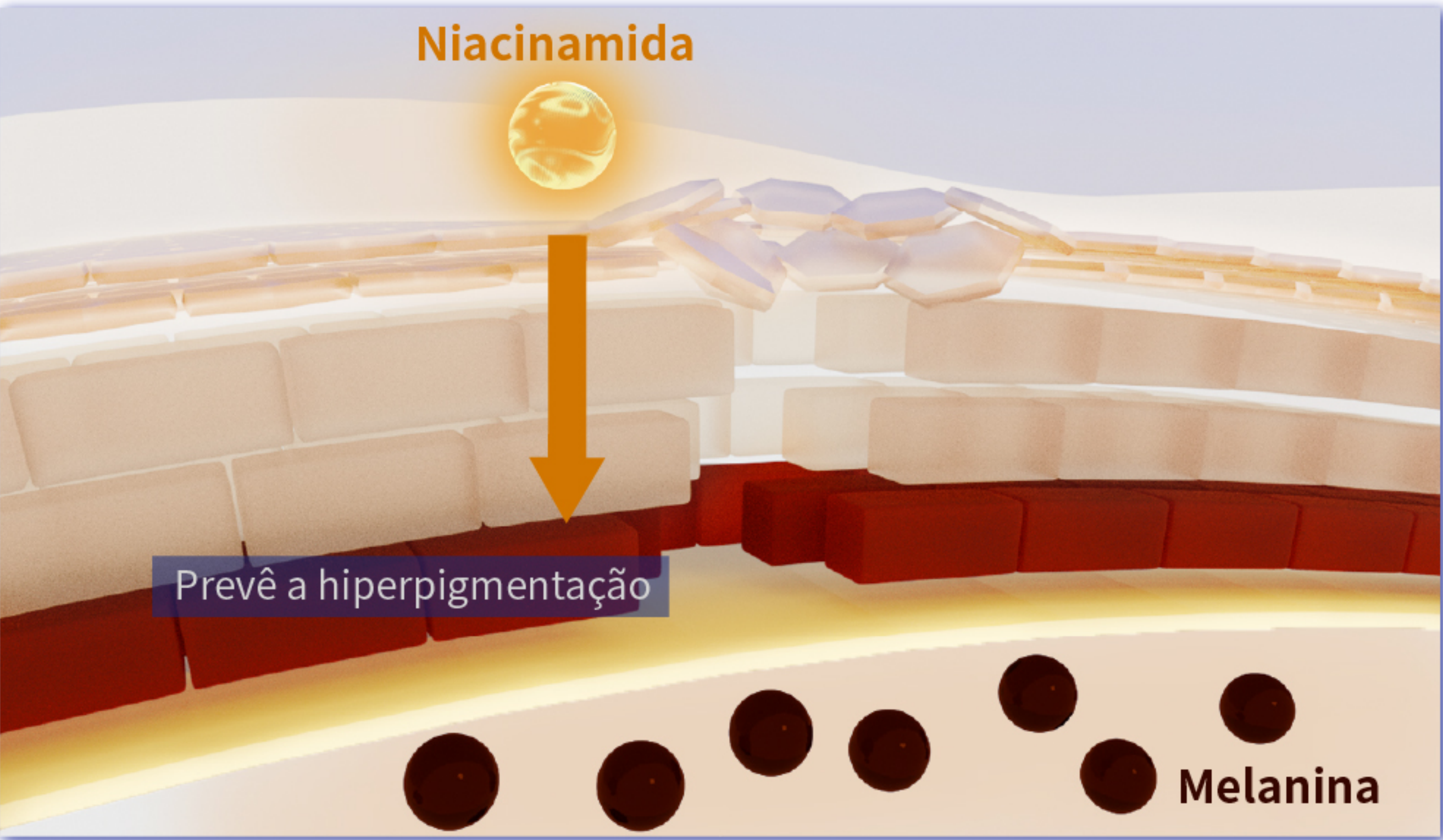

- Quando a pele irritada e enfraquecida recebe estímulo excessivo dos raios UV, ocorre uma produção excessiva de melanina. A niacinamida impede que a melanina se deposite na pele, ajudando a prevenir manchas e hiperpigmentação.

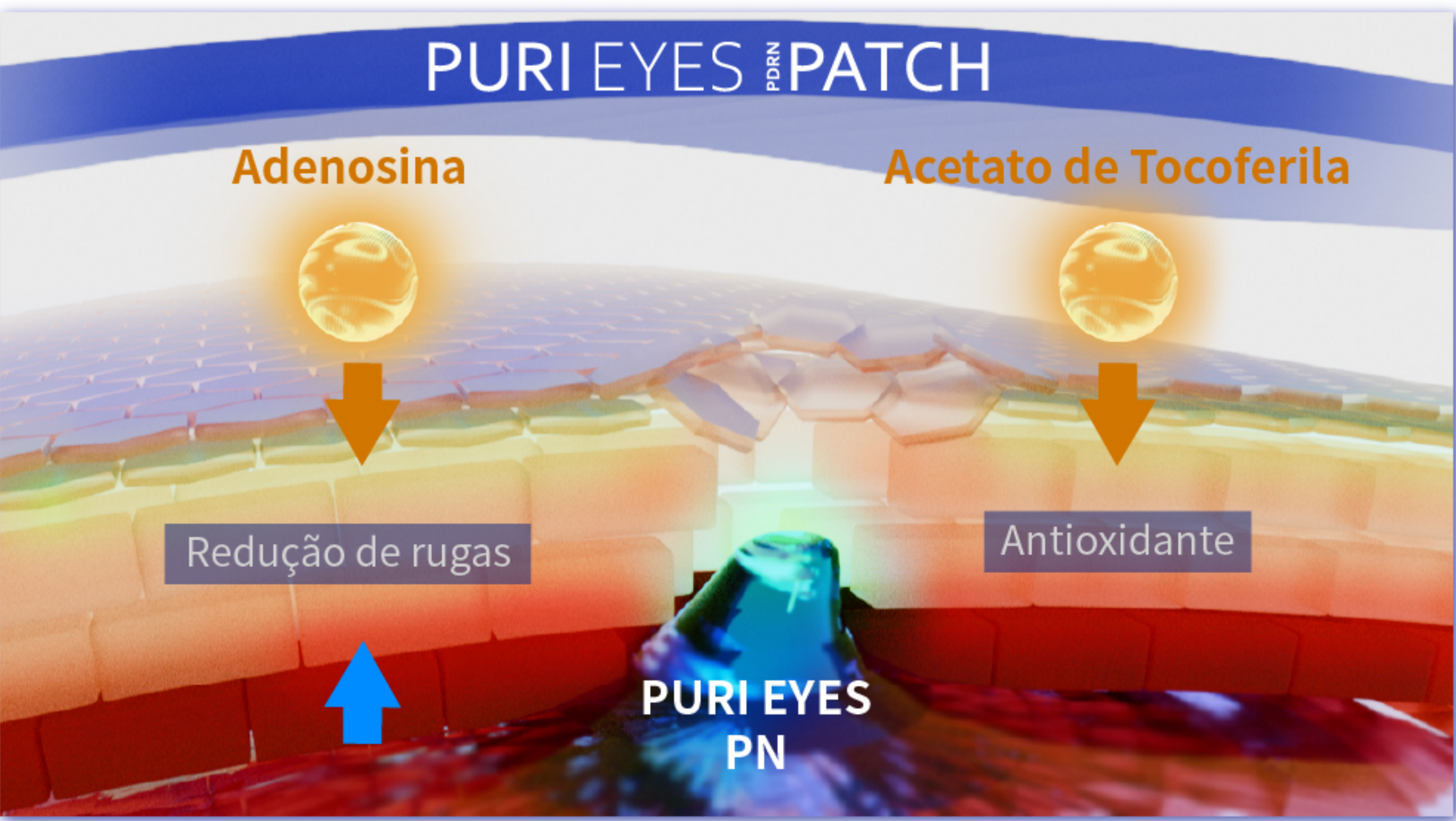

- A adenosina possui excelente efeito na melhora das rugas e, em conjunto com o PURI EYES, potencializa os resultados do tratamento ao atuar nas rugas de dentro para fora da pele.
- O acetato de tocoferila é um antioxidante especializado que ajuda a prevenir a oxidação da pele e o envelhecimento acelerado pelo calor.

Fortalece a Regeneração e  
Firma a Estrutura da Pele

---



# MECANISMO

Dual Pharmacological action of Polynucleotide

## A<sub>2A</sub> Receptor Agonist


**AETERDERM®PURI EYES** O polinucleotídeo liga-se seletivamente ao receptor A<sub>2A</sub> e induz uma resposta anti-inflamatória.



Também ativa 3 fatores de crescimento para regenerar o tecido danificado.




Induz a angiogênese por meio da secreção do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e melhora os capilares da pele, que diminuem com a idade. O aumento dos capilares cutâneos ajuda a prevenir o envelhecimento e a melhorar a saúde da pele, promovendo o fornecimento adequado de nutrientes essenciais.

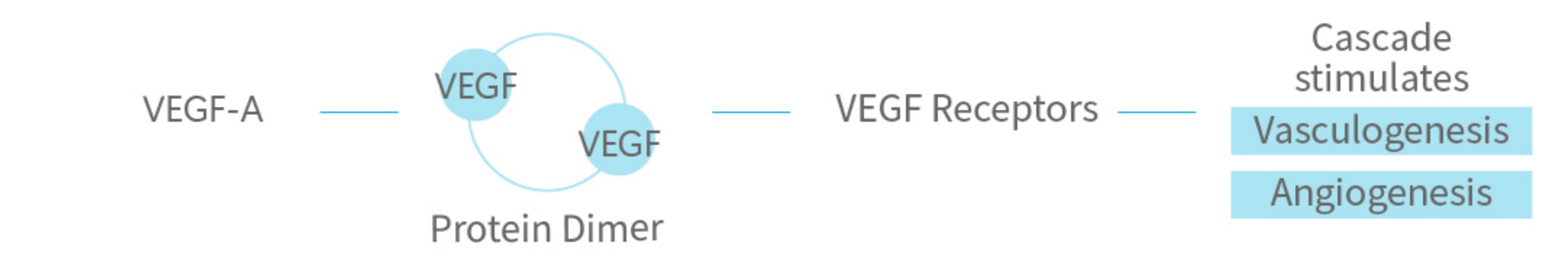


## Via de Salvamento

A via de salvamento sintetiza ácidos nucleicos rapidamente com menos gasto de energia e induz a regeneração celular.

### Via De Novo sem PN

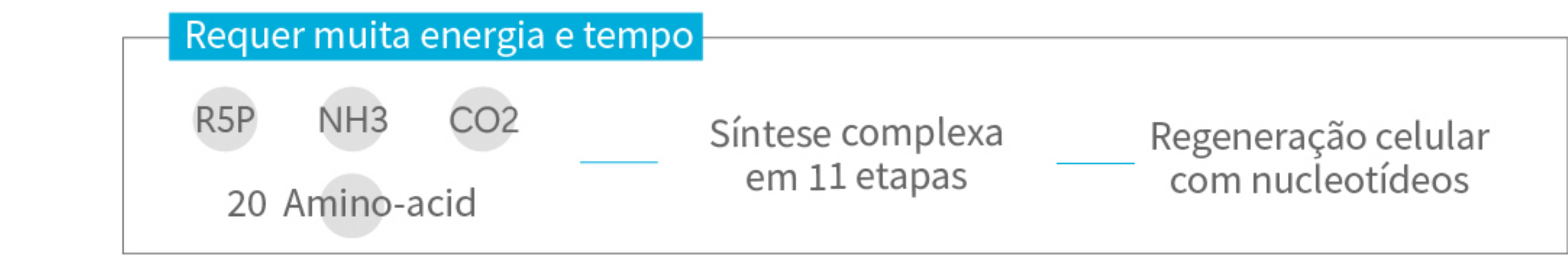

### Via de Salvamento com PN

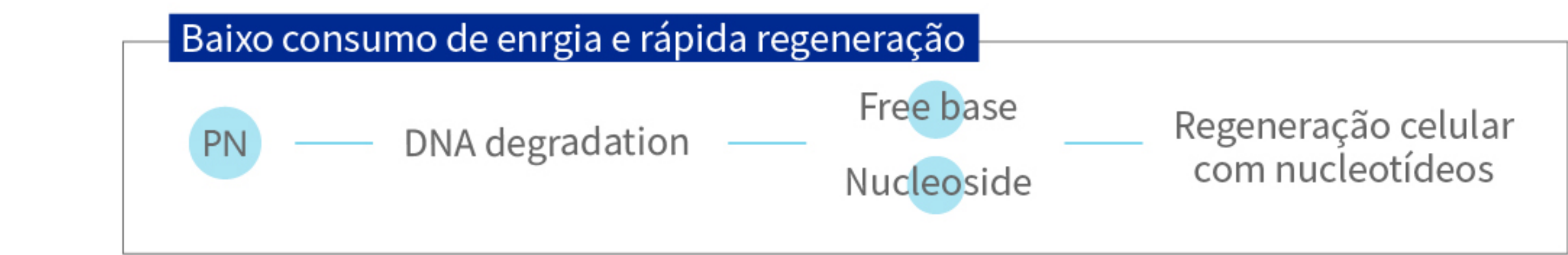

AETERDERM®

# PURI EYES

Under eye skin rejuvenation

## INGREDIENTES

Sodium Polynucleotide \_\_\_\_\_ 2mg/mL  
Phosphate buffered saline \_\_\_\_\_ q . s

## EMBALAGEM

1.1mL X 1 Seringa / Caixa

AETERDERM®

# PURI EYES PRO

Under eye skin rejuvenation

## INGREDIENTES

Sodium Polynucleotide \_\_\_\_\_ 6mg/mL  
Phosphate buffered saline \_\_\_\_\_ q . s

## EMBALAGEM

1.1mL X 1 Seringa / Caixa

AETERDERM®

# PURI EYES PDRN PATCH

Reduce aging of the skin  
Eye patch for improving under-eye skin wrinkles

## INGREDIENTES

Water(Aqua), Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Chondrus Crispus Powder, Benzyl Glycol, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum,PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Dipotassium glycyrrhizate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Adenosine, Raspberry Ketone, Ultramarines(CI 77007), Disodium EDTA, Synthetic Fluorphlogopite, Butylene Glycol, Calcium Lactate, 1,2-Hexanediol, Fragrance(Parfum), Titanium Dioxide(CI 77891),Hydrolyzed Collagen, Sodium Hyaluronate, Sodium DNA, Hydrolyzed Coral

## EMBALAGEM

90 g / 3.17 oz (60ea)